

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni



makoto™
INTRAVASCULAR IMAGING SYSTEM

Manuale di istruzioni

Utilizzo con **REF** TVC-MC10



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP L'Aia
Paesi Bassi

infraredx™
A **NIPRO** COMPANY

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni



Infraredx, Inc.
28 Crosby Drive, Suite 100
Bedford, MA 01730 USA
+1-800-596-3104

Numero verde servizio clienti Infraredx:
+1-800-596-3104

© 2021 Infraredx™, Inc. Tutti i diritti riservati.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Sommario

1	INTRODUZIONE AL SISTEMA MAKOTO INTRAVASCULAR IMAGING SYSTEM™	1-6
1.1	INDICAZIONI PER L'USO	1-6
1.2	FORMAZIONE	1-6
1.3	INFORMAZIONI DI CONTATTO INFRAREDx	1-6
1.4	BREVETTI	1-6
1.5	MARCHI REGISTRATI	1-7
2	COME INTERPRETARE QUESTO MANUALE	2-1
2.1	SIMBOLI E ICONE	2-1
2.2	ABBREVIAZIONI	2-1
2.3	AZIONI	2-3
3	AVVERTENZE, SICUREZZA E PRECAUZIONI	3-1
3.1	CONTROINDICAZIONI	3-1
3.2	COMPLICANZE	3-1
3.3	SICUREZZA	3-2
3.4	PRECAUZIONI OTTICHE	3-6
3.5	PRECAUZIONI ELETTRICHE	3-7
3.6	PRECAUZIONI MECCANICHE	3-9
3.7	PRECAUZIONI CHIMICHE E CONTRO GLI INCENDI	3-10
3.8	PRECAUZIONI RELATIVE AL CATETERE E AGLI ACCESSORI	3-11
3.9	CONFORMITÀ AGLI STANDARD DI SICUREZZA	3-13
4	DESCRIZIONE DEL SISTEMA	4-1
4.1	CONSOLE MOBILE DEL SISTEMA MAKOTO INTRAVASCULAR IMAGING SYSTEM™	4-2
4.2	INTERFACCIA GRAFICA UTENTE DEL SISTEMA MAKOTO INTRAVASCULAR IMAGING SYSTEM™	4-4
4.3	CONTROLLER MAKOTO™	4-13
4.4	CATETERI PER IMAGING COMPATIBILI	4-23
4.5	SPETTROSCOPIA NEL VICINO INFRAROSSO (NIRS)	4-23
4.6	ULTRASUONI INTRAVASCOLARI	4-25
5	MEMORIZZAZIONE, SPOSTAMENTO E POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA MAKOTO INTRAVASCULAR IMAGING SYSTEM™	5-1
5.1	SPOSTAMENTO DEL SISTEMA MAKOTO INTRAVASCULAR IMAGING SYSTEM™	5-1
5.2	POSIZIONAMENTO PER L'USO	5-2
5.3	CONSERVAZIONE TRA UN UTILIZZO E L'ALTRO	5-3
6	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO	6-1
6.1	ACCENSIONE	6-1
6.2	SPEGNIMENTO	6-3
7	IMPOSTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL PAZIENTE E ALLA PROCEDURA	7-1
7.1	INSERIMENTO MANUALE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL PAZIENTE E ALLA PROCEDURA	7-3
7.2	INSERIMENTO SEMI-AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL PAZIENTE E ALLA PROCEDURA	7-3

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

7.3	CANCELLAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL PAZIENTE E ALLA PROCEDURA.....	7-5
7.4	PASSAGGIO ALLA FASE SUCCESSIVA.....	7-5
8	PRIMING DEL CATETERE E PREPARAZIONE DEL CONTROLLER MAKOTO™ PER L'UTILIZZO	8-1
8.1	PRIMING DEL CATETERE	8-1
8.2	PREPARAZIONE DEL CONTROLLER MAKOTO™.....	8-2
8.3	COLLEGAMENTO DEL CATETERE	8-5
8.4	TEST DEL CATETERE	8-6
9	ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI DI SCANSIONE INTRAVASCOLARE MAKOTO™.....	9-1
9.1	ACQUISIZIONE LIVE IVUS.....	9-1
9.2	ACQUISIZIONE DELLA RETRAZIONE AUTOMATICA	9-7
9.3	ESECUZIONE DI SCANSIONI AGGIUNTIVE CON IL SISTEMA MAKOTO INTRAVASCULAR IMAGING SYSTEM™.....	9-12
10	REVISIONE, MISURAZIONE E ANNOTAZIONE DELLE SCANSIONI.....	10-1
10.1	SELEZIONE DELLA SCANSIONE	10-1
10.2	MODIFICA DELLE SCANSIONI	10-2
10.3	NAVIGAZIONE NELLA SCANSIONE.....	10-6
10.4	CONTRASSEGNI	10-9
10.5	MISURAZIONI	10-11
10.6	ANNOTAZIONE SU FOTOGRAMMA	10-23
10.7	ACQUISIZIONE DI SCHERMATA	10-23
10.8	IMPOSTAZIONE DI VISUALIZZAZIONE.....	10-24
11	PROCEDURE DI CHIUSURA	11-1
12	REVISIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE PROCEDURE	12-1
12.1	SELEZIONE DI PROCEDURE E SCANSIONI	12-2
12.2	ESPORTAZIONE E ARCHIVIAZIONE	12-7
12.3	IMPORTAZIONE DEI DATI	12-15
12.4	ELIMINAZIONE DI SCANSIONI E PROCEDURE	12-18
13	IMPOSTAZIONI DI SISTEMA	13-1
13.1	INFORMAZIONI.....	13-1
13.2	PACS.....	13-1
13.3	USB/DVD (SUPPORTI RIMOVIBILI)	13-4
13.4	ELENCO DI LAVORO DELLE MODALITÀ.....	13-5
13.5	CAMPI OBBLIGATORI	13-7
13.6	VISUALIZZAZIONE DELLE SCANSIONI	13-7
13.7	SUPPORTO	13-9
13.8	OPZIONI DI ASSISTENZA.....	13-10
14	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA RADIOGRAFICO ED ESPORTAZIONE VIDEO.....	14-1
14.1	USCITA VIDEO DIGITALE.....	14-1
15	GLOSSARIO DEI TERMINI	15-1

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

16	MANUTENZIONE	16-1
16.1	INFORMAZIONI DI SISTEMA	16-1
16.2	RESPONSABILITÀ DI INSTALLAZIONE	16-2
16.3	REQUISITI DI INSTALLAZIONE	16-3
16.4	REQUISITI AMBIENTALI/PRECAUZIONI	16-4
16.5	INFORMAZIONI GENERALI E DI CONTATTO	16-4
16.6	INDICATORI DI AVVERTENZA E DI GUASTO.....	16-5
16.7	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	16-6
16.8	PARTI DI RICAMBIO	16-11
16.9	DISMISSIONE DEL SISTEMA MAKOTO™ IMAGING SYSTEM.....	16-12
17	APPENDICI	17-1
17.1	APPENDICE A: GARANZIA E INFORMAZIONI RELATIVE	17-1
17.2	APPENDICE B: SINTESI DEGLI STUDI EX VIVO E CLINICI	17-4
17.3	APPENDICE C: LETTERATURA DI RIFERIMENTO	17-15
17.4	APPENDICE D: EMISSIONE ACUSTICA (I) CONFORMITÀ ALLA NORMA IEC 60601-2-37:2007	17-16
17.5	APPENDICE E: EMISSIONE ACUSTICA (II) TABELLA DI RAPPORTO PER LA TRACCIA 1.....	17-17
17.6	APPENDICE F: TAVOLA DELLE INDICAZIONI PER L'USO SUGLI ULTRASUONI.....	17-18
17.7	APPENDICE G: ACCURATEZZA E PRECISIONE DELLA MISURAZIONE	17-20
17.8	APPENDICE H: CONFORMITÀ ELETTROMAGNETICA	17-21

1 Introduzione al sistema Makoto Intravascular Imaging System™

1.1 Indicazioni per l'uso

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è destinato all'esame nell'infrarosso vicino delle arterie coronarie in pazienti sottoposti ad angiografia coronarica invasiva. Il sistema è concepito per la rilevazione di placche lipidiche a livello coronarico di interesse, ed è pensato per la valutazione del carico del "core" lipidico nelle arterie coronarie.

Il sistema è realizzato per l'esame a ultrasuoni della patologia intravascolare coronarica. L'imaging a ultrasuoni intravascolare è indicato in pazienti candidati a procedure interventistiche coronariche transluminali.

1.2 Formazione

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ deve essere utilizzato esclusivamente da medici qualificati e personale di laboratorio addetto al cateterismo cardiaco.

Al momento dell'installazione e su richiesta è disponibile la formazione in loco da parte del personale Infraredx o di formatori certificati sull'utilizzo del sistema Makoto Intravascular Imaging System™. Contattare il servizio clienti Infraredx o il fornitore di servizi locale per programmare la formazione in loco e le revisioni di competenza sulla formazione periodiche.

1.3 Informazioni di contatto Infraredx

Negli Stati Uniti, contattare:

Infraredx, Inc.
28 Crosby Drive, Suite 100
Bedford, MA 01730
USA

www.infraredx.com
+1-800-596-3104

1.4 Brevetti

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™, i cateteri e gli accessori associati sono protetti da uno o più brevetti. Per un elenco completo dei brevetti emessi, consultare:

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

<http://www.infraredx.com/infraredx-intellectual-property/>

1.5 Marchi registrati

Infraredx™, Makoto™, Dualpro™ e TVC™ sono marchi di Infraredx, Inc. Il nome “Infraredx” è un marchio registrato di Infraredx Inc. negli Stati Uniti, nell’Unione Europea, in Australia, in Cina, nella Corea del Sud e in Giappone.

Tutti gli altri nomi di marchi e di prodotti utilizzati e citati in questo documento sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali appartenenti ai rispettivi proprietari.

2 Come interpretare questo manuale

Questo manuale contiene importanti informazioni per il funzionamento del sistema Makoto Intravascular Imaging System™. Leggere attentamente il manuale prima di provare a utilizzare il prodotto.

2.1 Simboli e icone

Il manuale potrebbe contenere degli avvisi, indicati come “Avvertenze”, “Attenzione” e “Note”.



AVVERTENZA

La mancata osservanza di avvertenze scritte potrebbe causare situazioni pericolose, con conseguenti lesioni al paziente o all'operatore.



ATTENZIONE

La mancata osservanza delle precauzioni scritte può causare danni al sistema Makoto Intravascular Imaging System™ o degradazione delle prestazioni di quest'ultimo.

NOTA

Le note forniscono promemoria e suggerimenti utili per l'utilizzo delle funzionalità avanzate.

2.2 Abbreviazioni

CA	Corrente alternata
ANSI	American National Standards Institute (Istituto americano di normalizzazione)
AS	Area Stenosis (Stenosi dell'area)
AVI	Audio Video Interleave
CABG	Coronary Artery Bypass Graft (Impianto di bypass artero-coronarico)
CUI	Console User Interface (Interfaccia utente della console)
CPU	Central Processing Unit (Unità di elaborazione centrale)
DICOM	Digital Imaging and Communications in Medicine (Standard di immagini e comunicazione digitali in medicina)

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

DVD	Digital Video Disc (Disco video digitale)
EEM	External Elastic Membrane (Membrana elastica esterna)
EMC	Electromagnetic Compatibility (Compatibilità elettromagnetica)
EMI	Electromagnetic Interference (Interferenza elettromagnetica)
EO	Ethylene Oxide (Ossido di etilene)
EtO	Ethylene Oxide (Ossido di etilene)
FDA	Food and Drug Administration (Agenzia per gli alimenti e i medicinali)
FHD	Display Full HD, 1920x1080 pixel
HD	Display HD
CEI	Commissione elettronica internazionale
IP	Internet Protocol (Protocollo Internet)
ISO	International Organization for Standardization (Organizzazione internazionale per la normalizzazione)
IVUS	Intravascular Ultrasound (Ultrasuoni intravascolari)
JPEG	Joint Photographic Experts Group
LCBI	Lipid Core Burden Index (Indice del carico di core lipidico)
LCP	Lipid Core Containing Plaque of Interest (Core lipidico contenente una placca di interesse)
mxLCBI	LCBI massimo di una larghezza della finestra specifica
NIR	Near-infrared (Vicino infrarosso)
NIRS	Near-infrared Spectroscopy (Spettroscopia nel vicino infrarosso)
PA	Plaque Area (Area della placca)
PB	Plaque Burden (Carico della placca)
PACS	Picture Archiving and Communication System (Sistema di archiviazione e comunicazione delle immagini)
PTCA	Percutaneous transluminal coronary angioplasty (Angioplastica coronarica percutanea transluminale)
RF	Radiofrequenza

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

UL	Underwriters Laboratories (Laboratori dei sottoscrittori)
USB	Universal Serial Bus (Bus seriale universale)

2.3 Azioni

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è realizzato principalmente per un'interazione di tipo touchscreen. Oltre al monitor touchscreen, il sistema dispone di un mouse. Ricordare le operazioni e le azioni seguenti è utile per interagire con il sistema Makoto Intravascular Imaging System™:

Toccare	Contatto momentaneo con il touchscreen o pressione e rilascio di un pulsante fisico.
Premere	Pressione e rilascio di un pulsante fisico.
Fare clic con il pulsante destro	Un singolo clic con il pulsante destro del mouse.
Fare clic con il pulsante sinistro o fare clic	Un singolo clic con il pulsante sinistro del mouse.
Fare doppio clic	Due clic con il pulsante sinistro del mouse in rapida successione.
Scorrere verso l'alto/il basso	Scorrimento con la rotellina del mouse verso di sé per scorrere verso il basso e lontano da sé per scorrere verso l'alto.
Trascinare	Spostamento del dito in un'altra posizione mentre è in contatto con un'icona mobile. Allontanamento del dito dallo schermo per rilasciare l'icona.

3 Avvertenze, sicurezza e precauzioni

3.1 Controindicazioni

L'impiego del catetere Makoto Intravascular Imaging System™ è controindicato quando l'introduzione di un eventuale catetere costituirebbe una minaccia per la sicurezza del paziente. Tra le controindicazioni citiamo:

- Batteriemia o sepsi
- Anomalie maggiori del sistema della coagulazione
- Grave instabilità o shock a livello emodinamico
- Pazienti con diagnosi di spasmo delle arterie coronarie
- Pazienti dichiarati non idonei per un intervento chirurgico di bypass aortocoronarico (CABG)
- Occlusione totale
- Pazienti dichiarati non idonei per l'angioplastica coronarica (PTCA)
- Pazienti inadatti per le procedure di ultrasonografia intravascolare (IVUS)

3.2 Complicanze

In conseguenza dell'esame intravascolare possono manifestarsi le seguenti complicanze:

- Reazione allergica
- Angina
- Arresto cardiaco
- Aritmia cardiaca, tra cui, a titolo esemplificativo, tachicardia ventricolare, fibrillazione atriale/ventricolare e blocco cardiaco completo
- Tamponamento cardiaco/versamento pericardico
- Decesso
- Intrappolamento del dispositivo che richiede un intervento chirurgico
- Embolia (aria, corpo estraneo, tessuto o trombo)
- Emorragia/Ematoma
- Ipotensione
- Infezione
- Infarto miocardico
- Ischemia miocardica
- Ictus e attacco ischemico transitorio
- Trombosi
- Occlusione e chiusura improvvisa di un vaso
- Trauma di un vaso, tra cui, a titolo esemplificativo, dissezione e perforazione

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

3.3 Sicurezza

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ o Makoto™ è stato progettato per un funzionamento e una manutenzione il più possibile sicuri. Tuttavia, qualsiasi strumento medico può causare lesioni se viene installato, utilizzato, spostato o sottoposto a manutenzione in maniera non appropriata e questo sistema non fa eccezione.

I potenziali pericoli sono:

- danno oculare (visione) derivante dall'esposizione alla radiazione laser diretta o riflessa;
- scossa elettrica dal contatto con i componenti elettrici all'interno del sistema;
- lesione fisica durante l'utilizzo o lo spostamento del sistema.

Il sistema Makoto™ è dotato di caratteristiche progettate specificamente per garantire un utilizzo sicuro agli utenti. Tutto il personale di laboratorio addetto al cateterismo deve acquisire familiarità con la posizione e il funzionamento delle caratteristiche di sicurezza discusse più avanti. Durante le procedure di imaging, le parti mobili si trovano esclusivamente all'interno, in modo che l'utente non sia esposto a pericoli di natura meccanica.









Chiunque utilizzi il sistema Makoto™ per procedure di qualsiasi tipo sugli esseri umani deve comprendere interamente le implicazioni di tale uso. L'AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine, Istituto americano degli ultrasuoni in medicina) ha pubblicato un documento intitolato "Medical Ultrasound Safety" (AIUM 2009). ALARA è un acronimo per il principio dell'uso prudente degli ultrasuoni diagnostici ottenendo le informazioni diagnostiche a una potenza di emissione che è "As Low As Reasonably Achievable", tanto bassa quanto ragionevolmente raggiungibile. Per ottenere una copia di tale documento, contattare l'AIUM.






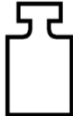






AVVERTENZA

Osservare le precauzioni discusse in questa sezione quando si installa, si utilizza, si sposta o si esegue la manutenzione del sistema per evitare situazioni potenzialmente pericolose.









Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

<i>SIMBOLO</i>	<i>SPIEGAZIONE</i>
	Avvertenza
	Attenzione
	Fare riferimento al manuale di istruzioni
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Il prodotto è conforme agli standard applicabili di Stati Uniti, Europa e Canada, in base alla valutazione di TUV Rheinland.
100 - 120 V~ 50/60 Hz 5 A 220 - 240 V~ 50/60 Hz 3 A	Il prodotto funziona tramite una fonte di alimentazione che fornisce nominalmente 100 V CA, 120 V CA, 220 V CA o 240 V CA, 50/60 Hertz La corrente massima è di 5 Ampere a 100 - 120 V CA e 3 Ampere a 220 - 240 V CA.
	Produttore
	Data di produzione
	Numero di catalogo

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni




	Numero di serie
	Codice lotto
	Data di scadenza
	Massa
	Rappresentante autorizzato per la Comunità Europea
	Messa a terra di protezione
	Applicazione cardiaca diretta a prova di defibrillazione (parte applicata con tipo di protezione CF)
	Quantità nella confezione
	Diametro interno del catetere guida compatibile
	Diametro esterno del filo guida compatibile

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

	Apertura laser
	Proteggere dalla luce diretta del sole
	Apirogeno
	Tenere lontano dall'acqua
	Limite di temperatura
	Limite di umidità
R_x Only	Dispositivo destinato alla vendita o all'uso esclusivo a medici o dietro prescrizione medica
	Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata
	Monouso

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

	Non risterilizzare
	Sterilizzato con ossido di etilene
	Non valutato per la sicurezza in caso di RM

Nella console o nel controller Makoto™ non ci sono parti la cui manutenzione può essere eseguita dall'utente. Tutte le regolazioni vengono eseguite in fabbrica prima della spedizione ai clienti oppure in loco da fornitore di servizi o personale qualificato Infraredx.



L'alterazione o qualsiasi tentativo di modifica del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ renderà nulla la garanzia del prodotto e potrebbe anche comportare un utilizzo improprio del sistema.

Il dispositivo potrebbe deteriorarsi o guastarsi.

3.4 Precauzioni ottiche



Il prodotto contiene un laser di classe 1M che emette radiazioni laser invisibili. Non osservare direttamente con strumenti ottici.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni



AVVERTENZA

Non guardare mai direttamente il raggio laser proveniente dal sistema o riflesso da una superficie.



AVVERTENZA

Non guardare il raggio laser attraverso obiettivi, binocoli, lenti di ingrandimento, mirini fotografici, telescopi o qualsiasi elemento o strumento ottico che potrebbe concentrare la luce negli occhi.



AVVERTENZA

Non permettere mai che oggetti riflettenti quali gioielli, orologi, strumenti di metallo o specchi intercettino e riflettano il raggio laser.

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ contiene un sistema laser ed è classificato come “Prodotto laser di classe-1M” ai sensi di uno standard di prestazioni delle radiazioni del Dipartimento di salute e servizi umani (DHHS) degli Stati Uniti, in base alla legge Radiation Control for Health and Safety Act del 1968 e in base alla norma IEC 60825-1, Sicurezza dei prodotti laser.

L'energia luminosa emessa da questo sistema giace nella regione invisibile vicino agli infrarossi dello spettro elettromagnetico a lunghezze d'onda comprese tra 1 e 2 micron. Questo fatto va ricordato quando si prendono precauzioni per evitare esposizioni involontarie.

NOTA: NON sono richiesti occhiali di sicurezza laser durante l'uso del sistema Makoto Intravascular Imaging System™.

3.5 Precauzioni elettriche



AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle informazioni della presente sezione può causare danni all'apparecchiatura, lesioni personali e perfino il decesso.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni



AVVERTENZA

L'uso di questa apparecchiatura accanto o impilata su altre apparecchiature deve essere evitato perché potrebbe causare un funzionamento improprio. Se tale uso è necessario, questa apparecchiatura e le altre apparecchiature devono essere osservate per verificare che funzionino normalmente.



ATTENZIONE

L'installazione delle apparecchiature elettromedicali deve avvenire rispettando speciali precauzioni di compatibilità EMC, in osservanza delle informazioni EMC fornite nell'Appendice H: Conformità elettromagnetica



ATTENZIONE

NON posizionare il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ in prossimità di altre apparecchiature, in quanto potrebbero insorgere interferenze elettriche.



ATTENZIONE

Una scansione Live IVUS o di retrazione può essere interrotta se il sistema è esposto a una scarica elettrostatica (ESD). Se una scansione Live IVUS o di retrazione viene interrotta, quest'ultima può essere riavviata immediatamente.

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ utilizza una tensione di linea CA all'interno della console. La disconnessione della spina del cavo di alimentazione del sistema Makoto™ dalla presa interromperà l'alimentazione al sistema, causando un brusco arresto di tutte le operazioni.

Nessuna parte dell'alloggiamento esterno può essere rimossa se non da un tecnico qualificato e autorizzato.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non collegare l'alimentazione di ingresso del sistema ad apparecchi che non abbiano la protezione della messa a terra. Non collegare il sistema ad apparecchi di classe II.

Le apparecchiature di comunicazione di radiofrequenza (RF) possono influire sulle prestazioni del sistema Makoto Intravascular Imaging System™. Questo tipo di apparecchiatura va collocato il più lontano possibile dal sistema Makoto™. Le emissioni RF irradiate o condotte possono causare la distorsione dell'immagine o altri artefatti nella visualizzazione dell'IVUS.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni



Il sistema Makoto™ non è destinato all'utilizzo con dispositivi chirurgici ad alta frequenza (HF)/in radiofrequenza (RF).



Le emissioni RF irradiate o condotte possono causare la distorsione dell'immagine o artefatti nel display del sistema Makoto Intravascular Imaging System™.

Infraredx raccomanda l'utilizzo di una sorgente di alimentazione continua in qualsiasi struttura in cui la tensione è soggetta a cali o in cui l'alimentazione può interrompersi.

Il sistema Makoto™ è destinato a essere collegato tramite cavo di rete a un sistema informatico ospedaliero protetto e sicuro. Se un cavo di rete è collegato al sistema Makoto Intravascular Imaging System™ per trasferire dati al sistema informatico di un ospedale, il cavo deve essere di tipo Cat 5e Ethernet schermato (consultare la sezione 3.9). L'uso di un cavo non conforme può comportare maggiori emissioni RF o una minore immunità a RF.

3.6 Precauzioni meccaniche



L'operatore della console mobile del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ NON dovrà posizionarsi tra la console del sistema Makoto™ e un'altra attrezzatura mobile del laboratorio di cateterismo, a causa del rischio di lesioni.



Il tavolo di procedura deve essere mantenuto orizzontale durante l'utilizzo del sistema Makoto™ o in qualsiasi momento in cui il controller Makoto™ si trovi nel campo sterile. NON utilizzare comandi di rotazione o inclinazione del tavolo, se disponibili.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni



AVVERTENZA

NON posizionare il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ nel raggio di movimento dei pezzi del sistema radiografico.



AVVERTENZA

Verificare che i cavi che fuoriescono da o si collegano al sistema Makoto Intravascular Imaging System™ siano ben aderenti al pavimento.

Durante l'utilizzo tipico, la console mobile del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è posizionata in prossimità dei piedi del tavolo da esami o a destra dei monitor del sistema radiografico. Potrebbe insorgere un pericolo di ribaltamento se la console mobile del sistema Makoto™ entra in contatto con un'attrezzatura mobile nel laboratorio di cateterismo (tavolo da esami, braccio a C, ecc.). Se posizionato nel raggio di movimento di questa attrezzatura, non incastrare le ruote di blocco della console del sistema Makoto™.

Durante il normale utilizzo della console mobile del sistema Makoto Intravascular Imaging System™, diversi cavi potrebbero essere collegati alla console o fuoriuscire da quest'ultima. Per ridurre al minimo i pericoli di inciampo, assicurarsi che i cavi siano ben aderenti al pavimento. Ovunque sia possibile, evitare di posizionare cavi lungo aree a elevato transito della sala.

Il controller Makoto™ va collocato su una superficie piatta nel corso della procedura, specialmente durante l'acquisizione dei dati. Il controller Makoto™ deve essere posizionato nel supporto di stoccaggio della console quando quest'ultima viene spostata o il controller non è in uso.

3.7 Precauzioni chimiche e contro gli incendi



AVVERTENZA

Questa apparecchiatura non è destinata all'utilizzo con anestetici o liquidi infiammabili o in ambienti ricchi di ossigeno (>25%).

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Non sono noti pericoli chimici o di incendio associati al sistema Makoto Intravascular Imaging System™.

3.8 Precauzioni relative al catetere e agli accessori



AVVERTENZA

STATO DELLA CALIFORNIA (SOLO STATI UNITI)

I prodotti monouso compatibili e le relative confezioni sono state sterilizzate con ossido di etilene. La confezione potrebbe esporre l'utente a ossido di etilene, una sostanza chimica nota allo Stato della California come causa di cancro o malformazioni congenite o altri danni agli organi riproduttivi.



AVVERTENZA

Gli accessori del catetere (barriera sterile del controller Makoto™ e accessori per priming) sono forniti sterili e progettati per essere impiegati unicamente su un solo paziente. Esclusivamente monouso. Non riutilizzare, rigenerare o risterilizzare. Il riutilizzo, la rigenerazione o la risterilizzazione può compromettere l'integrità strutturale, con il rischio di ottenere scarsa qualità delle immagini o provocare lesioni, malattie o il decesso del paziente. Il riutilizzo, la rigenerazione o la risterilizzazione potrebbero anche contaminare il dispositivo e causare infezioni al paziente, con conseguente malattia o decesso dello stesso. Infraredx non accetta reclami sulle prestazioni di prodotti riutilizzati, rigenerati o risterilizzati.



AVVERTENZA

NON usare il catetere se la confezione interna è aperta o danneggiata.



AVVERTENZA

Durante il collegamento al controller Makoto™, NON fissare la punta distale del catetere né visualizzarla direttamente con strumenti ottici.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni



AVVERTENZA

I rifiuti medici possono causare infezioni e/o malattie. Dopo l'uso, smaltire il prodotto e la confezione conformemente alle disposizioni ospedaliere, amministrative e/o delle autorità locali.



AVVERTENZA

Prestare attenzione quando si espone un filo guida in un vaso sottoposto a una procedura di stent. I cateteri che non racchiudono il filo guida potrebbero attaccarsi allo stent tra la giunzione del catetere e il filo guida.



AVVERTENZA

Prestare attenzione quando si fa avanzare un filo guida dopo il posizionamento di uno stent. Quando si incrocia uno stent, il filo potrebbe fuoriuscire tra le sporgenze dello stent non completamente fissato. Il successivo avanzamento del catetere potrebbe causare la formazione di un groviglio tra questo e lo stent impiantato.



AVVERTENZA

Se si incontra resistenza durante il ritiro del catetere, verificare la resistenza mediante fluoroscopia, quindi rimuovere l'intero sistema del catetere, il catetere guida e il filo guida utilizzando una guida fluoroscopica.

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ emette una radiazione laser nel vicino infrarosso dal laser situato nella console tramite il controller Makoto™ e sul catetere collegato. La luce del vicino infrarosso è invisibile all'occhio umano. Fissare o concentrare la luce del vicino infrarosso attraverso la cornea e sulla retina potrebbe causare danni alla vista.

Il sistema Infraredx Makoto Intravascular Imaging System™ è realizzato per l'utilizzo esclusivo con il catetere per imaging IVUS+NIRS Dualpro™ (RIF.: TVC-C195-42) con Extended Bandwidth™, un catetere coronarico monouso.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Prima dell'uso, esaminare attentamente tutto il materiale da utilizzare durante la procedura per garantire una prestazione adeguata. Il catetere è stato ispezionato e sterilizzato usando ossido di etilene (EtO) gassoso prima della spedizione. Prima di usarlo, esaminare il catetere e la confezione che lo contiene per verificare l'assenza di danni o di rotture del sigillo, o dei sigilli, della confezione sterile.



ATTENZIONE

Conservare i cateteri confezionati in luogo fresco e asciutto.



ATTENZIONE

NON avvolgere o piegare eccessivamente il catetere (>45 gradi). Ciò può causare rotture del cavo guida.

3.9 Conformità agli standard di sicurezza



AVVERTENZA

L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe comportare una mancata conformità del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ a uno o più standard elencati in questa sezione del manuale.

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è stato progettato per risultare conforme a tutti gli standard applicabili (CEI, ANSI, ISO, UL, ecc.) per l'utilizzo sicuro dei laser, degli ultrasuoni e degli apparecchi elettrici nelle strutture sanitarie.

I seguenti accessori sono stati analizzati e ritenuti compatibili con il sistema Makoto Intravascular Imaging System™: cavo video e dati integrati (TVC-10PMC), cavo DVI-D (PN2665), stampante Bluetooth® (TVC-9BPK) e cavo schermato Cat5e (PN2690). Contattare il rappresentante commerciale per effettuare un ordine.

Gli standard specifici comprendono, fra l'altro, quanto segue:

Standard	Descrizione
IEC 60601-1:2012 edizione 3.1 ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 Canada: CAN/CSA 22.2 N. 60601-1:14 KS C IEC 60601-1:2008	Attrezzature elettromedicali -- Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Standard	Descrizione
IEC 60601-1-2:2014 Quarta edizione	Attrezzature elettromedicali –Parte 1-2: requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali –Standard collaterale: compatibilità elettromagnetica - Requisiti e test
IEC 60601-1-6:2010 edizione 3.0 + A1:2013 CAN/CSA 22.2 N. 60601-1-6:11	Attrezzature elettromedicali –Parte 1-6: requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali –Standard collaterale: usabilità
IEC 60601-2-37:2007 edizione 2.0 CAN/CSA 22.2 N. 60601-2-37:08 KS C IEC 60601-2-37:2011	Attrezzature elettromedicali –Parte 2-37: requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali delle attrezzature medicali diagnostiche e di monitoraggio a ultrasuoni
IEC 60825-1:2014 CFR Titolo 21 parte 1040.10 e 1040.11	Sicurezza dei prodotti laser –Parte 1: classifica e requisiti delle attrezzature
IEC 62304: 2006 CAN/CSA-CEI/IEC 62304:14	Software del dispositivo medico –Processi del ciclo di vita del software
ISO 10555-1:2013	Cateteri intravascolari - Cateteri sterili e monouso - Parte 1: requisiti generali
ISO 10993	Valutazione biologica dei dispositivi medicali
ISO 11135:2014 + A1:2018	Sterilizzazione dei prodotti sanitari –Ossido di etilene
IEC 62366:2007 (edizione 1.0) + A1:2014 CAN/CSA-IEC 62366:14	Dispositivi medicali –Applicazione dell'ingegneria di usabilità ai dispositivi medicali
ISO 15223-1:2016	Dispositivo medicale –Simboli da utilizzare nelle etichette dei dispositivi medicali, nelle etichettature e nelle informazioni da fornire - Parte 1: requisiti generali.

4 Descrizione del sistema



AVVERTENZA

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è realizzato per essere utilizzato esclusivamente da medici qualificati e personale di laboratorio addetto al cateterismo cardiaco.

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ fornisce un imaging intravascolare basato su catetere che utilizza le tecnologie IVUS e NIRS. Il sistema utilizza suoni e luci per caratterizzare le funzionalità intravascolari.

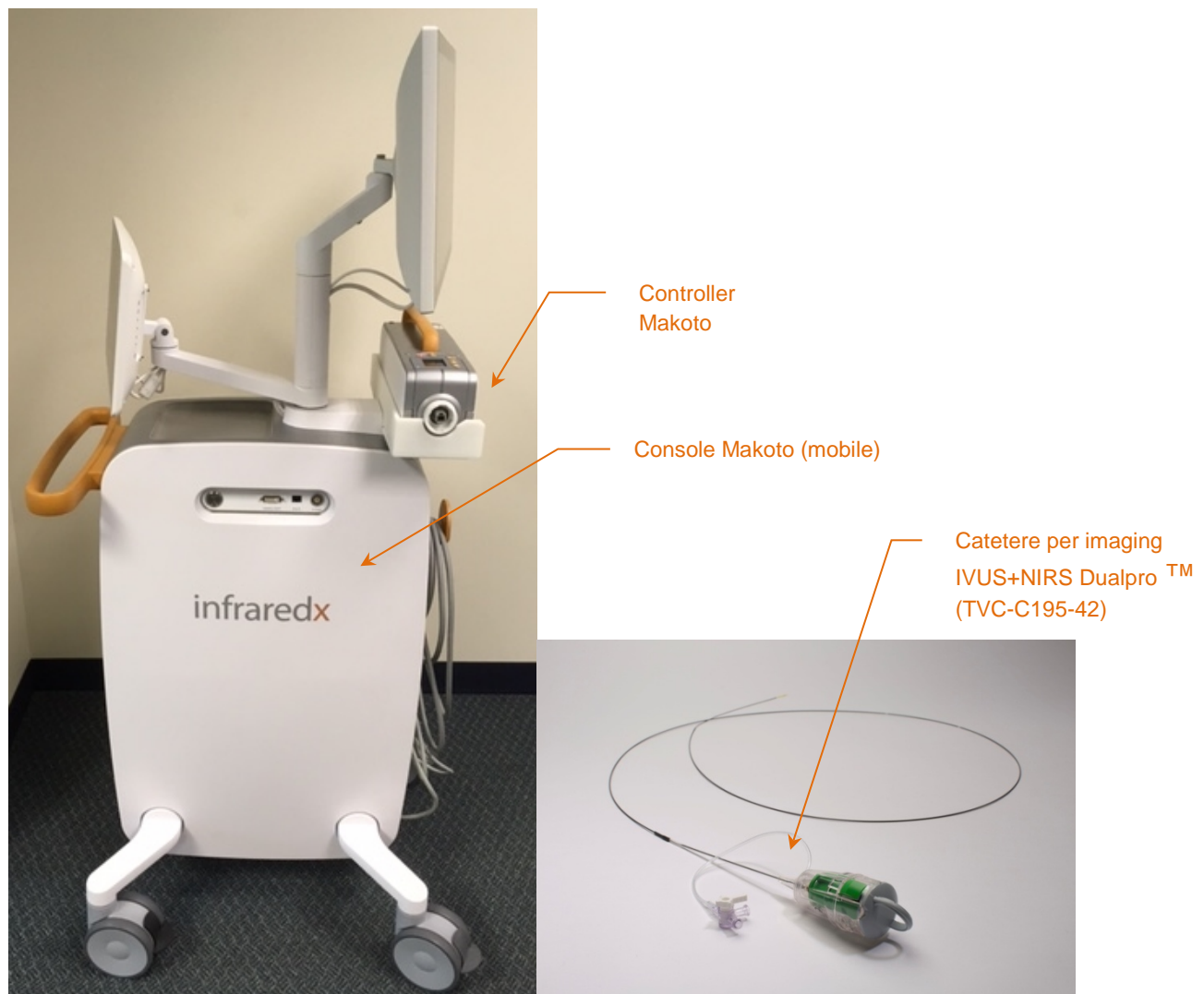


Figura 4-1. Console mobile del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ con catetere per imaging IVUS+NIRS Dualpro™ con Extended Bandwidth.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Il sistema presenta tre componenti principali:

- *Console mobile del sistema Makoto Intravascular Imaging System™*
- *Controller Makoto™*
- *Catetere per imaging IVUS+NIRS Dualpro™ con Extended Bandwidth™* (vedere le Istruzioni per l'uso del catetere)

Il sistema presenta due componenti minori:

- *Barriera sterile del controller Makoto™* (contenuta nella confezione del catetere)
- *Accessori per priming del catetere Dualpro™* (include siringhe per priming, contenute nella confezione del catetere)

4.1 Console mobile del sistema Makoto Intravascular Imaging System™

La console mobile del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ o console Makoto™ contiene diversi componenti principali del sistema.

La console Makoto™ contiene un modulo di alimentazione che distribuisce l'alimentazione alle varie parti del sistema. Il modulo di alimentazione fornisce alimentazione ai display, all'unità di elaborazione centrale (CPU), al laser e al controller Makoto™.

La CPU si trova all'interno della console Makoto™ e gestisce, archivia ed esegue il rendering dei dati registrati con il controller e il catetere del sistema Makoto™. Inoltre, controlla la funzione delle interfacce grafiche fornite all'utente. Il sistema contiene un'unità dati in grado di memorizzare circa 1000 scansioni. I dati possono essere esportati dal sistema a dischi ottici (DVD o Blu-Ray), unità USB o in un percorso di rete tramite cavo Ethernet.

Il sistema può essere configurato per l'invio di dati alle reti PACS.



ATTENZIONE

NON è consigliabile utilizzare il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ come percorso di archiviazione dei dati permanente. I dati scansionati devono essere archiviati in altri supporti ed eliminati dal disco rigido del sistema.

La sorgente di luce laser per le prestazioni del NIRS si trova all'interno della console. La luce viene erogata dal cavo a fibra ottica al controller Makoto™ quando il catetere è collegato durante l'utilizzo. È proprio questo percorso luminoso a permettere al sistema di generare un chemogram o una mappa di probabilità di placche lipidiche a livello coronarico di interesse.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

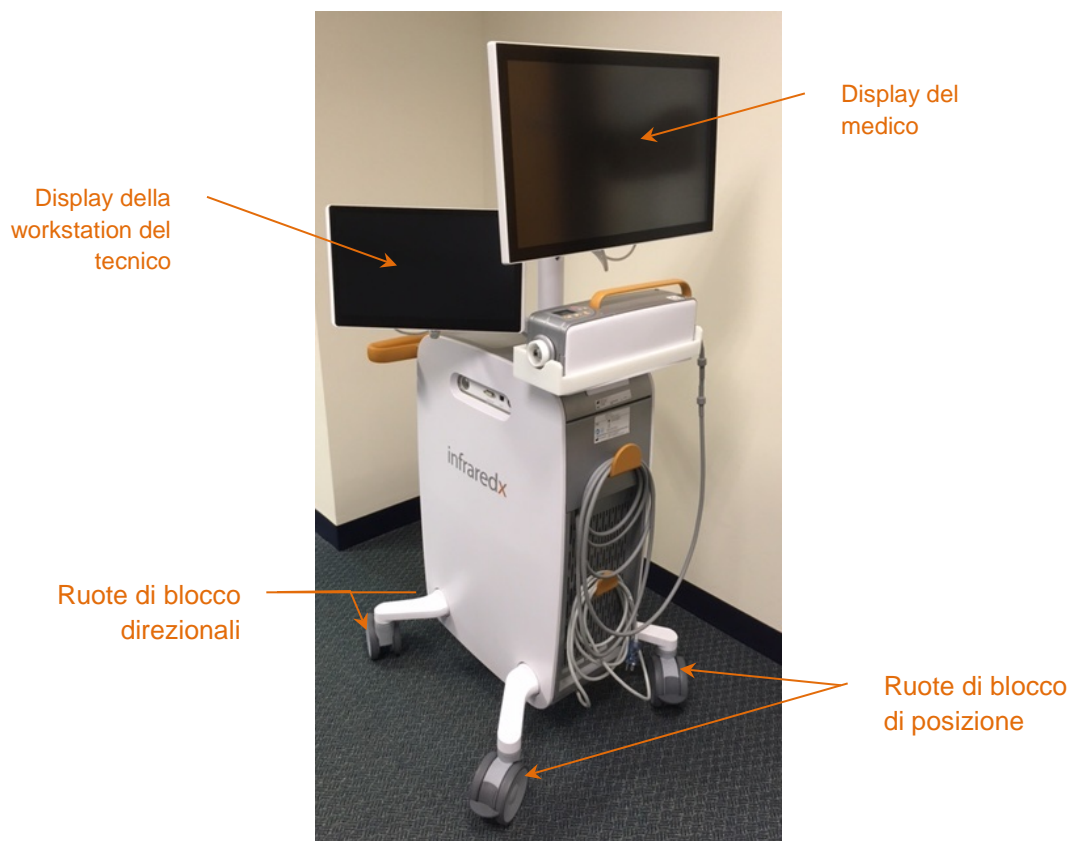


Figura 4-2. Makoto Intravascular Imaging System™ (TVC-MC10).

La console contiene due display. Un display, il display del medico, è orientato verso l'operatore sterile durante l'utilizzo. Il secondo display touchscreen, il display della workstation del tecnico, è orientato verso il tecnico o un operatore di circolazione non sterile durante l'utilizzo. Ciò consente all'operatore non sterile di annotare i dati, permettendo all'operatore sterile di avere una visuale libera del display.

Il display del medico è un monitor full HD di 21,5 pollici 1080 p (1920x1080 p). Il display può essere ruotato e inclinato per fornire al medico sterile un angolo di visualizzazione ottimale.

Il display della workstation del tecnico è un monitor touchscreen full HD di tipo capacitivo di 15,6 pollici 1080 p (1920x1080 p). Il display può essere ruotato, girato e inclinato per ottenere facilmente un angolo di lavoro ottimale.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni



Figura 4-3. Pannello sinistro dell'interfaccia del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ (TVC-MC10) contenente connettori USB 3.0 e unità di supporto ottico Blu-Ray.

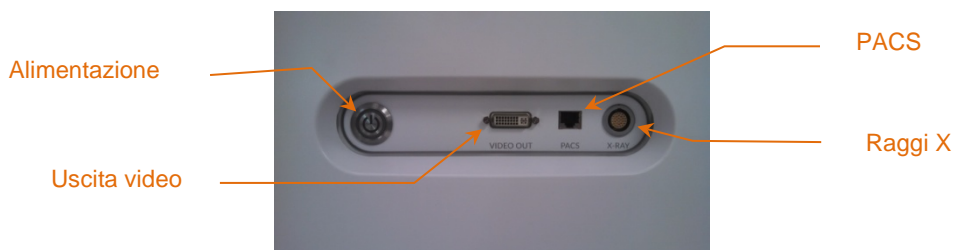


Figura 4-4. Pannello destro dell'interfaccia del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ (TVC-MC10) contenente il pulsante di alimentazione, uscita video, PACS e connettori di integrazione raggi X.

La console Makoto™ è configurata anche per esportare un segnale video a colori di 1920x1080 p (rapporto 16:9) utilizzando un cavo video schermato DVI-D. In via opzionale, la risoluzione del video esportato può essere configurata a 1600x1200 (rapporto 4:3).

Oltre al display della workstation del tecnico, gli utenti possono interfacciarsi con il sistema mediante l'utilizzo di un mouse fornito. Questo mouse è situato sotto il display della workstation del tecnico.

Il sistema è munito di due ruote di blocco direzionali per facilitare il trasporto e due ruote di blocco aggiuntive per fissare o bloccare il sistema.

4.2 Interfaccia grafica utente del sistema Makoto Intravascular Imaging System™

Le funzioni del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ sono controllate tramite le interfacce utente del software: modalità di acquisizione e di revisione.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni



Figura 4-5. Modalità di acquisizione.

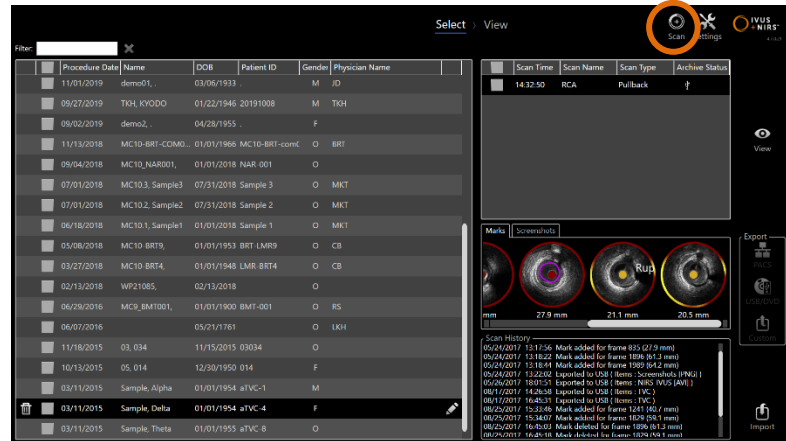


Figura 4-6. Modalità di revisione

4.2.1 Modalità di acquisizione

La modalità di acquisizione è il modo operativo in cui i nuovi dati possono essere registrati tramite il sistema Makoto Intravascular Imaging System™. Comprende quattro diverse fasi: “Setup” (Impostazione), “Prime” (Adesca), “Scan” (Scansione) e “Close” (Chiudi). Utilizzando la barra di avanzamento, l’operatore può spostarsi in maniera semplice e rapida tra le fasi per adattarsi al ritmo della procedura.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni


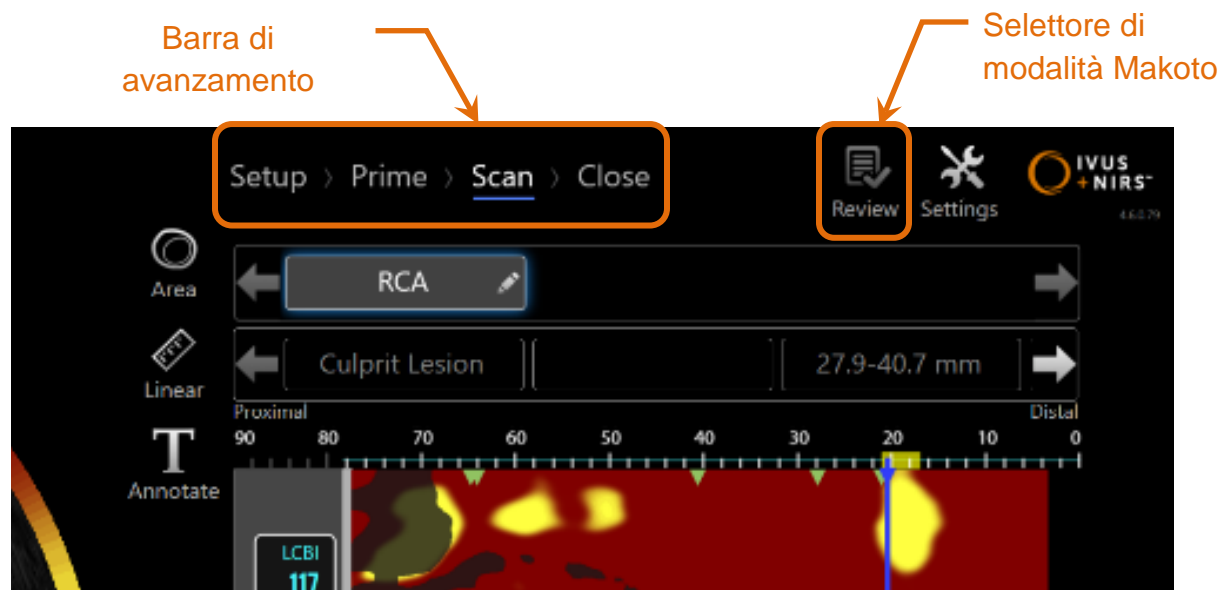


Figura 4-7. Modalità di acquisizione visualizzata con attenzione al comando della barra di avanzamento della procedura per cambiare le fasi e il selettore di modalità Makoto per cambiare le modalità di funzionamento. La fase di scansione della modalità di acquisizione è attiva e il selettore di modalità Makoto per accedere alla modalità di revisione è disabilitato nell'immagine.

La barra di avanzamento descrive i vari passaggi o le fasi di acquisizione dei dati e fornisce anche un comando per cambiare le fasi. Toccare i nomi della fase differente per passare alla fase desiderata.

NOTA: Le fasi nella modalità di acquisizione non sono in ordine. È possibile saltare qualsiasi fase e tornarvi in un secondo momento, se necessario.

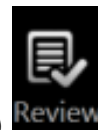

Toccare il selettore di modalità Makoto, quindi l'icona Review (Revisione) per accedere alla modalità di revisione dell'operazione. Questa operazione può essere eseguita quando non sono in corso procedure attive. Eventuali procedure attive devono essere chiuse prima di passare ad altre modalità.

4.2.1.1 Fase di impostazione

La fase di impostazione consente all'operatore di inserire informazioni relative al paziente e alla procedura per facilitare l'archiviazione e un successivo recupero dei dati per scopi di revisione.



ATTENZIONE

Prestare attenzione quando si inseriscono le informazioni relative al paziente in modo da garantirne la precisione.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

The screenshot shows the 'Setup' screen of the Makoto Intravascular Imaging System. The top navigation bar includes 'Setup', 'Prime', 'Scan', and 'Close'. On the right, there are icons for 'Review', 'Settings', and 'IVUS NIRS'. Below the navigation bar, there is a 'Filter' field and radio buttons for 'Local' and 'Worklist'. The main area is divided into two sections: 'Patient' and 'Procedure'. The 'Patient' section contains fields for Name (Last, First, MI), Patient ID, Date of Birth, and Gender (Male, Female, Other). The 'Procedure' section contains fields for Procedure ID, Accession ID, Physician Name, and Catheter Lot. At the bottom left are 'Clear' and 'Continue' buttons. On the right, there is a table with patient data.

Name	Date of Birth	Gender	Patient ID
Doe, Jane X	10/01/1951	F	8675309
Jones, Casey	11/04/1973	M	0987654321
Smith, Joe J	11/03/1961	M	1234567890

Figura 4-8. Fase di impostazione della modalità di acquisizione.

NOTA: I dati di scansione possono essere registrati prima del completamento della fase di impostazione.

Le informazioni relative a procedura e paziente possono essere configurate manualmente oppure mediante selezione dei dati già presenti nel sistema o dall'elenco di lavoro delle modalità. Utilizzando le funzioni di compilazione semi-automatica è possibile ridurre gli errori di trascrizione e migliorare la precisione dell'inserimento di informazioni.

NOTA: Utilizzando le funzioni di compilazione semi-automatica è possibile ridurre gli errori di trascrizione e migliorare la precisione dell'inserimento di informazioni.

NOTA: La fase di impostazione non è accessibile durante una scansione attiva.

Consultare la sezione 7 per informazioni più dettagliate sull'impostazione della procedura. Consultare la sezione 13.4 per informazioni più dettagliate sulla configurazione dei collegamenti della Modality Worklist [Elenco di lavoro Modalità].

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

4.2.1.2 Fase di priming



AVVERTENZA

Il catetere sterile deve essere adescato in conformità alle istruzioni per l'uso incluse nella confezione del catetere.



AVVERTENZA

L'utilizzo della guida supplementare del priming su schermo non sostituisce la formazione sul funzionamento del sistema Makoto Intravascular Imaging System™.

La fase di priming fornisce una guida all'operatore sul processo di priming di un catetere e la connessione del catetere al controller Makoto™.

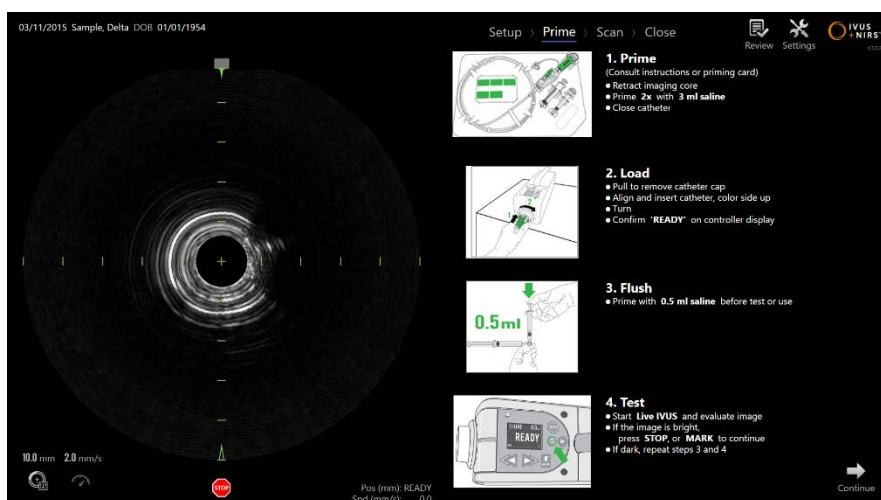



Figura 4-9. Fase di priming della modalità di acquisizione.

NOTA: Premere il pulsante **Mark** (Contrassegno) sul controller

Makoto™, , per passare alla fase successiva.

NOTA: La fase di priming non è accessibile durante una scansione attiva.

Per maggiori dettagli sul priming, consultare la sezione 8 per ulteriori informazioni sulla connessione del catetere e le istruzioni per l'uso contenute nella confezione del catetere.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

4.2.1.3 Fase di scansione

La fase di scansione della procedura consente all'operatore di registrare i dati di scansione IVUS e NIRS durante la procedura corrente. L'operatore è anche in grado di riprodurre, rivedere, eliminare, misurare, annotare e modificare la velocità di retrazione successiva durante la procedura corrente quando non è in corso un imaging attivo.

Questa fase include diverse visualizzazioni di dati di imaging complessi, tra cui Chemogram, Block Level Chemogram, alone del Chemogram, immagini dell'IVUS trasversali e longitudinali.

Le due serie di informazioni, NIRS e IVUS, registrate dal sistema Makoto Intravascular Imaging System™ sono co-registrate e possono essere revisionate utilizzando la riproduzione sincronizzata.

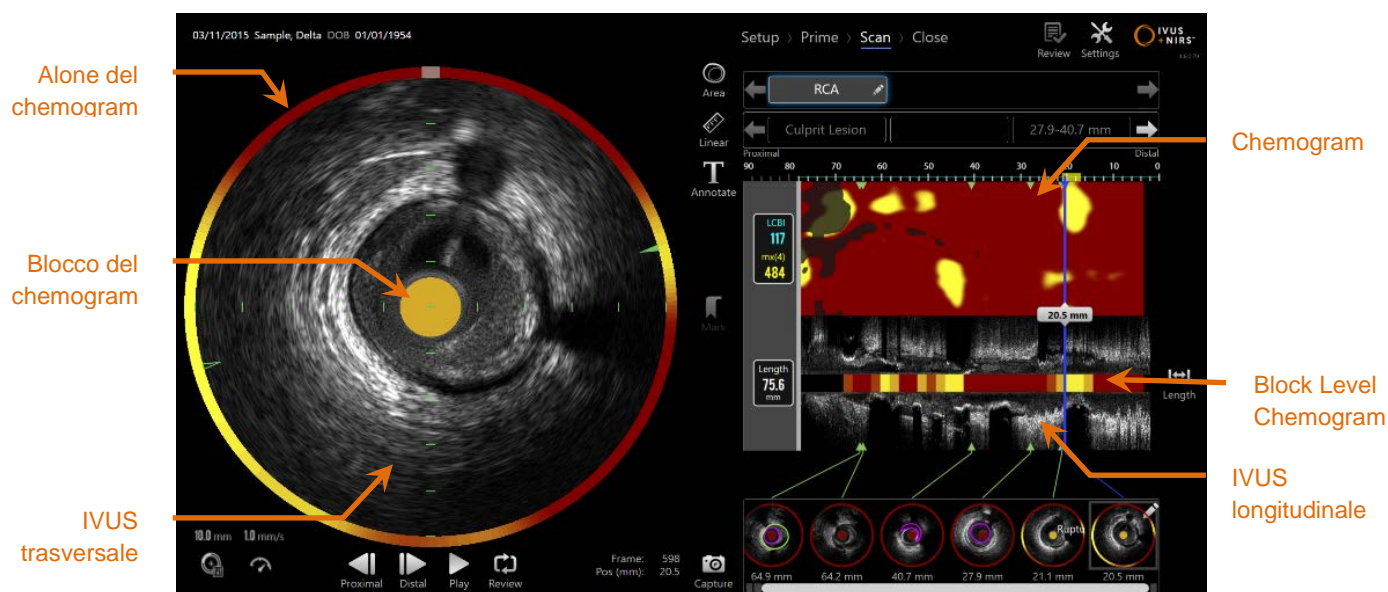


Figura 4-10. Fase di scansione della modalità di acquisizione con le principali visualizzazioni delle informazioni dell'immagine indicate.

La fase di scansione fornisce anche l'accesso alle funzioni di annotazione e misurazione accessibili durante una procedura attiva. Le scansioni possono essere rinominate, annotate e presentare singoli fotogrammi contrassegnati per un semplice recupero per scopi di revisione. Inoltre, è possibile eseguire misurazioni dei fotogrammi.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

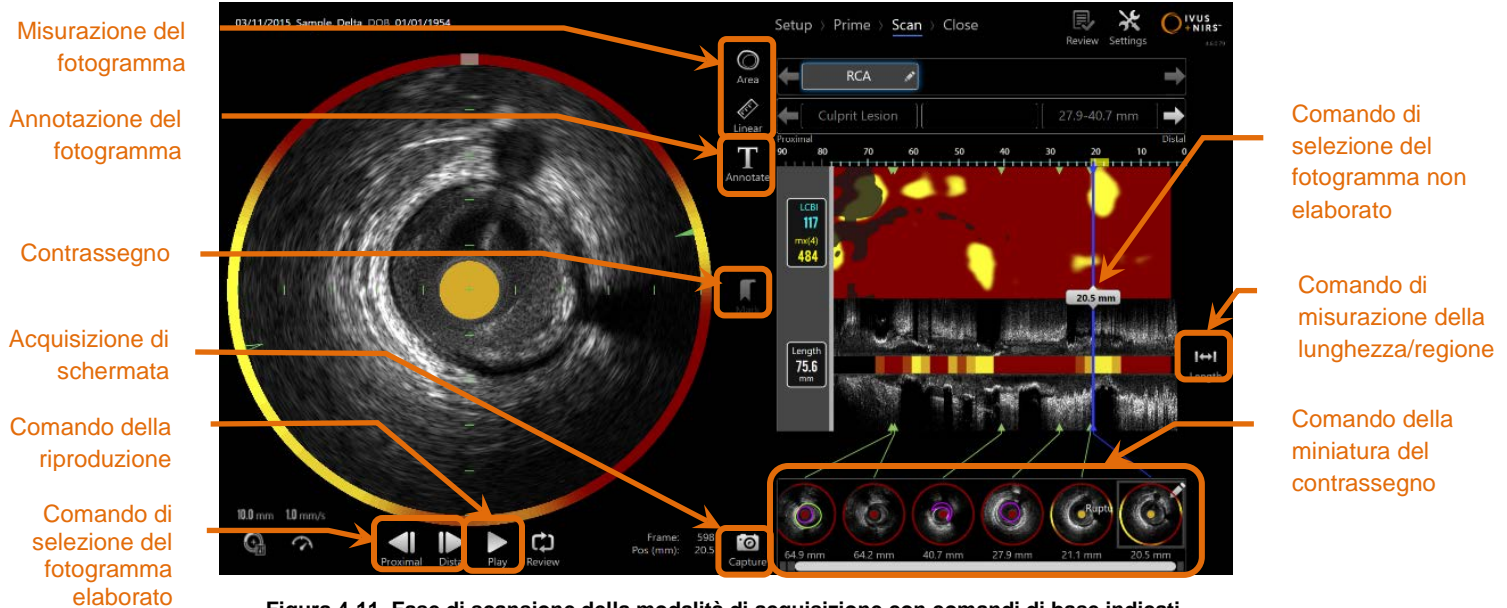


Figura 4-11. Fase di scansione della modalità di acquisizione con comandi di base indicati.

Consultare la sezione 9 e 10 per informazioni più dettagliate relative ad acquisizione, navigazione e misurazione di scansioni.

4.2.1.4 Fase di chiusura

La fase di chiusura della procedura consente all'operatore di revisionare un riepilogo dei dati ottenuti durante una procedura prima di archivarli sul sistema.

È importante completare la fase di chiusura per ogni procedura prima di spegnere il sistema.

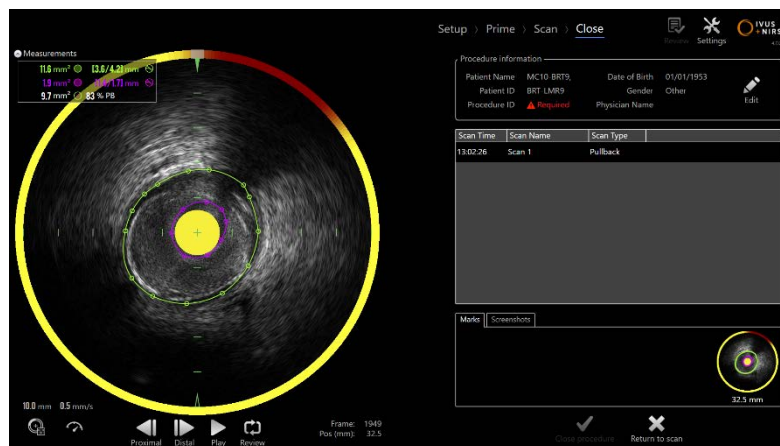


Figura 4-12. Fase di chiusura della modalità di acquisizione.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

- NOTA:** L'avvio di una nuova acquisizione dal controller Makoto™ porterà automaticamente la modalità di acquisizione alla fase di scansione.
- NOTA:** Per completare la fase di chiusura è necessario aver inserito le informazioni obbligatorie sul paziente e sulla procedura nella schermata della fase di Setup (Impostazione).
- NOTA:** Le procedure non chiuse prima dell'arresto o spegnimento del sistema possono essere accessibili in Modalità Revisione. La procedura può essere riavviata e successivamente chiusa e archiviata.

Consultare la sezione 11 per informazioni più dettagliate sulla chiusura della procedura.

4.2.2 Modalità di revisione

La modalità di revisione comprende due fasi. Si tratta delle fasi Select (Seleziona) e View (Visualizza). Queste fasi consentono all'utente di selezionare una procedura, quindi di visualizzarla o esportarla per una visualizzazione successiva.

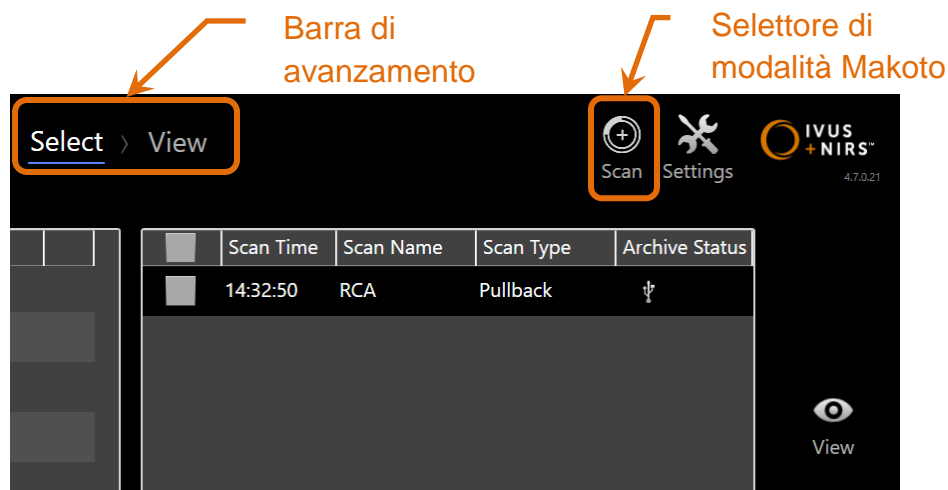



Figura 4-13. Modalità di revisione con la barra di avanzamento e i comandi del selettore di modalità Makoto evidenziati.

Toccare il selettore di modalità Makoto, quindi l'icona Scan (Scansione)  per accedere alla modalità di acquisizione dell'operazione. Questa operazione può essere eseguita in qualsiasi momento durante la fase di selezione della modalità di revisione.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

4.2.2.1 Fase di selezione

La fase di selezione consente all'operatore di cercare e scegliere procedure salvate in precedenza per la visualizzazione, la modifica, l'eliminazione, la stampa o l'archiviazione su altri supporti.

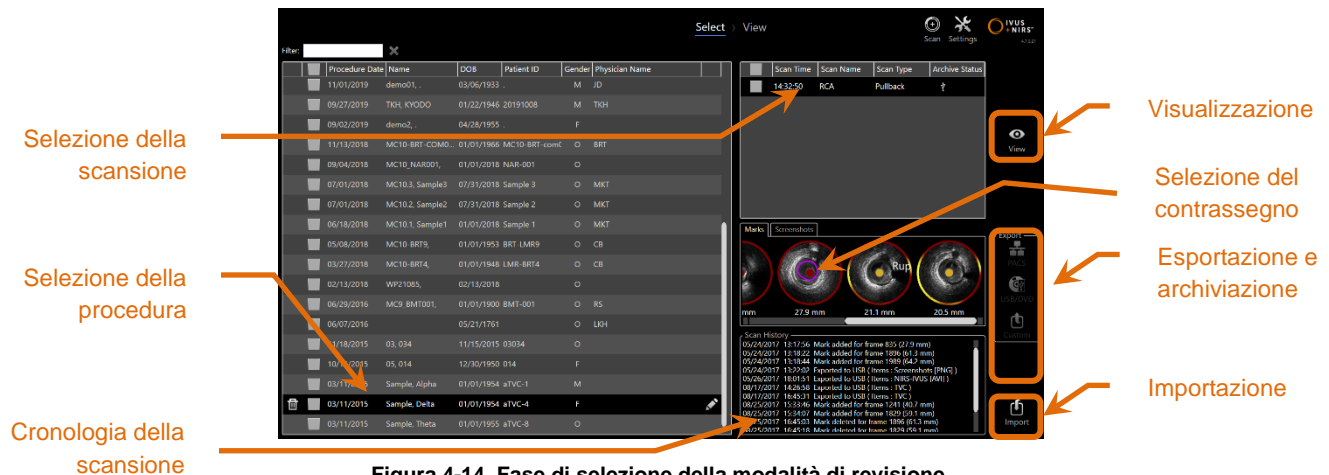


Figura 4-14. Fase di selezione della modalità di revisione.

Durante questa fase, i dati formattati adeguatamente possono essere selezionati da altri supporti per essere importati nel sistema Makoto Intravascular Imaging System™.

Consultare la sezione 12 per informazioni più dettagliate sulle funzioni di selezione, esportazione e importazione.

4.2.2.2 Fase di visualizzazione

La fase di visualizzazione offre molti degli stessi comandi rilevati durante la fase di scansione della modalità di acquisizione. Qui i dati possono essere revisionati, analizzati, annotati ed eliminati utilizzando comandi già descritti nella sezione 10.


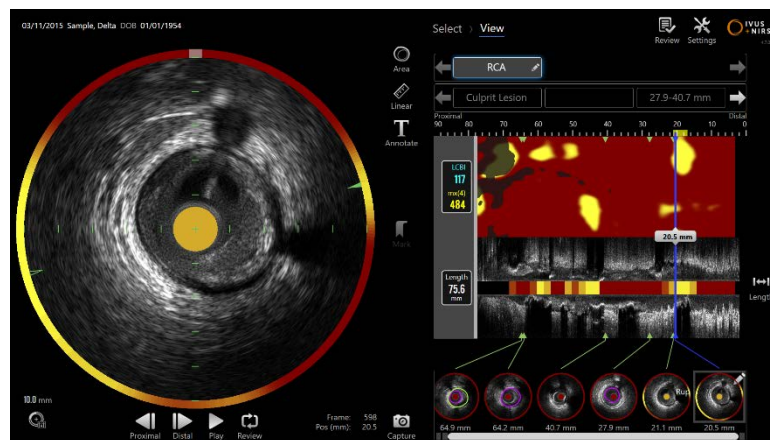


Figura 4-15. Fase di visualizzazione della modalità di revisione.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

NOTA: È possibile visualizzare i dati di una procedura per volta.

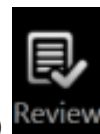

Toccare il selettore di modalità Makoto, quindi l'icona Review (Revisione) per tornare alla fase di selezione della modalità di revisione.

4.3 Controller Makoto™

Il controller Makoto™ (vedere di seguito) è l'interfaccia tra il catetere e la console Makoto™. La maniglia del catetere è inserita in una presa sulla parte anteriore del controller, che viene poi acceso per completare le connessioni elettriche, ottiche e fisiche. Queste connessioni consentono all'unità di azionare il centro dell'imaging interno e simultaneamente di stabilizzare la guaina esterna del catetere. La modalità di retrazione del controller Makoto™ permette una rotazione automatica a circa 1800 rpm e un movimento longitudinale da distale a prossimale a una velocità di 0,5, 1,0 e 2,0 mm/s. La parte centrale dell'imaging del catetere può eseguire una retrazione automatica continua in direzione da distale a prossimale su una lunghezza totale di circa 150 mm.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

4.3.1 Indicatori

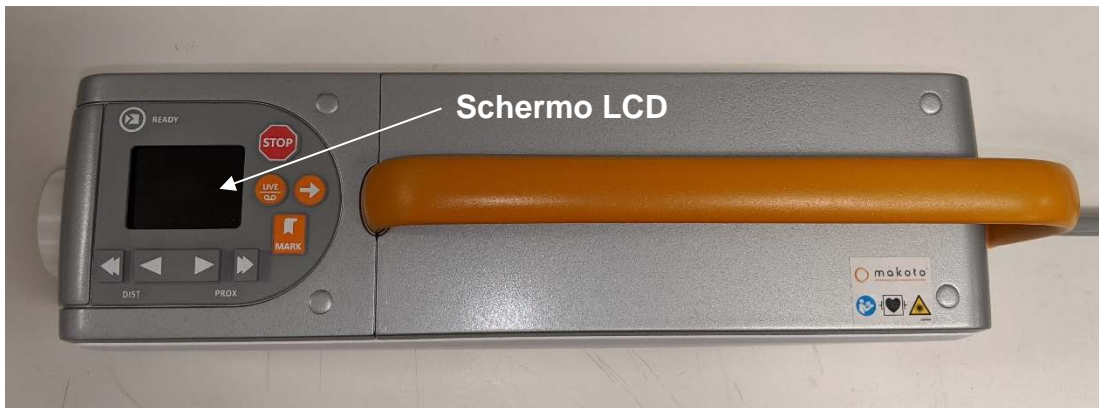


Figura 4-16. Controller Makoto™.

Il controller Makoto™ è munito di schermo LCD che mostra all'utente messaggi di stato e grafici.



Figura 4-17. Indicatori dello schermo LCD del controller Makoto™ nell'acquisizione Live IVUS in posizione READY (Pronto) (parte superiore) e durante l'acquisizione della retrazione automatica (parte inferiore).

Il controller identifica per l'utente due importanti posizioni per l'operazione: READY (Pronto) e 0.0mm (0,0 mm).

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

READY Questa posizione è la più distale che la presa del catetere del controller Makoto™ possa raggiungere. Indica la posizione in cui il controller è pronto per l'utente che può CARICARE (connettere) o scaricare (disconnettere) adeguatamente un catetere o avviare un imaging. Inoltre, si tratta anche della posizione in cui la finestra di trasmissione del catetere collegato è più resistente alla piegatura dovuta alla pressione ed è pronto per essere monitorato su un filo guida.

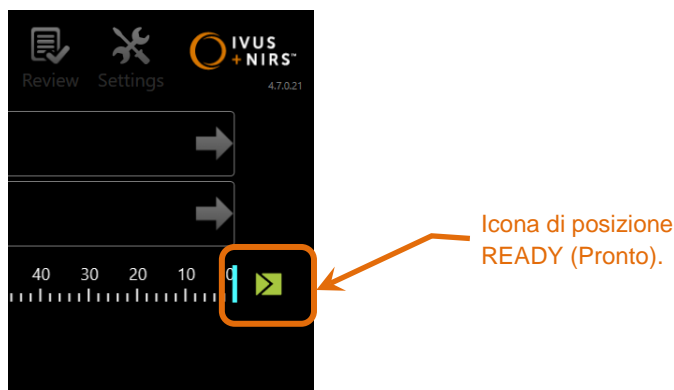


Figura 4-18. Quando il controller Makoto™ è in posizione READY (Pronto), l'icona READY viene visualizzata a destra del display della console Makoto™.

“0.0mm” Questa è la posizione iniziale dell'imaging ininterrotto continuo durante una scansione di retrazione o Live IVUS traslata. La posizione “0.0mm” è circa 5 mm prossimale alla posizione READY. Le immagini dell'IVUS trasversale non sono disponibili per la visualizzazione o la registrazione nelle posizioni tra READY e 0.0mm.

Come indicato nella Figura 4-17, lo schermo LCD del controller Makoto™ viene utilizzato per comunicare importanti informazioni sullo stato da sensori, modalità operative e stati:

Catheter Type (Tipo di catetere)	Questo simbolo viene visualizzato per indicare che un catetere IVUS+NIRS è stato collegato al controller.
Acquisition Mode (Modalità di acquisizione)	Questo indicatore viene visualizzato come testo “LIVE”, “AUTO” o vuoto/nessuno a indicare la modalità di acquisizione dell'immagine corrente del sistema.
Motion Rate (Frequenza del movimento)	Questo indicatore comunica la velocità corrente della traslazione durante l'acquisizione di un'immagine. Quando non sono in corso acquisizioni di immagini, la frequenza di movimento indicherà l'impostazione del comando Next

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Pullback Rate (Frequenza di retrazione successiva) (vedere la sezione 9.2.1)

READY	Quando il display mostra “READY”, significa che è in posizione pronta o nella posizione più distale possibile che possa essere raggiunta dall’utente durante l’utilizzo del controller Makoto™.
Relative Scale (Scala relativa)	L’intervallo di acquisizione di immagini continua, 0,0 – 150,0 mm, è indicato sul controller con delimitazione a 50,0 mm e 100,0 mm.
Relative Position (Posizione relativa)	Quando il controller Makoto™ viene spostato prossimalmente dalla posizione READY, la posizione corrente della punta di imaging viene rappresentata da una linea verticale all’interno della scala relativa.

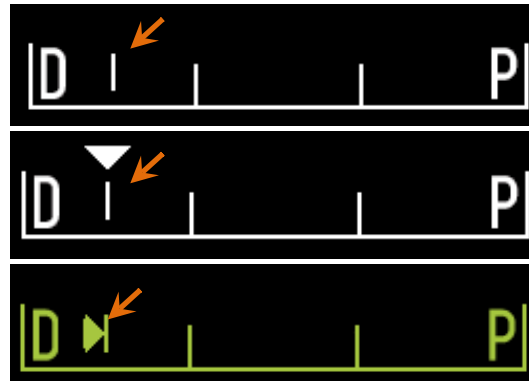


Figura 4-19. Indicatore della posizione relativa in assenza di imaging (parte superiore), Live IVUS (parte centrale) e retrazione (parte inferiore).

Posizione/ Distanza	Nel corso della scansione Live IVUS o del Pullback imaging (Retrazione) la distanza visualizzata, espressa in millimetri, viene misurata dall’inizio della procedura di imaging oppure dalla posizione del contrassegno più recente. In assenza di imaging, viene visualizzata la posizione attuale della punta di imaging.
Recording (Registrazione)	L’indicatore di registrazione viene visualizzato quando il sistema sta registrando le immagini visualizzate dall’operatore.
Recorded Range (Intervallo registrato)	L’Intervallo di registrazione dell’attuale Live IVUS o acquisizione della Retrazione Automatica è rappresentato da un rettangolo colorato. Le Acquisizioni di Live IVUS tradotte appariranno in bianco e le acquisizioni di

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

Retrazione Automatica appariranno in verde, la terza porzione indica l'intervallo registrato sin dall'ultimo contrassegno.

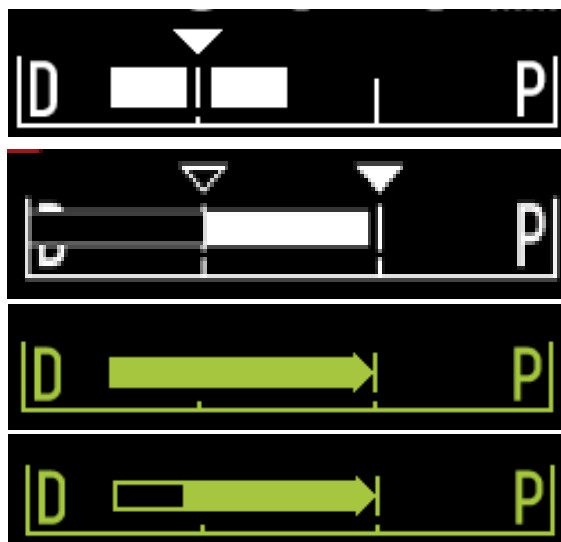


Figura 4-20. Recorded Range (intervallo registrato) dell'acquisizione in corso: Live IVUS, in cui la posizione attuale coincide con la posizione iniziale (in alto), Registrazione Live IVUS, in cui la posizione attuale è prossimale all'ultimo Mark (contrassegno) creato (al centro in alto), Retrazione automatica senza contrassegni (al centro in basso), Retrazione Automatica, in cui la barra colorata indica l'intervallo registrato a partire dall'ultimo Mark (contrassegno) creato (in basso).

LOAD (Carica) Questo messaggio indica che il controller Makoto™ è in posizione READY ed è possibile caricare un catetere nella presa.

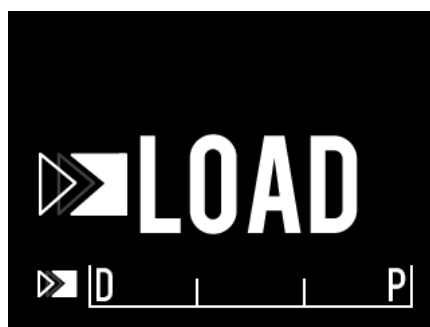


Figura 4-21. Schermo LCD del controller Makoto™ indicante lo stato LOAD.

TURN (Ruota) Questo messaggio indica che il controller Makoto™ ha rilevato una connessione incompleta della maniglia del catetere.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni



Figura 4-22. Schermo LCD del controller Makoto™ indicante l'istruzione di ruotare la maniglia del catetere.

WAIT (Attendi) Il controller Makoto™ è in attesa dell'inizializzazione della console Makoto™ e dell'interfaccia utente del software.



Figura 4-23. Schermo LCD del controller Makoto™ indicante lo stato di attesa del completamento dell'avvio del sistema.



AVVERTENZA

La mancata osservanza degli avvisi visualizzati potrebbe causare situazioni pericolose, con conseguenti lesioni al paziente o all'operatore.

SEE DISPLAY (Visualizza display) Il controller Makoto™ ha rilevato una condizione di errore o di guasto interno. Quando compare questo messaggio l'operatore deve consultare lo schermo del Makoto Intravascular Imaging System™ per visualizzare istruzioni più dettagliate.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni



Figura 4-24 Messaggio d'errore (a sinistra) e messaggio di guasto interno (a destra) del Controllore Makoto (tm). In entrambi i casi l'utente dovrebbe consultare il monitor del sistema per istruzioni sul guasto o errore e per le azioni successive.

NOTA: Se il messaggio “See Display” (Visualizza display) viene visualizzato ripetutamente, dopo aver seguito le indicazioni su schermo, contattare il fornitore di servizi locale o il servizio clienti Infraredx per assistenza.

4.3.2 Comandi dell'acquisizione



AVVERTENZA


La mancata osservanza degli avvisi visualizzati può causare una situazione pericolosa che può comportare lesioni per il paziente o per l'operatore e può danneggiare il catetere collegato.



AVVERTENZA

Incurvature, piegature eccessive o qualsiasi altro difetto del catetere possono richiedere al Controller una forza eccessiva per spostare la parte centrale del catetere. Se viene richiesta una forza eccessiva, il Controller arresterà il movimento di traslazione in direzione distale.

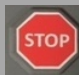

Premere il pulsante STOP, , del Controller Makoto™ e seguire le indicazioni sullo schermo per risolvere il problema.

NON usare le funzioni di traslazione a singoli passi in presenza di incurvature o piegature. Ciò può danneggiare la guaina del catetere o provocare lesioni al paziente.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni



AVVERTENZA

Se in qualunque momento il pulsante **STOP** (Arresta), del Controller Makoto™ non arresta il movimento del catetere, scollegare immediatamente il sistema Makoto Intravascular Imaging System™.

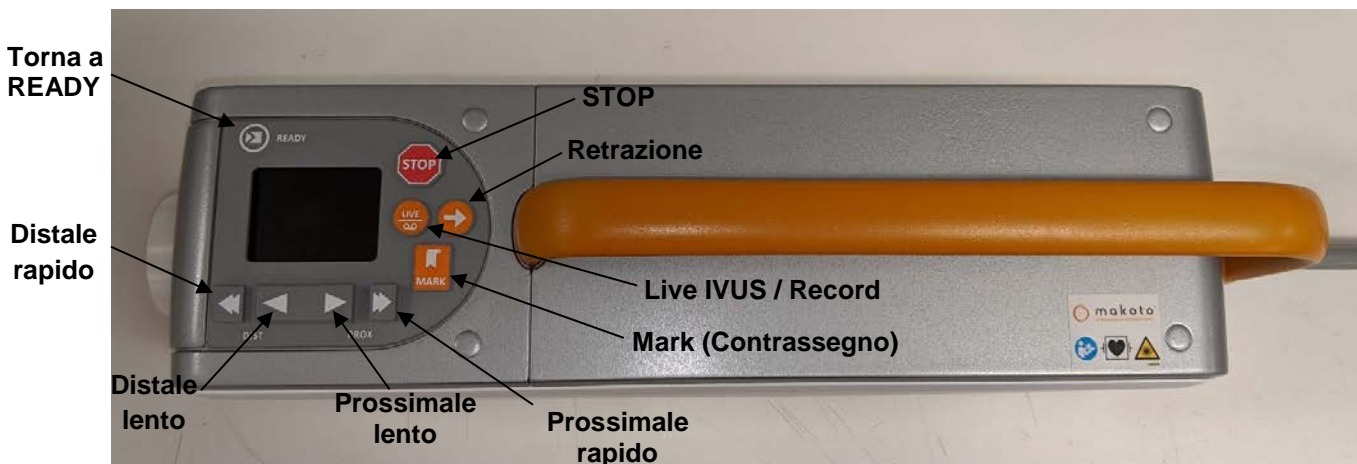
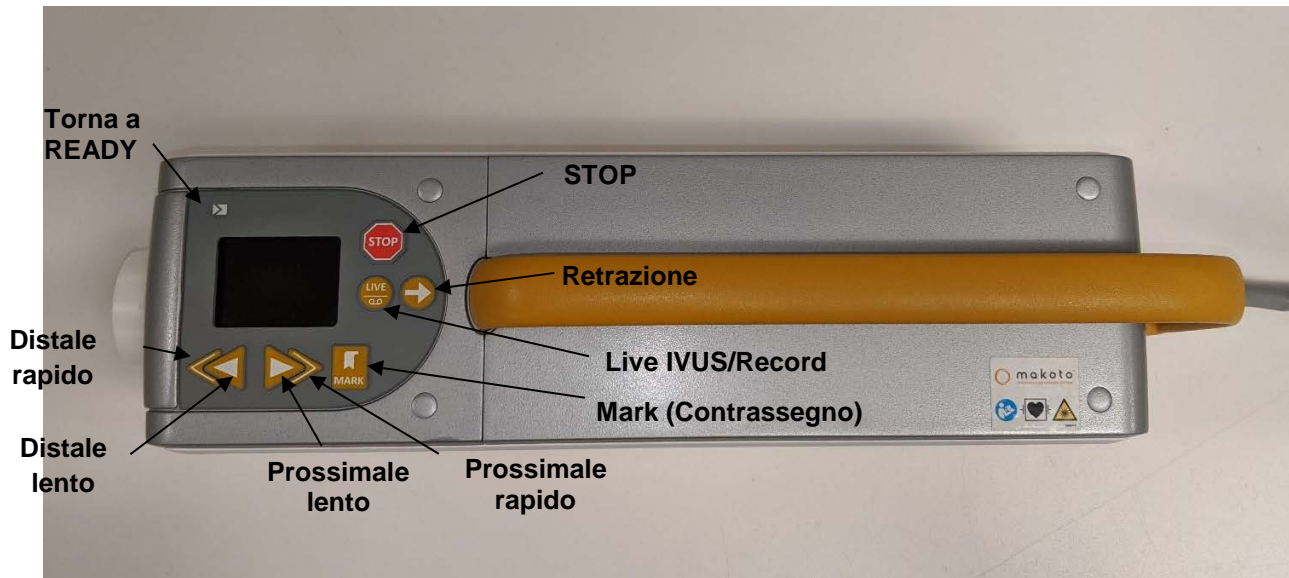


Figura 4-25 Controller Makoto™ con pulsanti funzione, due modelli disponibili (alto, basso).

Il controller Makoto™ è dotato di pulsanti semplici che consentono all'utente di controllare il movimento del sistema e l'acquisizione dei dati.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Torna a READY

Questo pulsante sposta automaticamente la parte centrale dell'imaging del catetere dalla posizione attuale alla posizione più distale o READY (Pronto). È necessario portare la parte centrale del catetere in questa posizione prima di avviare il movimento del catetere all'interno del paziente o provvedere al collegamento/scollegamento.

STOP (Arresta)

Questo pulsante arresta il movimento del controller Makoto™ e interrompe eventuali raccolte di dati in corso.


Retrazione

Questo pulsante avvia la rotazione e retrazione automatica di un catetere collegato. La velocità di rotazione è fissata a circa 1800 rpm, ma la velocità di retrazione corrisponderà a quella selezionata sulla console Makoto™ (0,5, 1,0 o 2,0 mm/s).

Da READY: una pressione e il successivo rilascio del pulsante di retrazione consentono di spostare la parte centrale dell'imaging alla posizione "0,0 mm" e avviare un'acquisizione Live IVUS per fornire un'anteprima della posizione di imaging di avvio della scansione. Premere nuovamente il pulsante di retrazione per avviare la scansione. Tenendo premuto il pulsante di retrazione in posizione READY si salta l'anteprima e si avviano lo spostamento e la registrazione automatici. Il pulsante può essere rilasciato quando il display indica l'avvio dell'imaging "AUTO".

Dalla posizione $\geq 0,0$ mm: la pressione e il successivo rilascio del pulsante di retrazione avvia lo spostamento e la registrazione immediati della scansione.




Il pulsante di **retrazione**, , può essere premuto mentre il controller Makoto™ è fermo o in rotazione, durante un'acquisizione Live IVUS.

Live IVUS/Record

La prima pressione di questo pulsante avvia la rotazione automatica della parte centrale del catetere (senza retrazione). Sul display della console Makoto™ viene visualizzata un'immagine del Live IVUS trasversale.

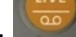

Premendo un'altra volta il pulsante **Live IVUS**, , si potrà attivare e disattivare la registrazione dell'acquisizione Live IVUS in corso. Questa azione non arresta la rotazione della parte centrale dell'imaging del catetere.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Mark (Contrassegno)

Questo pulsante contrassegna un fotogramma o una posizione nell'ambito di una scansione per riferimento o revisione futura.

Durante l'acquisizione delle immagini, questo pulsante azzerà lo schermo del controller. La distanza visualizzata dal controller viene misurata a partire dalla posizione dell'ultimo Mark (contrassegno) creato.

Durante un'acquisizione Live IVUS non registrata, questo pulsante registrerà un fotogramma IVUS singolo.

Durante la fase di priming dell'acquisizione, questo pulsante farà avanzare il sistema alla fase di scansione.

Distale rapido

Tenendo premuto questo pulsante si sposta distalmente la parte centrale dell'imaging del catetere a una velocità di 10 mm/s.

Premendo e rilasciando questo pulsante si sposta la parte centrale dell'imaging del catetere in direzione distale di un incremento fisso di 0,5 mm.

Distale lento

Tenendo premuto questo pulsante si sposta distalmente la parte centrale dell'imaging del catetere a una velocità di 2 mm/s.

Premendo e rilasciando questo pulsante si sposta la parte centrale dell'imaging del catetere in direzione distale di un incremento fisso di 0,1 mm.

Prossimale lento

Tenendo premuto questo pulsante si sposta prossimalmente la parte centrale dell'imaging del catetere a una velocità di 2 mm/s.

Premendo e rilasciando questo pulsante si sposta la parte centrale dell'imaging del catetere in direzione prossimale di un incremento fisso di 0,1 mm.

Prossimale rapido

Tenendo premuto questo pulsante si sposta prossimalmente la parte centrale dell'imaging del catetere a una velocità di 10 mm/s.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Premendo e rilasciando questo pulsante si sposta la parte centrale dell'imaging del catetere in direzione prossimale di un incremento fisso di 0,5 mm.

4.4 Cateteri per imaging compatibili

I cateteri per imaging compatibili sono confezionati separatamente e sterilizzati per un unico utilizzo. Consultare le Istruzioni per l'uso allegate al catetere per maggiori informazioni sul catetere e su preparazione e utilizzo corretti.

4.5 Spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS)

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ serve a identificare il core lipidico contenente placche di interesse, attraverso il sangue, nelle arterie coronarie di un cuore che pulsa tramite un catetere coronarico di scansione. Il sistema impiega la spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS) per identificare la composizione chimica della parete dell'arteria, come ausilio al cardiologo che interviene nella valutazione delle placche coronariche. Le fondamenta di questa capacità di imaging si basano sul principio della spettroscopia a riflettanza diffusa, che è ben stabilito e utilizzato in molte discipline scientifiche.

In breve: la luce NIR incidente viene scomposta e assorbita dal tessuto, e la luce ricevuta contiene informazioni sulla composizione del tessuto in base alle sue proprietà di scomposizione e assorbimento. Queste proprietà di assorbimento e scomposizione sono regolate dalla composizione chimica e dalla morfologia del tessuto.

4.5.1 Chemogram

Dopo una retrazione della parte centrale dell'imaging del catetere attraverso l'arteria, il software del sistema visualizza una rappresentazione grafica, nella forma di una mappa, indicante la probabilità che sia presente un core lipidico contenente una placca (LCP). Tale mappa è denominata "Chemogram" e fornisce un'immagine dell'arteria che indica la probabilità di trovare una placca di interesse del core lipidico in una particolare posizione durante la scansione. Una probabilità elevata è visualizzata in giallo, mentre una probabilità ridotta passa gradualmente verso il rosso.

4.5.2 Lettura della visualizzazione del chemogram

Durante l'acquisizione dei dati in tempo reale, la Guidewire Detection Map (Mappa di rilevamento del filo guida) identifica la posizione dell'artefatto che un filo guida acquisito produce e assiste il medico nell'identificazione di artefatti dell'immagine nei dati della

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

spettroscopia. Al completamento di una scansione di retrazione, il monitor del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ visualizza due mappe in colori falsati della parete arteriosa. Queste mappe sono il Chemogram e il Block Level Chemogram. Il Chemogram e il Block Level Chemogram indicano le aree nell'arteria coronaria che probabilmente contengono il core lipidico, a sua volta contenente placche di interesse.

Le visualizzazioni longitudinali del display rappresentano la scansione da destra a sinistra (da distale a prossimale). L'asse x indica la distanza di retrazione in millimetri dall'estremità distale della finestra di trasmissione del catetere. L'asse y nel Chemogram e nella Guidewire Detection Map (Mappa di rilevamento del filo guida) corrisponde alla posizione angolare relativa delle funzioni della parete del vaso in gradi (la posizione angolare di partenza in relazione alla parete è arbitraria). La porzione di scansione all'interno del catetere guida può essere indicata in grigio omogeneo sulle estremità prossimali del Chemogram e del Block Level Chemogram, se il sistema rileva che la scansione è stata inserita nel catetere guida.

Il chemogram è colorato in una scala dal rosso al giallo, probabilità di lipidi da bassa ad alta. Il colore giallo è visualizzato dall'utente quando la probabilità dei lipidi supera 0,6 in qualsiasi punto nella visualizzazione. Una maschera nera semitrasparente compare sul chemogram nelle aree in cui l'algoritmo di rilevamento LCP ha determinato che è presente un segnale basso o vi sono altre interferenze.

Il monitor di sistema visualizza l'indice del carico di core lipidico (LCBI) a sinistra del chemogram. L'LCBI è un rapporto dei punteggi di probabilità lipidica positiva ($>0,6$) con i punteggi di probabilità lipidica valida totale nell'intervallo selezionato del chemogram, su una scala da 0 a 1000 (carico di core lipidico da basso ad alto), in un segmento definito. Negli studi (consultare la sezione 17.2 Appendice B) con campioni autoptici sottoposti a esame istologico è stata evidenziata la correlazione tra l'LCBI e la presenza e il volume di fibroateroma nell'arteria.

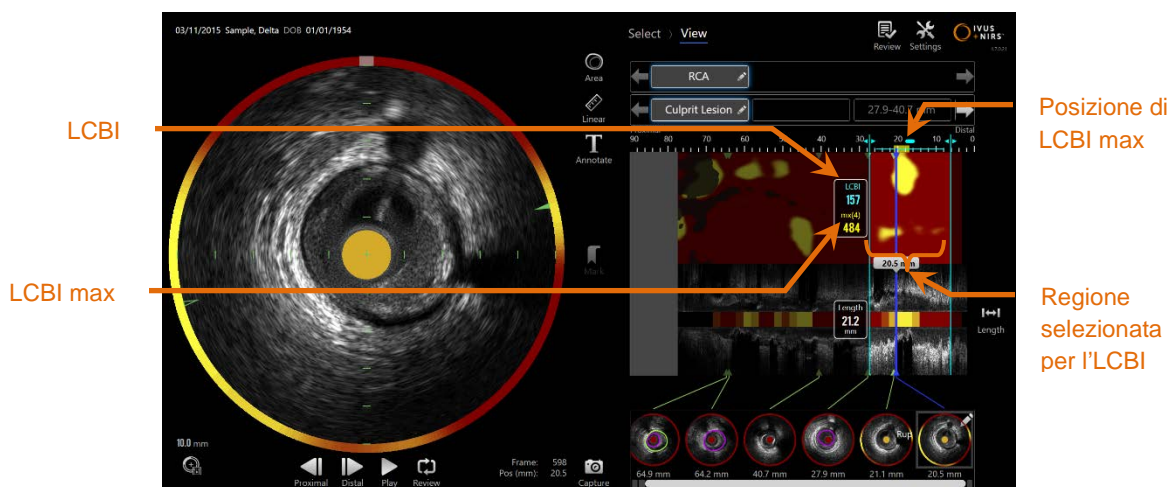


Figura 4-26. L'LCBI regionale e massimo per la regione selezionata sono visualizzati a sinistra del chemogram.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Il software visualizzerà l'LCBI massimo di una finestra di lunghezza fissa (valore predefinito di 4 mm) in un segmento e visualizza la posizione nella regione.

LCBI	Indice del carico di core lipidico calcolato per ciascuna retrazione e all'interno di regioni di interesse definite da un utente.
Max LCBI	Indice del carico di core lipidico calcolato su una larghezza specificata nell'ambito di un'intera retrazione o regione scansionata specificata dall'utente. Sarà presentato all'utente il valore massimo trovato.

Il Block Level Chemogram, che integra il Chemogram, è visualizzato al centro della visualizzazione dell'IVUS longitudinale ed è senza dimensione nella direzione y. Il blocco del chemogram associato al fotogramma attualmente mostrato viene visualizzato al centro della visualizzazione dell'IVUS trasversale. Il Block Level Chemogram è diviso in blocchi larghi 2 mm e riassume tutti i punteggi di previsione validi nell'ambito del segmento corrispondente del chemogram. Il Block Level Chemogram è rappresentato in 4 colori dalla probabilità più alta alla più bassa: giallo, marrone chiaro, arancione e rosso. Se il numero di pixel all'interno del blocco sul chemogram è influenzato dall'interferenza o il segnale basso supera il 25%, il colore del blocco è nero.

NOTA: Se la percentuale di spettri troppo deboli per contribuire alla generazione del chemogram supera il 12%, non verrà generato alcun chemogram.

4.6 Ultrasuoni intravascolari

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ serve a identificare il lumen e la parete del vaso, attraverso il sangue, nelle arterie coronarie di un cuore che pulsa tramite un catetere coronarico di scansione. Il sistema utilizza gli ultrasuoni per valutare i confini del lumen e della parete del vaso dell'arteria e aiuta il cardiologo che interviene nella valutazione delle placche aterosclerotiche. Gli ultrasuoni sono in grado di identificare altre caratteristiche dell'arteria quali stent impiantati e di placche aterosclerotiche quali calcificazione.

Queste informazioni sono valutate inviando degli impulsi sonori alla parete del vaso dalla punta di imaging del catetere e ricevendo l'eco. Le caratteristiche morfologiche dell'arteria assorbono e riflettono il suono in maniera diversa. Tali segnali sono quindi presentati sulla schermata per essere interpretati.

Utilizzando immagini angiografiche è possibile valutare l'avanzamento della lesione mediante confronto dei due diametri interni all'area di interesse. Generalmente, questi

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

diametri sono selezionati da una posizione di riferimento e la posizione con il diametro del lumen minimo all'interno dell'area target. La riduzione di questo diametro è definita come stenosi del diametro. L'utilizzo dell'angiogramma per valutare i diametri in una proiezione singola può creare problemi durante la valutazione delle lesioni o delle posizioni target con lumen eccentrici. L'IVUS permette una migliore valutazione del lumen, inclusi quelli eccentrici.

Il confronto dell'area del lumen può fornire anche un ulteriore metodo di valutazione dell'avanzamento di una lesione. Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ confronterà le due aree in diverse posizioni per fornire la stenosi dell'area (AS) di un lumen.

$$\%AS = \frac{(Area_{max} - Area_{min})}{Area_{max}}$$

5 Memorizzazione, spostamento e posizionamento del sistema Makoto Intravascular Imaging System™

5.1 Spostamento del sistema Makoto Intravascular Imaging System™

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è munito di due ruote di blocco nel retro del sistema e due ruote di blocco direzionali sulla parte anteriore del sistema.

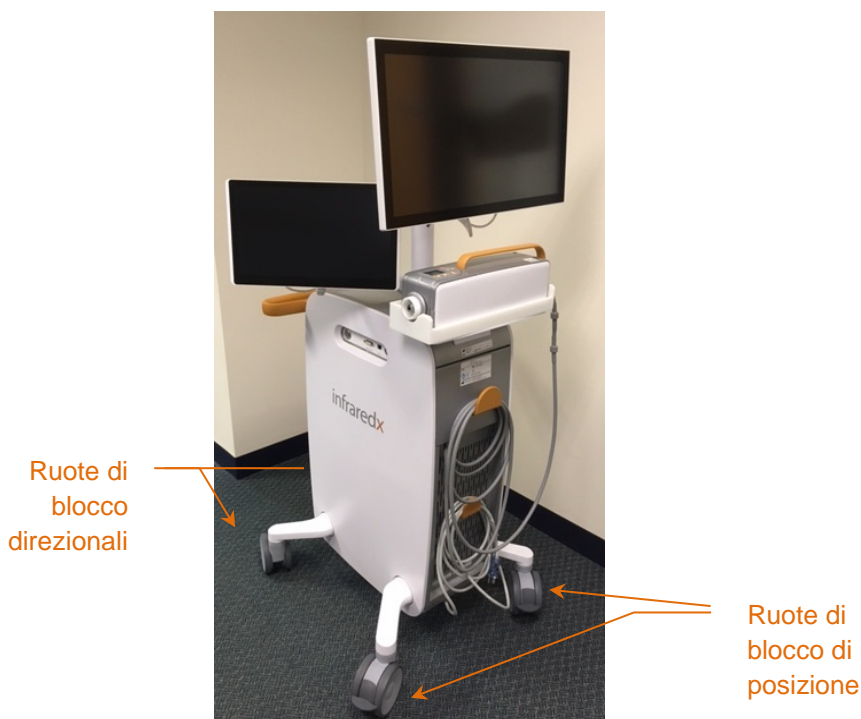


Figura 5-1. Sistema Makoto Intravascular Imaging System™.

Sbloccare tutte le ruote portando le relative leve verso l'alto per spostare, ruotare o manovrare il sistema in spazi ristretti.

NOTA:

Bloccare le ruote direzionali sulla parte anteriore del sistema per facilitare il transito su distanze più lunghe.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

NOTA: Durante il transito, posizionare i monitor in linea con il corpo del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ per incrementare la visibilità.

5.2 Posizionamento per l'uso



AVVERTENZA

L'operatore della console mobile del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ NON deve posizionarsi tra il sistema e un'altra attrezzatura mobile del laboratorio di cateterismo.



AVVERTENZA

NON posizionare il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ con ruote bloccate nel raggio di movimento dei pezzi del sistema radiografico o altre attrezzature del laboratorio di cateterismo durante l'utilizzo tipico.

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è posizionato per l'uso in prossimità dei piedi del tavolo di procedura o sul lato più lontano di quest'ultimo rispetto al medico, a destra del banco del monitor del sistema radiografico.

Quando si ottiene la posizione desiderata per il sistema, inserire i blocchi di posizione delle ruote del sistema.



ATTENZIONE

NON riposizionare il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ in un modo tale da impedire l'accesso alla spina.

NOTA: Regolare la posizione del display del medico sul sistema Makoto Intravascular Imaging System™ per ottimizzare la visibilità dell'immagine durante l'uso.

NOTA: Per evitare movimenti accidentali della console Makoto™, inserire i blocchi di posizione delle ruote situate sul retro della console.

5.3 Conservazione tra un utilizzo e l'altro



Queste istruzioni NON sono indicate in caso di conservazione prolungata del sistema Makoto Intravascular Imaging System™. Contattare il servizio clienti Infraredx o il fornitore di servizi locale per indicazioni sulla preparazione del sistema per una conservazione prolungata.

Quando non viene utilizzato, il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ deve essere configurato in modo da ridurre il rischio di danni al sistema.

1. Posizionare il controller Makoto™ in maniera sicura all'interno del supporto sul retro del sistema.
2. Avvolgere l'ombelicale del controller Makoto™ in maniera precisa e appenderlo al gancio superiore situato sul pannello posteriore del sistema.
3. Avvolgere il cavo di alimentazione in maniera precisa e appenderlo in cima al gancio inferiore situato sul retro del sistema.
4. Inserire i blocchi delle ruote sul retro del sistema.
5. Ruotare i monitor in modo che siano in linea con il corpo del sistema.

Oltre alle procedure appena elencate, selezionare una posizione di stoccaggio di accesso semplice situata in un'area a basso transito in cui il rischio di urto con altre attrezzature in movimento (lettini, barelle, ecc.) sia ridotto al minimo. La posizione deve soddisfare i requisiti ambientali e fisici indicati nella sezione 16 del presente manuale.

6 Accensione/Spegnimento

6.1 Accensione



AVVERTENZA

Verificare che i cavi che fuoriescono da o si collegano al sistema Makoto Intravascular Imaging System™ siano ben aderenti al pavimento.

1. Rimuovere il cavo di alimentazione dal retro del sistema. Tenendo la spina, far cadere il resto del cavo aderente al pavimento.
2. Collegare il sistema in una presa di corrente messa a terra facilmente accessibile.

Pulsante di
accensione



Figura 6-1. Pannello laterale del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ con pulsante di accensione evidenziato.

3. Accendere il sistema premendo e rilasciando il pulsante che si trova sul lato della console. In questo modo si accende sia la console del sistema Makoto™ sia il controller Makoto™.

Dopo l'accensione del sistema e il caricamento del software viene presentata la fase di impostazione della modalità di acquisizione Makoto.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni



Se la spina del cavo di alimentazione adatta alla regione di utilizzo non dispone di una messa a terra, collegare un cavo di terra al bullone di terra equipotenziale situato sul retro del sistema Makoto Intravascular Imaging System™, nella parte inferiore.

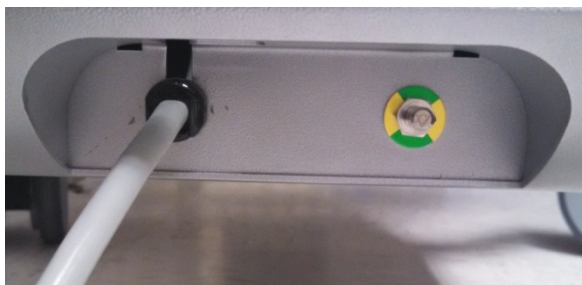


Figura 6-2. Il bullone di terra equipotenziale situato sul retro del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ nell'angolo inferiore destro.



Durante la sequenza di avvio del sistema, la presa di collegamento del catetere del controller Makoto™ ruoterà automaticamente. Se un catetere viene collegato durante l'avvio del sistema, assicurarsi che sia stato rimosso dal corpo del paziente.


NOTA:

Se il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è alimentato e non si trova in posizione READY (Pronto), quando richiesto dal sistema, utilizzare i comandi di movimento distale per fare avanzare distalmente la parte centrale dell'imaging finché non si raggiunge la posizione READY.

6.2 Spegnimento



AVVERTENZA

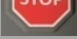Se in qualunque momento il pulsante **STOP** (Arresta), , del controller Makoto™ non arresta il movimento del catetere, scollegare immediatamente il sistema Makoto Intravascular Imaging System™.

Scollegare l'alimentazione al sistema Makoto Intravascular Imaging System™, premere e rilasciare il pulsante di accensione situato sul lato destro della console.



ATTENZIONE

Se in qualunque momento il sistema non si arrestasse con la momentanea pressione del pulsante di accensione e il suo rilascio, premere il pulsante di accensione e mantenerlo premuto (~5 secondi) fino allo spegnimento del sistema.

7 Impostazione delle informazioni relative al paziente e alla procedura

Nella modalità di acquisizione durante la fase di impostazione, l'utente può inserire informazioni relative al paziente e alla procedura per consentire l'archiviazione e facilitare un successivo recupero dei dati. Queste informazioni possono essere inserite all'inizio della procedura o in qualsiasi momento prima del termine della stessa.

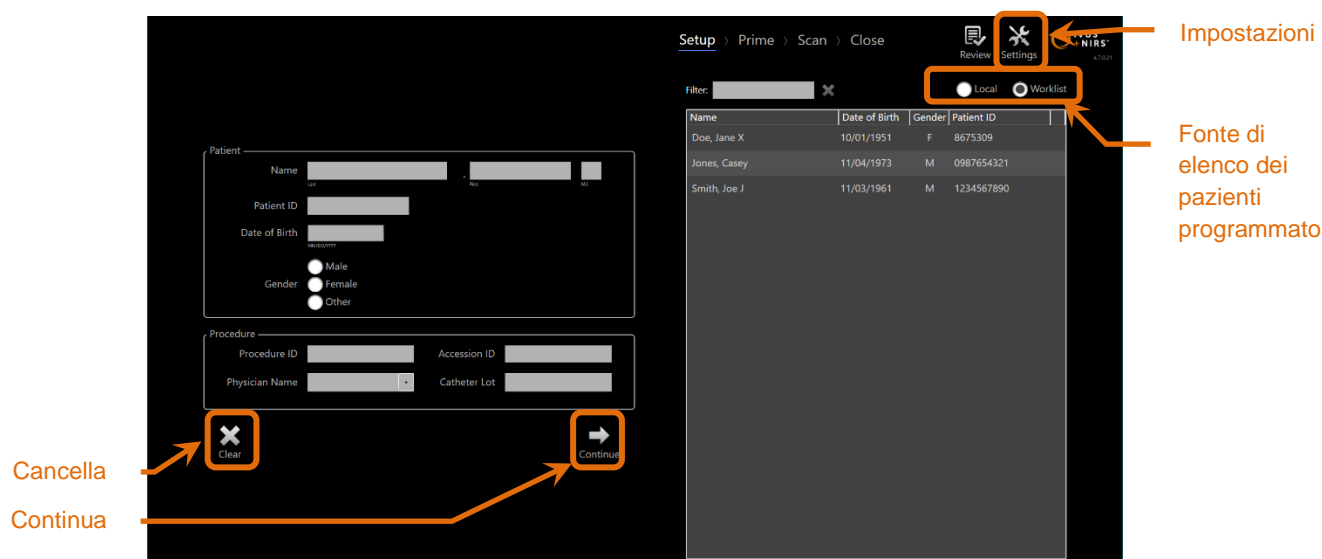


Figura 7-1. Fase di impostazione della modalità di acquisizione con i principali comandi evidenziati.

Ciascuna procedura consente di inserire quattro elementi per identificare il paziente. Questi elementi sono: Patient Name (Nome del paziente), ID number (ID del paziente), Gender (Sesso), e Date of Birth (Data di nascita, DoB). I campi contrassegnati come “required” (obbligatori) devono essere completati per poter chiudere la procedura e consentire la successiva revisione e archiviazione.

Patient Name
(Nome del paziente)

Il nome del paziente può essere inserito nel formato cognome, nome e secondo nome.

Patient ID
(ID del paziente)

Il numero della cartella clinica o del file del paziente sottoposto a imaging.

Gender (Sesso)

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ fornisce tre differenti opzioni per descrivere il paziente.

infraredx™
 A NIPRO COMPANY

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Date of Birth
(Data di nascita) È possibile specificare il mese, il giorno
e l'anno di nascita del paziente.

NOTA: Utilizzare l'opzione "Other" (Altro) in caso di inserimento di
paziente anonimo.

Altri quattro campi possono essere completati per identificare meglio la procedura:

Procedure ID (ID procedura)	Il numero o il codice utilizzato per identificare questa procedura di imaging.
Accession ID (ID adesione)	Si tratta di un valore di identificazione della procedura spesso assegnato al momento della registrazione del paziente per la procedura e può essere utilizzato dal PACS per verificare i dati trasferiti. In genere, questo valore viene inserito automaticamente quando si utilizzano le funzioni dell'elenco di lavoro delle modalità.
Physician (Medico)	Il nome del medico assegnato alla procedura di imaging.
Catheter Lot (Lotto del catetere)	Il numero di lotto di costruzione del catetere utilizzato durante questa procedura di imaging.



Assicurarsi di inserire correttamente le informazioni del
paziente per evitare dati con etichetta errata o errata
collocazione dei dati della procedura.


NOTA: I campi obbligatori richiesti per l'identificazione del paziente e
della procedura possono essere configurati nelle Impostazioni,
consultare la sezione 13.

NOTA: Inserire il numero di lotto del catetere prima di acquisire i dati
per inserire automaticamente il numero di lotto del catetere in
ciascun file di scansione quando viene registrato.

7.1 Inserimento manuale delle informazioni relative al paziente e alla procedura

L'inserimento manuale delle informazioni relative al paziente e alla procedura può essere eseguito utilizzando la tastiera software su schermo.



Toccare **Clear** (Cancella), , per rimuovere i dati relativi al paziente e alla procedura dai campi di impostazione e ricominciare.

NOTA: I campi delle informazioni possono essere compilati in qualsiasi momento prima di chiudere la procedura quando il sistema non sta acquisendo attivamente dati dell'immagine.

7.2 Inserimento semi-automatico delle informazioni relative al paziente e alla procedura

I dati del paziente possono essere inseriti direttamente nei campi forniti, come descritto in precedenza, oppure è possibile selezionare informazioni dalla directory locale o dall'elenco di pazienti programmato (elenco di lavoro) per migliorare la coerenza di inserimento per pazienti già noti o pianificati.

NOTA: Toccare i titoli della colonna nell'elenco di pazienti programmati per ordinare quest'ultimo in modi differenti.

NOTA: Digitare il testo nel filtro per ridurre l'elenco dei nomi e degli ID paziente che corrispondono alla voce inserita. Eliminare il testo o premere Clear (Cancella) per tornare all'elenco completo.

NOTA: L'elenco dei pazienti locale viene visualizzato per impostazione predefinita. L'opzione Worklist (Elenco di lavoro) viene visualizzata quando il sistema è configurato per la connessione dell'elenco di lavoro delle modalità.

NOTA: Selezionando un'opzione dalla lista, si sovrascrivono i rispettivi campi nei campi informativi su Paziente e Procedura.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

7.2.1 Elenco dei pazienti locale

Il sistema carica automaticamente le informazioni relative ai pazienti da procedure registrate in precedenza che rimangono nel sistema nell'elenco dei pazienti programmati.

Toccare il nome desiderato nell'elenco per completare l'impostazione di nome paziente, ID paziente, sesso e data di nascita.

I campi della procedura rimanenti richiedono un inserimento manuale.

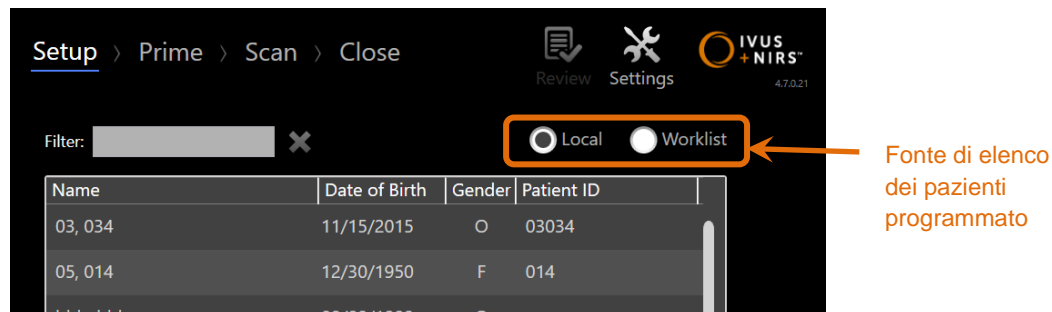


Figura 7-2. Fase di impostazione con comando di selezione per la fonte dell'elenco dei pazienti programmato evidenziata.

7.2.2 Elenco di lavoro delle modalità



Se il sistema è stato configurato per caricare informazioni relative all'elenco di lavoro delle modalità dal sistema informatico dell'ospedale (HIS), il contenuto dell'elenco di pazienti programmato può essere trasferito da un elenco di pazienti locale all'elenco di lavoro delle modalità recuperata dall'HIS.

Per configurare le funzioni di connessione dell'elenco di lavoro delle modalità, consultare la sezione 13.

Il sistema recupererà automaticamente tutti i dettagli relativi a pazienti e procedure per un'angiografia radiografica ("XA"), il tipo di modalità per la data corrente e lo renderà disponibile per la selezione sul sistema.

Toccare il nome desiderato nell'elenco per completare l'impostazione di nome paziente, ID paziente, sesso, data di nascita e informazioni procedurali rese disponibili dall'HIS, quali l'ID di adesione.

I campi della procedura rimanenti richiedono un inserimento manuale.

NOTA: Per aggiornare gli inserimenti nell'elenco di lavoro delle modalità visualizzati, scorrere le opzioni "Local" (Locale),  Local e "Worklist" (Elenco di lavoro), .

7.3 Cancellazione delle informazioni relative al paziente e alla procedura

Per cancellare tutte le informazioni relative al paziente e alla procedura e ricominciare,



toccare **Clear** (Cancella).

Questa azione non elimina alcun dato di scansione registrato nella procedura attiva.


7.4 Passaggio alla fase successiva


Dopo aver inserito i dati relativi a paziente e procedura, per passare alla fase di priming



della modalità di acquisizione, toccare **Continue** (Continua).

NOTA: Utilizzare il comando della barra di avanzamento per cambiare le fasi; premere la fase desiderata per saltare fasi della procedura.

NOTA: Con un catetere collegato, premendo il pulsante **Live IVUS**, , sul controller Makoto™ si passerà immediatamente alla fase di priming.

NOTA: Con un catetere collegato, premendo il pulsante **Pullback** (Retrazione), , sul controller Makoto™ si passerà immediatamente alla fase di scansione.

8 Priming del catetere e preparazione del controller Makoto™ per l'utilizzo

La fase successiva della procedura inizia con il priming del catetere per imaging. In parallelo, il controller Makoto™ può essere posizionato nel campo sterile per l'utilizzo. La preparazione per l'imaging si conclude con il collegamento del catetere per imaging al controller e con la valutazione della preparazione del catetere.

8.1 Priming del catetere



Il catetere sterile deve essere adescato e preparato in conformità alle istruzioni per l'uso incluse nella confezione del catetere.

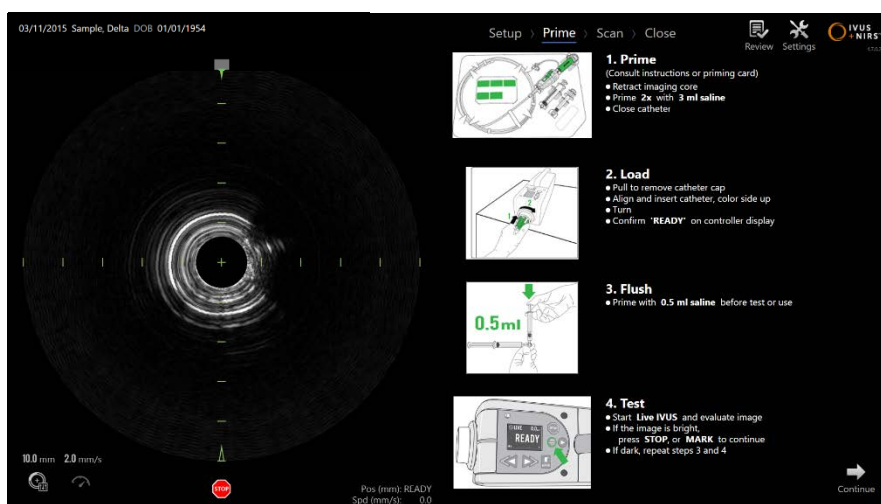


Figura 8-1. Indicazioni su schermo per il priming fornite nella fase di priming della modalità di acquisizione.

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ fornirà le indicazioni su schermo sulle principali fasi per il priming di un catetere collegato al controller Makoto™.

Tali fasi sono realizzate per illustrare e ottimizzare le istruzioni incluse con il catetere e non sostituiscono l'esigenza di formazione per l'utente, nonché la lettura e la comprensione delle Istruzioni per l'uso incluse nella confezione del catetere.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Utilizzando le illustrazioni su schermo, le indicazioni grafiche fornite con il catetere e le Istruzioni per l'uso del catetere in forma scritta, l'operatore sterile deve eseguire il priming del catetere.

8.2 Preparazione del controller Makoto™

Il controller Makoto™ deve essere collocato in una barriera sterile per controller Makoto™ prima di essere posto sul tavolo di procedura.

Le seguenti istruzioni richiedono la partecipazione di un operatore sterile e di un operatore non sterile per l'applicazione della barriera sterile e il posizionamento del controller Makoto™ nel campo operativo:



AVVERTENZA

Se, in qualsiasi momento, la barriera sterile del controller Makoto™ risulta danneggiata, sostituirla immediatamente con un'altra barriera nuova, sterile.



AVVERTENZA

Assicurarsi che la mano dell'operatore sterile si trovi all'esterno della fodera blu sulla barriera sterile.



AVVERTENZA

Posizionare il controller Makoto™ in una posizione stabile sul tavolo di procedura. NON collocarlo vicino ai bordi del tavolo.



AVVERTENZA

Il tavolo di procedura deve essere mantenuto orizzontale durante il funzionamento del sistema Makoto™ o in qualsiasi momento in cui il controller Makoto™ si trovi nel campo sterile. NON utilizzare comandi di rotazione o inclinazione del tavolo, se disponibili.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni



AVVERTENZA

Assicurarsi che vi sia un gioco ombelicale nel campo sterile per consentire il movimento del tavolo, della console o del paziente in modo da ridurre al minimo il rischio di movimenti involontari del controller Makoto™.



AVVERTENZA

NON consentire agli oggetti sterili di entrare in contatto con il controller Makoto™ attraverso l'apertura della presa del catetere della barriera sterile del controller Makoto™.



AVVERTENZA

NON consentire alla parte laterale della fodera della guarnizione della barriera sterile che è stata in contatto diretto con la presa del controller Makoto™ di entrare in contatto con l'operatore sterile.

Per posizionare il controller Makoto™ nel campo sterile, attenersi alle seguenti fasi:

1. L'operatore non sterile rimuove la barriera sterile dalla scatola del catetere.
2. L'operatore non sterile apre la confezione contenente la barriera sterile del controller Makoto™.
3. L'operatore sterile rimuove la barriera sterile del controller Makoto™ dalla confezione e spiega le due falde corte sulla barriera del controller Makoto™, rivelando la guarnizione bianca con fodera in plastica blu.
4. L'operatore non sterile rimuove il controller Makoto™ dal supporto della console, che si trova all'esterno del campo sterile.
5. L'operatore non sterile tiene il controller Makoto™ parallelo al suolo, vicino al campo sterile mentre tiene la maniglia sul retro del controller.
6. L'operatore sterile inserisce la mano destra nella piegatura della barriera sterile del controller Makoto™ indicata con una mano e una freccia. La barriera deve essere orientata in modo che la fodera blu per la presa sia allineata con la parte superiore del controller Makoto™.
7. La mano sinistra viene inserita nella piegatura sull'altro lato della barriera sterile del controller Makoto™, anche questa indicata da una mano e da una freccia.
8. L'operatore sterile tiene aperta la barriera sterile del controller Makoto™.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

9. L'operatore non sterile passa il controller Makoto™ all'operatore sterile collocando quest'ultimo nella barriera sterile aperta del controller Makoto™.
10. L'operatore sterile afferra il controller Makoto™ tramite la barriera sterile del controller Makoto™ tramite la maniglia sulla parte superiore del controller, supportandone completamente il peso.
11. L'operatore non sterile, quindi, rilascia il controller e afferra i bordi dell'apertura della barriera sterile del controller Makoto™ indicata da frecce e tira la barriera sterile per coprire il cavo ombelicale del controller Makoto™.
12. L'operatore sterile colloca il controller Makoto™ avvolto sul tavolo di procedura.
13. L'operatore sterile allinea la guarnizione bianca della barriera sterile del controller Makoto™ con la presa del controller Makoto™ e fissa la guarnizione della barriera sulla presa.
14. L'operatore non sterile deve fissare la posizione dell'ombelicale per evitare che la porzione insaccata lasci l'area di procedura sterile durante l'uso.

Il controller Makoto™ è ora pronto per il collegamento del catetere.



Verificare che la guarnizione bianca sia saldamente fissata alla presa del controller Makoto™. Il materiale della barriera non deve ostruire l'apertura. Un'applicazione corretta prevede la presenza di un piccolo spazio tra la guarnizione bianca e la superficie anteriore del controller.

8.3 Collegamento del catetere



AVVERTENZA

Il catetere sterile deve essere gestito e preparato in conformità alle istruzioni per l'uso incluse nella confezione del catetere.



AVVERTENZA

Non toccare il lato inferiore della fodera blu poiché potrebbe essere entrato in contatto con la presa del controller Makoto™ non sterile.

Le istruzioni del catetere riportate nel presente manuale servono solo come indicazioni generali. Seguire sempre la documentazione delle istruzioni per l'uso che si trova nella confezione di ciascun catetere Infraredx.

Il catetere deve essere collegato al controller Makoto™ da un operatore sterile.



ATTENZIONE

Il controller Makoto™ deve essere posizionato sul tavolo del paziente, in modo da poter disporre di uno spazio adeguato per la connessione del catetere e in modo che la presa del catetere del controller Makoto™ non presenti ostruzioni.



ATTENZIONE

Durante la procedura di connessione non contaminare le faccette in fibra del catetere o del controller Makoto™.

1. Confermare che la guarnizione bianca della barriera del controller Makoto™ sia fissata alla presa del controller Makoto™.
2. Rimuovere la fodera blu dalla barriera sterile del controller Makoto™ lungo le linee perforate ed eliminarla dal campo sterile.
3. Confermare che il controller Makoto™ sia in posizione READY (Pronto) come indicato dal messaggio "LOAD" (Carica) visualizzato sullo schermo LCD, in cima al controller.
4. Allineare la maniglia del catetere con il lato colorato rivolto verso l'alto.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni


5. Inserire la maniglia del catetere nella presa del catetere del controller Makoto™.
6. Ruotare in senso orario la maniglia del catetere finché lo schermo LCD del controller non indica che il catetere è completamente connesso tramite il messaggio “READY”.

NOTA: Se il controller Makoto™ identifica una connessione parziale del catetere, l'istruzione sarà indicata sullo schermo LCD o sullo schermo LCD del controller sarà visualizzato “See Display” (Visualizza display) e saranno fornite istruzioni dettagliate aggiuntive sul display del sistema Makoto™.

8.4 Test del catetere


Dopo aver eseguito il priming del catetere, come indicato dalle istruzioni contenute nella confezione del catetere e averlo collegato al controller Makoto™, le prestazioni del catetere possono essere verificate utilizzando la funzione “Live IVUS” del sistema.

Eseguire il priming del catetere aggiungendo 0,5 ml di soluzione fisiologica e premere

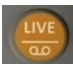“Live IVUS”, , sul controller Makoto™ per avviare l'imaging. Se un'immagine dell'IVUS viene visualizzata come cerchi concentrici e la luminosità dell'immagine è

accettabile, toccare “STOP” (Arresta), , sullo schermo o premere “STOP”, , sul controller Makoto™.


NOTA: Se l'immagine non è accettabile o è scura, continuare a risciacquare il catetere utilizzando la siringa per priming.


Procedere con la fase di scansione toccando “Scan” (Scansione), , nel comando della barra di avanzamento sulla parte superiore dello schermo.

NOTA: La valutazione della qualità del priming del catetere può essere eseguita sulle schermate “Prime” (Priming) o “Scan” (Scansione).

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

NOTA: Mentre il catetere ruota e l'immagine è in fase di aggiornamento, premere il pulsante **Mark** (Contrassegno), , sul controller Makoto™ per passare alla fase di scansione.

NOTA: Premere il pulsante Pullback, , sul Controller Makoto™ per far avanzare il sistema alla fase di scansione e iniziare un'acquisizione di ritrazione automatica.

9 Acquisizione delle immagini di scansione intravascolare Makoto™



AVVERTENZA

Consultare la documentazione delle Istruzioni per l'uso per indicazioni sul caricamento del catetere sul filo guida, il catetere nel catetere guida e l'avanzamento del catetere nell'arteria.

Dopo aver valutato la qualità del priming del catetere, il catetere deve essere posizionato sul filo guida e fatto avanzare come indicato nelle relative Istruzioni per l'uso.

Sono disponibili due tipi di acquisizioni di dati che potrebbero essere eseguite utilizzando il sistema Makoto Intravascular Imaging System™: acquisizioni della retrazione automatica e Live IVUS.

Un'acquisizione Live IVUS genera immagini dell'IVUS senza un chemogram. Una retrazione automatica genera immagini dell'IVUS con un chemogram.

9.1 Acquisizione Live IVUS

Durante un'acquisizione di dati Live IVUS, il sistema avvia la rotazione della parte centrale dell'imaging del catetere senza avviare una retrazione automatica (traslazione prossimale) della parte centrale dell'imaging. Un'immagine dell'IVUS trasversale viene visualizzata sullo schermo e sarà aggiornata durante l'attivazione di Live IVUS.

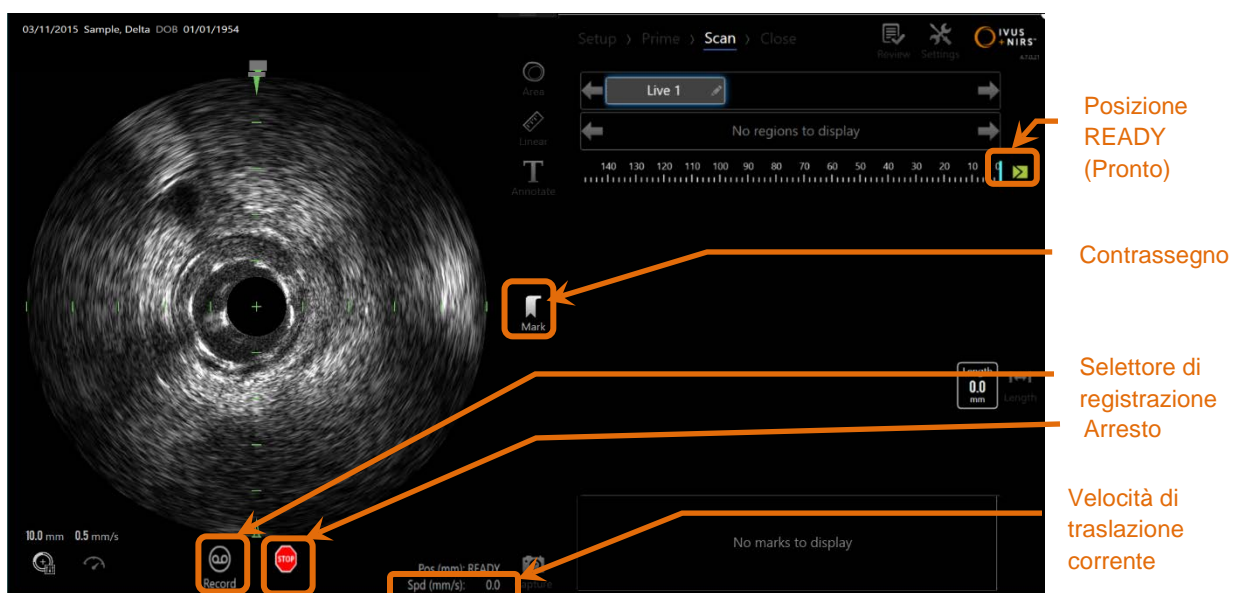


Figura 9-1. Modalità di acquisizione Makoto durante una scansione Live IVUS non registrata.

Makoto Intravascular Imaging System™


Manuale di istruzioni

NOTA: Una scansione Live IVUS non sarà salvata nella memoria del sistema a meno che l'utente non scelga di scansionarla.

NOTA: Live IVUS produrrà solo un'immagine dell'IVUS; nessun dato NIRS sarà visualizzato né sarà generato alcun chemogram.

NOTA: Live IVUS produrrà un'immagine dell'IVUS trasversale. Durante la registrazione di una scansione Live IVUS, l'immagine IVUS verrà visualizzata anche sullo schermo, nell'area dell'IVUS Longitudinale.

9.1.1 Avvio del Live IVUS

Premere il pulsante **Live IVUS**, , sul controller Makoto™ per abilitare l'imaging IVUS in tempo reale. Lo stato della modalità di imaging sullo schermo LCD si aggiornerà per mostrare "LIVE" e le informazioni relative alla posizione vengono stampate utilizzando testo bianco.

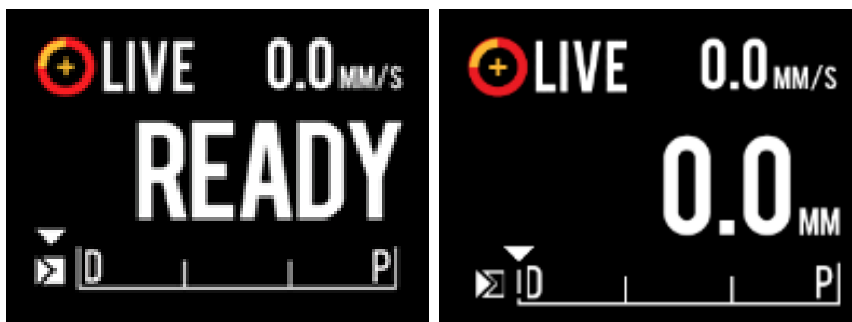


Figura 9-2. Controller Makoto™ che mostra l'acquisizione Live IVUS che non è registrata nella posizione READY (Pronto) (sinistra) e nella posizione 0,0 mm (destra).

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

9.1.2 Traslazione del Live IVUS



AVVERTENZA

La mancata osservanza degli avvisi visualizzati può determinare una situazione pericolosa che può comportare lesioni per il paziente o per l'operatore e può danneggiare il catetere collegato.



AVVERTENZA

Incurvature, piegature eccessive o qualsiasi altro difetto del catetere possono richiedere al Controller una forza eccessiva per spostare la parte centrale del catetere. Se viene richiesta una forza eccessiva, il Controller arresterà il movimento di traslazione in direzione distale.



Premere il pulsante STOP, , del Controller Makoto™ e seguire le indicazioni su schermo per risolvere il problema.

NON usare le funzioni di traslazione a singoli passi in presenza di incurvature o piegature. Ciò può danneggiare la guaina del catetere o provocare lesioni al paziente.

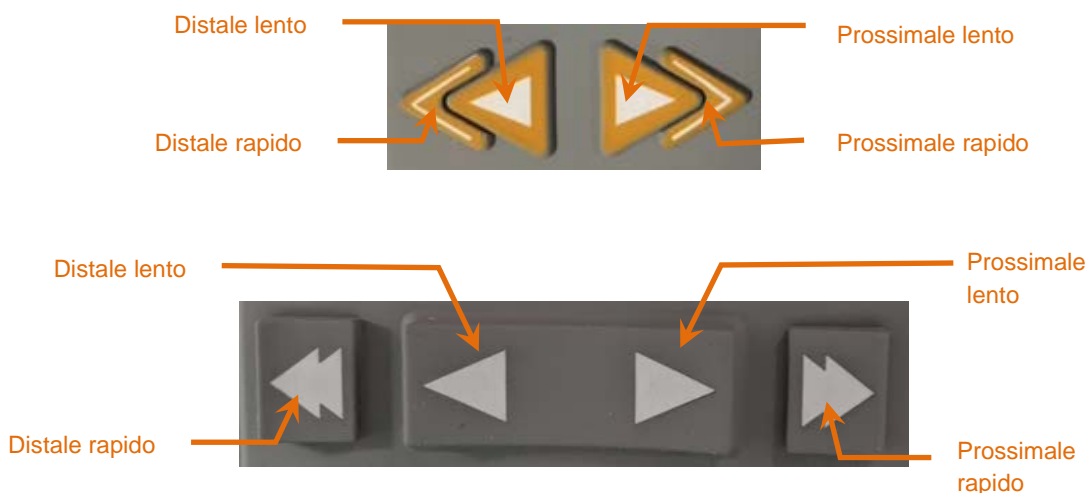


Figura 9-3. Comandi della traslazione della parte centrale dell'imaging, potrebbero essere disponibili diverse configurazioni (alto,basso).

Durante l'esecuzione di una scansione Live IVUS, utilizzare i comandi del movimento distale e prossimale sul controller Makoto™ per regolare la posizione dell'immagine corrente all'interno dell'arteria.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Tenendo premuti i comandi del movimento lento si trasla nella direzione desiderata a una velocità di 2,0 mm/s. Premendo e rilasciando si trasla nella direzione desiderata a una distanza fissa di 0,1 mm.



Tenendo premuti i comandi del movimento rapido si trasla nella direzione desiderata a una velocità di 10,0 mm/s. Premendo e rilasciando si trasla nella direzione desiderata a una distanza fissa di 0,5 mm.

NOTA: Sebbene l'imaging sia attivo in posizione READY, la traslazione nella direzione prossimale comporterà il movimento della posizione della parte centrale dell'immagine nell'intervallo di imaging continuo compreso tra 0 mm e 150 mm.

Un ritorno alla posizione READY può verificarsi solo quando il sistema non acquisisce immagini.

NOTA: Durante l'attivazione dell'imaging, la traslazione prossimale E distale si verifica solo nell'intervallo compreso tra 0 mm e 150 mm e si arresta automaticamente quando si raggiungono queste posizioni estreme e l'imaging prosegue.



NOTA: Alla posizione di 0 mm e quando l'imaging non è attivo,

premendo i comandi della posizione distale,  o , si riporta il controller e la parte centrale dell'imaging del catetere in posizione READY.

9.1.3 Registrazione di un fotogramma Live IVUS

Mentre si esegue una scansione Live IVUS non registrata, è possibile salvare un singolo fotogramma per documentare la procedura. Questo fotogramma può essere salvato, esaminato, misurato o eliminato.

Durante una scansione Live IVUS, premere il pulsante **Mark** (Contrassegno) sul

controller Makoto™, , oppure toccare il comando **Mark**, , sul display del sistema Makoto™ per contrassegnare il fotogramma. Questo fotogramma sarà registrato quale scansione di singolo fotogramma.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

9.1.4 Registrazione di una scansione Live IVUS

È possibile registrare una serie di fotogrammi Live IVUS in un singolo file di scansione.

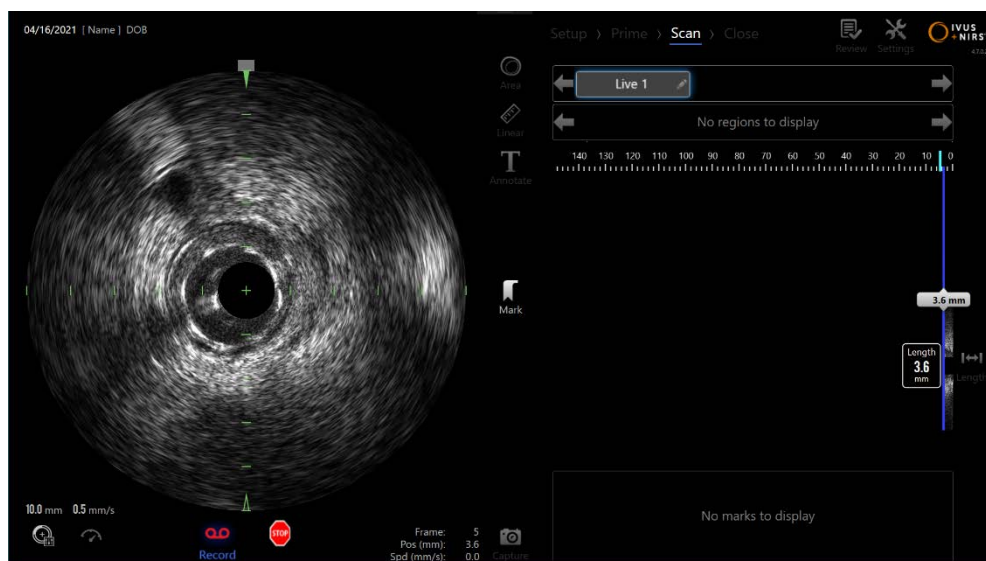
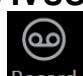



Figura 9-4. Modalità di acquisizione Makoto durante una scansione Live IVUS registrata.

Premere il pulsante **Live IVUS** sul controller Makoto™, , oppure toccare

Record (Registrazione), , sul display del sistema Makoto™ accanto all'immagine dell'IVUS trasversale per abilitare la registrazione.

Premere il pulsante **Live IVUS** sul controller Makoto™, , oppure toccare

Record (Registrazione), , nuovamente sul display del sistema Makoto™ per interrompere solo la registrazione dei dati. Il catetere continuerà a ruotare e l'immagine dell'IVUS trasversale continuerà ad aggiornarsi.

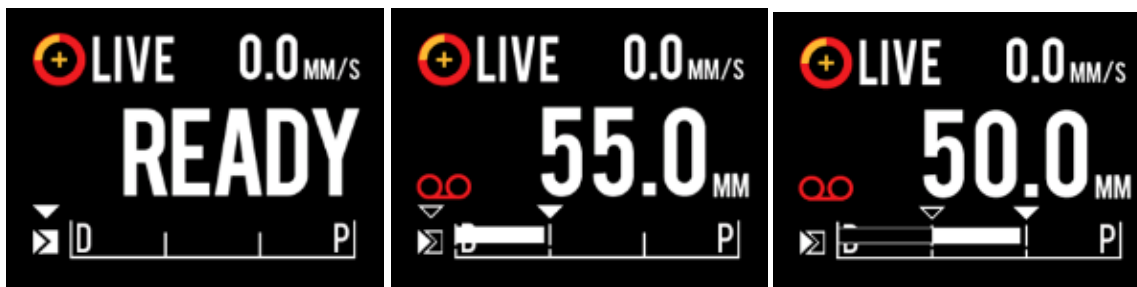



Figura 9-5. Schermo LCD del Controller Makoto™ durante il processo di transizione dall'inizio di un Live IVUS non registrato fino alla fase READY (Pronto) (a sinistra), alla registrazione e successiva traslazione prossimale e stazionaria del Live IVUS (al centro), fino all'azzeramento e traslazione prossimale con registrazione (a destra). Si noti la comparsa dell'icona di registrazione quando il Live IVUS viene registrato. Se la traslazione viene effettuata durante la registrazione di un Live IVUS comparirà una barra colorata a indicare l'intervallo in cui avviene la registrazione dell'acquisizione in corso, a partire dall'ultimo contrassegno creato (al centro e a destra), mentre la registrazione precedente all'ultimo contrassegno sarà rappresentata da una barra vuota (a destra).

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Durante la traslazione di Live IVUS, la posizione relativa, la posizione effettiva e gli indicatori della velocità di traslazione saranno aggiornati.

NOTA: Premere il pulsante **STOP** (Arresta) sul controller Makoto™, , oppure toccare **STOP**  sul display del sistema Makoto™ per arrestare la rotazione e il movimento del catetere. E terminare la registrazione.

NOTA: Premendo il pulsante **Pullback** (Retrazione) sul controller Makoto™, , per concludere la registrazione Live IVUS corrente e avviare una nuova scansione di retrazione automatica all'impostazione di velocità di retrazione corrente. Le scansioni di retrazione automatiche sono sempre registrate.

NOTA: Sui fotogrammi di una scansione Live IVUS registrata, per documentare ulteriormente la procedura, è possibile creare contrassegni nei file di scansione ed eseguire misurazioni dell'IVUS trasversale.

9.1.5 Marking (creazione di contrassegni) e “Zeroing” (Azzeramento) durante il Live IVUS

Durante la registrazione di un'acquisizione Live IVUS è possibile creare dei Mark (contrassegni) che possono essere inseriti e successivamente consultati premendo il pulsante Mark sul controller o toccando l'icona Mark sullo schermo.

Durante un'acquisizione Live IVUS non registrata, premendo il pulsante Mark sul controller o toccando l'icona Mark sullo schermo è possibile creare dei Mark che possono essere inseriti e successivamente consultati sotto forma di registrazioni di singoli fotogrammi.



La creazione di un Mark durante l'acquisizione di un qualsiasi Live IVUS causerà l'azzeramento della visualizzazione della distanza percorsa, che verrà riportata a 0,0 mm.

Makoto Intravascular Imaging System™


Manuale di istruzioni

9.1.6 Arresto del Live IVUS

Una scansione Live IVUS può essere interrotta in due modi:

- a. Premere il pulsante **STOP** (Arresta),  sul controller Makoto™ oppure toccare **STOP**,  sull'interfaccia utente per arrestare il movimento del controller Makoto™, terminare gli aggiornamenti dell'immagine dell'IVUS trasversale e la registrazione di qualsiasi scansione Live IVUS in corso.

Oppure

- b. Premere **Pullback** (Retrazione), , per completare la scansione Live IVUS e avviare immediatamente un'acquisizione della retrazione automatica.

NOTA: Una volta arrestato il Live IVUS, il pannello del Controller Makoto™ visualizzerà la distanza percorsa dall'ultima pressione del pulsante Mark (contrassegno). Questo pannello rimarrà visualizzato sino a quando si premerà il pulsante Live IVUS, Pullback (Retrazione), Return to READY (ritorno a Pronto), o un pulsante per la traslazione.

9.2 Acquisizione della retrazione automatica

Un'acquisizione della retrazione automatica avvia la rotazione e retrazione del controller Makoto™ e della parte centrale dell'imaging del catetere. Quest'azione avvia inoltre la raccolta e registrazione dei dati IVUS e NIRS alla velocità di retrazione impostata dall'utente.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

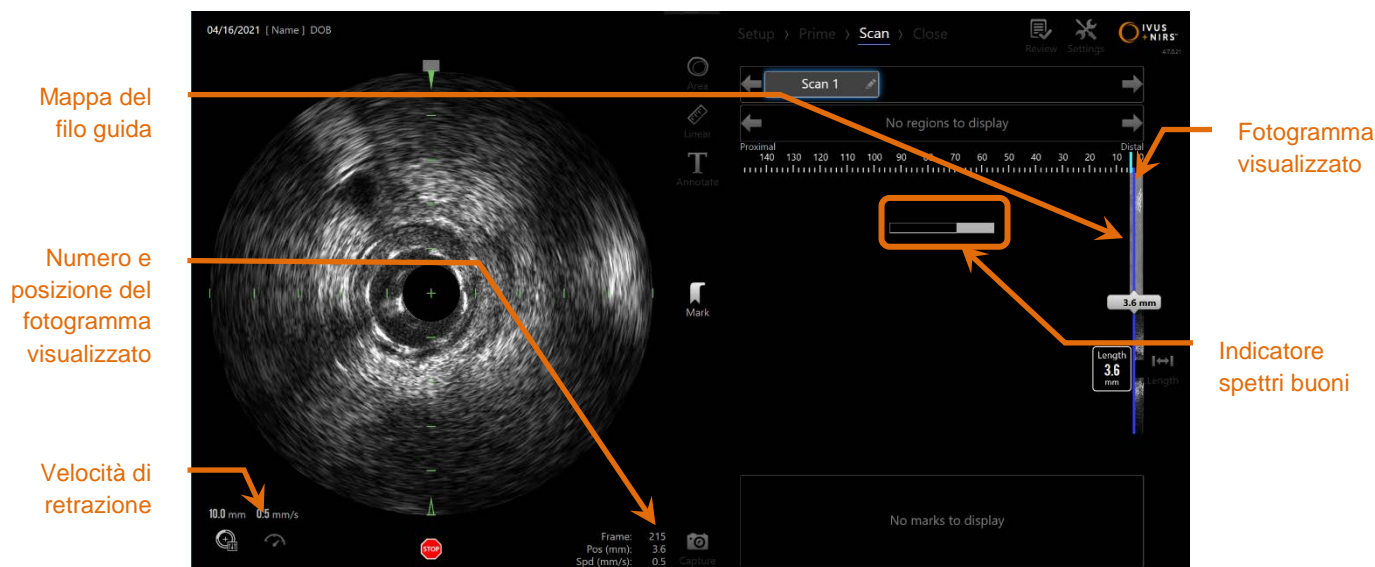


Figura 9-6. Modalità di acquisizione con acquisizione della retrazione automatica in corso.

9.2.1 Impostazione della velocità di retrazione automatica successiva

La velocità di traslazione per una retrazione automatica deve essere configurata dall'utente prima di avviare qualsiasi imaging.

Impostare la velocità di traslazione della retrazione desiderata toccando il comando



Pullback Rate (Velocità di retrazione), e selezionando la velocità desiderata tra le opzioni disponibili:

0,5 mm/s

1,0 mm/s

2,0 mm/s

9.2.2 Avvio della retrazione automatica




Premere il pulsante **Pullback** (Retrazione), sul controller Makoto™ per avviare un'acquisizione della retrazione automatica. Durante una retrazione, Transverse IVUS (IVUS trasversale), Longitudinal IVUS (IVUS longitudinale), Guide Wire Detection Map (Mappa rilevamento filo guida) e Good Spectra Indicator (Indicatore spettri buoni) vengono aggiornati in tempo reale.


Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

9.2.2.1 *Acquisizione della retrazione automatica con anteprima*

Quando si avvia un'acquisizione della retrazione automatica dalla posizione READY

(Pronto) utilizzando il pulsante **Pullback** (Retrazione), , il sistema si sposterà innanzitutto dalla posizione "0.0mm" (0,0 mm) e avvierà un'acquisizione Live IVUS. In questo modo è disponibile un'anteprima intravascolare della posizione di avvio della

retrazione. Dopo l'anteprima, premere nuovamente il pulsante **Pullback**, , per procedere con l'acquisizione.

9.2.2.2 *Indicatore spettri buoni*

All'avvio di una scansione della retrazione automatica, il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ monitorerà la qualità dello spettro luminoso registrato. Il sistema richiede un numero minimo di spettri per generare un chemogram. Mentre vengono registrati spettri ottimali, viene compilato Good Spectra Indicator (Indicatore spettri buoni). Quando si raggiunge il numero minimo, non viene più visualizzato.

NOTA: Quando il sistema Makoto™ raccoglie sufficienti dati necessari per il sistema per la creazione di un chemogram, l'indicatore spettri buoni scompare dallo schermo.

NOTA: Per avere dati sufficienti a generare un chemogram, è necessario registrare almeno 12 mm circa di dati di scansione di retrazione.

NOTA: Anche se l'indicatore spettri buoni si riempie a causa della raccolta iniziale di spettri di buona qualità, se la percentuale di spettri troppo deboli per contribuire alla generazione del chemogram supera il 12%, non verrà generato alcun chemogram.

9.2.3 Arresto della retrazione automatica



AVVERTENZA

L'imaging senza catetere guida deve essere ridotto al minimo per i risultati ottimali del chimigramma.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Una volta raggiunta la distanza di retrazione desiderata o dopo aver registrato la quantità di dati desiderata, il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ può essere arrestato in due modi:

- a. Premere il pulsante **STOP** (Arresta), , sul controller Makoto™.

Oppure

- b. Toccare **STOP**, , sull'interfaccia utente della console Makoto™.

Entrambe le azioni arrestano il movimento del controller Makoto™ e l'acquisizione dei dati.



In caso di emergenza, utilizzare il pulsante **STOP** (Arresta),



, sul controller Makoto™.

NOTA:

Il controller Makoto™ arresta automaticamente la retrazione se viene raggiunto il punto più proximale (posizione 150,0 mm).

NOTA:

Una volta arrestata la retrazione, il pannello del controller Makoto™ visualizzerà la distanza trascorsa dall'ultima pressione del pulsante Mark [Contrassegno]. Questo rimarrà sul pannello sino a quando si premerà il pulsante Live IVUS, di retrazione, Return to Ready [ritorno a PRONTO] o di traslazione.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

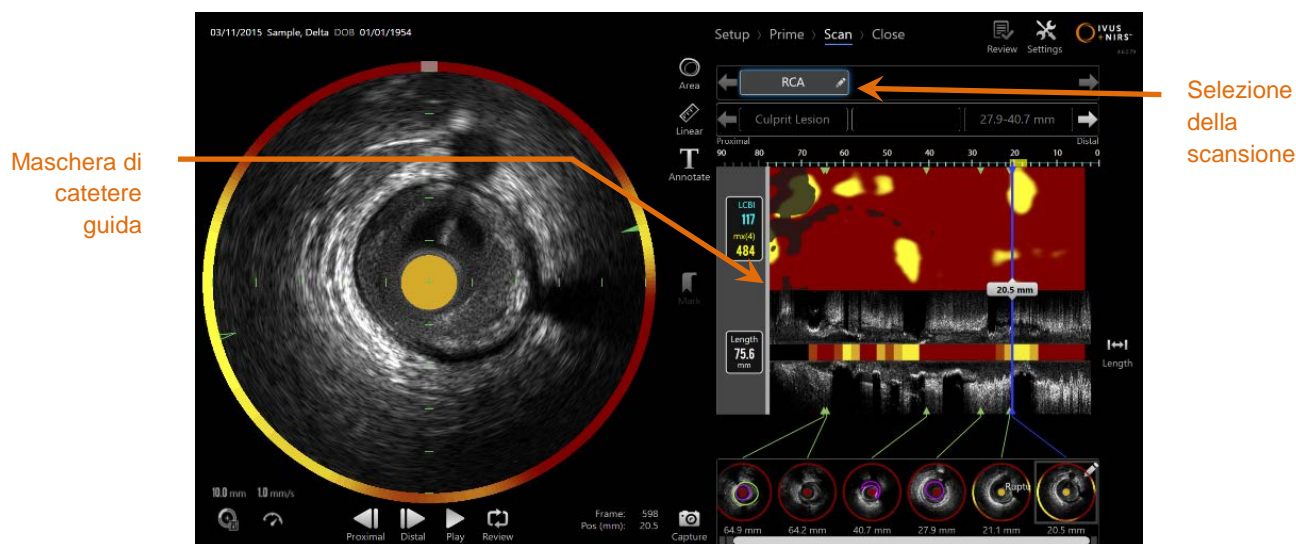


Figura 9-7. Modalità di acquisizione dopo il completamento di una scansione di retrazione automatica con catetere guida rilevato.

Al completamento dell'acquisizione della retrazione automatica il Chemogram, il Block Level Chemogram e l'indice del carico di core lipidico si aggiornano. La mappa di rilevamento del filo guida sarà nascosta. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 10.2.8.

Se il catetere guida è rilevato dal sistema Makoto Intravascular Imaging System™, una maschera di catetere guida grigia sarà applicata al Chemogram, all'IVUS longitudinale e al Block Level Chemogram. Per ulteriori informazioni sulla modalità di rimozione della maschera di catetere guida dalla vista, consultare la sezione 10.2.7.

NOTA: Se la maschera di catetere guida è abilitata, la porzione del chemogram nella maschera di catetere guida sarà esclusa dal calcolo LCBI.

9.2.4 Contrassegno o “Zero-ing” [“Azzeramento”] durante la retrazione automatica

Durante la Retrazione Automatica, è possibile lasciare contrassegni d'acquisizione, da rivedere successivamente, premendo il pulsante Mark [Contrassegno] sul controller, l'immagine o toccando l'icona Mark sullo schermo.

L'aggiunta di un Contrassegno durante la retrazione automatica ripristinerà la distanza trascorsa a una distanza 0,0 mm.

9.3 Esecuzione di scansioni aggiuntive con il sistema Makoto Intravascular Imaging System™



AVVERTENZA

Consultare la documentazione delle Istruzioni per l'uso del catetere per indicazioni sulla preparazione del catetere per ulteriori scansioni.



AVVERTENZA


La mancata osservanza degli avvisi visualizzati può determinare una situazione pericolosa che può comportare lesioni per il paziente o per l'operatore e può danneggiare il catetere collegato.



AVVERTENZA

Incurvature, piegature eccessive o qualsiasi altro difetto del catetere possono richiedere al Controller una forza eccessiva per spostare la parte centrale del catetere. Se viene richiesta una forza eccessiva, il Controller arresterà il movimento di traslazione in direzione distale.

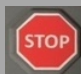



Premere il pulsante STOP, , del Controller Makoto™ e seguire le indicazioni su schermo per risolvere il problema.

NON usare le funzioni di traslazione a singoli passi in presenza di incurvature o piegature. Ciò può danneggiare la guaina del catetere o provocare lesioni al paziente.

In ogni procedura è possibile eseguire più scansioni. Il catetere può richiedere un'irrigazione aggiuntiva di soluzione fisiologica eparinizzata prima dell'imaging successivo.

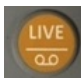

Premere il pulsante **Live IVUS**, , o il pulsante **Pullback** (Retrazione), , sul controller Makoto™ per acquisire dati aggiuntivi. La scansione precedente viene salvata e viene visualizzata una nuova scansione attiva.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Ciascuna nuova scansione creerà un nuovo pulsante per attivare la scansione per scopi di analisi, situato sul chemogram.

NOTA: Se si registrano più di tre scansioni, utilizzare le frecce sinistra e destra per evidenziare il pulsante della scansione desiderata.

NOTA: È possibile salvare un totale di 20 registrazioni per procedura. Se si raggiunge il limite, eliminare le scansioni indesiderate o chiudere la procedura e avviarne una nuova.

NOTA: L'annotazione del nome di una scansione modificherà il testo sul pulsante associato.

10 Revisione, misurazione e annotazione delle scansioni

10.1 Selezione della scansione

Dopo aver registrato più scansioni, è possibile passare da una scansione all'altra utilizzando i comandi di selezione della scansione.

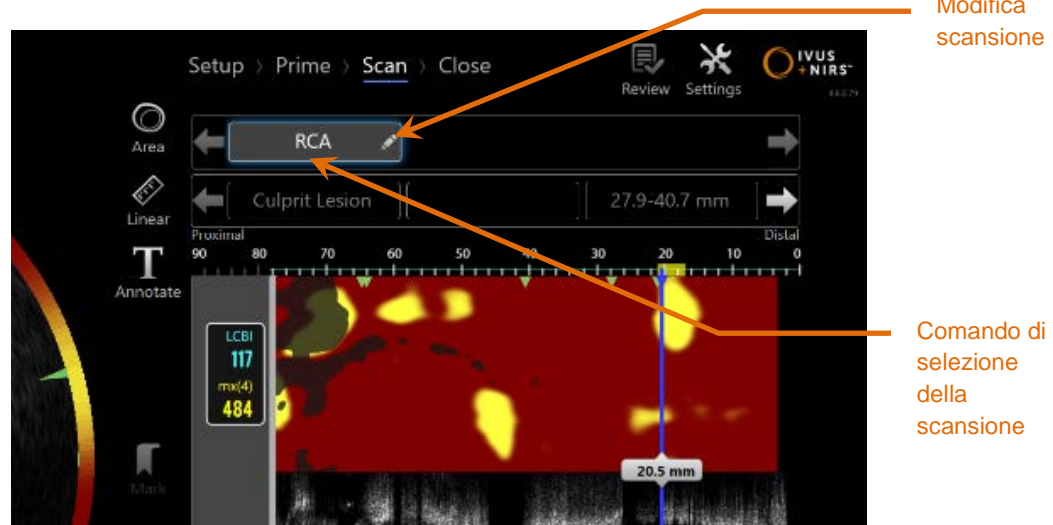


Figura 10-1. Fase di scansione della modalità di acquisizione con la scansione “RCA” selezionata per revisione.

Toccare il nome della scansione desiderata per selezionare e caricare i dati da visualizzare sullo schermo.

Nel comando di selezione della scansione sono sempre visibili fino a tre scansioni. Toccare i comandi delle frecce su entrambi i lati del comando di selezione della scansione per visualizzare altre scansioni.

10.2 Modifica delle scansioni

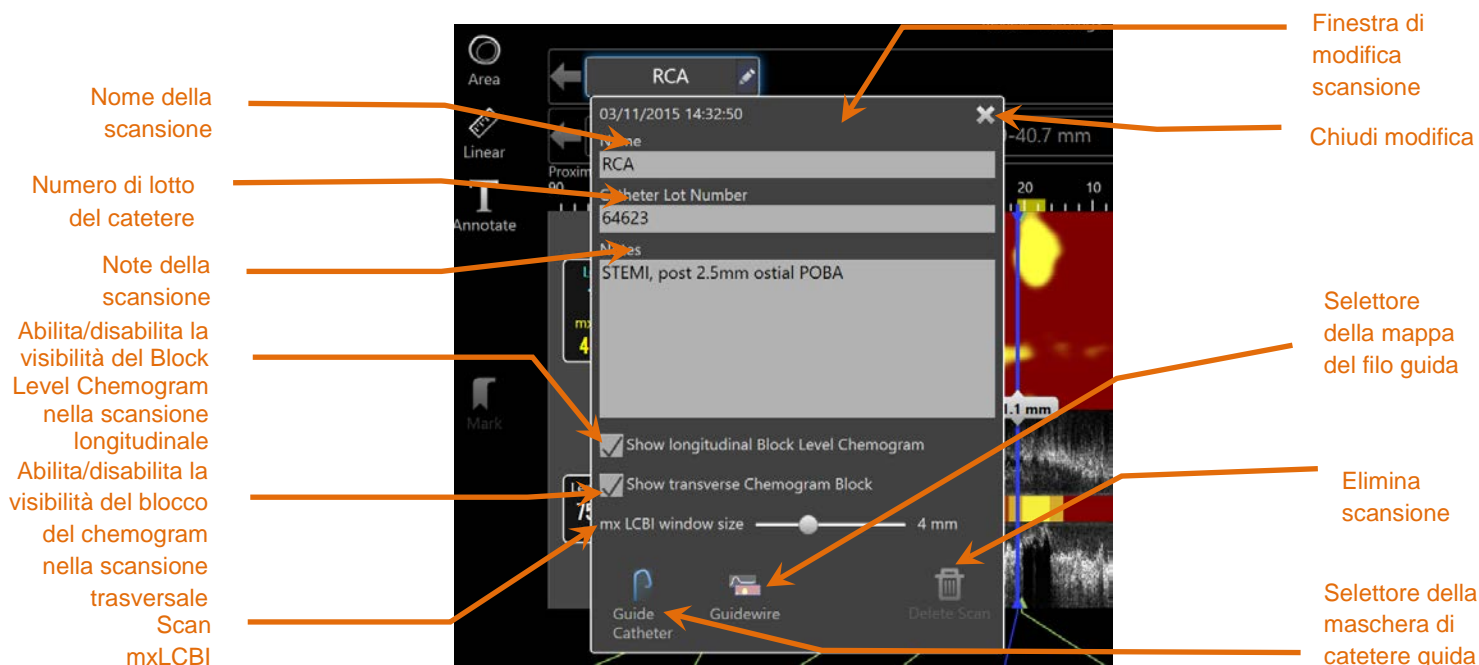




Figura 10-2. Finestra di modifica scansione aperta per "RCA".

Le informazioni relative alla scansione possono essere modificate per fornire ulteriori dettagli e facilitare una selezione successiva.

Toccare il pulsante **Edit** (Modifica), , sulla scansione selezionata per visualizzare la finestra di modifica della scansione. Toccare la "X", , oppure un punto al di fuori della finestra di modifica della scansione, per chiudere e salvare tutte le modifiche.

10.2.1 Nome della scansione

Il nome della scansione può essere personalizzato in modo che rifletta le informazioni relative alla scansione. Può includere nomi di arterie, ubicazioni o periodi di tempo (ossia "pre" o "post"). Il nome può essere impostato inserendo informazioni nel campo Name (Field).

Il nome di questa scansione viene visualizzato nella directory delle procedure e delle scansioni complete, nonché nei file e nei report DICOM.

NOTA: Utilizzare il filtro nella fase di selezione della modalità di revisione per cercare i nomi della scansione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 12.1.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

10.2.2 Numero di lotto del catetere

Ciascuna scansione viene raccolta con un catetere che dispone di un numero di lotto di produzione associato. Queste informazioni possono essere registrate indipendentemente per ciascuna scansione inserendo il valore dalla confezione del catetere nel campo Catheter Lot Number (Numero di lotto del catetere) nella finestra di modifica della scansione.

NOTA: Inserire il numero di lotto del catetere durante la fase di impostazione per compilare automaticamente questo campo mentre vengono registrate scansioni.

NOTA: Utilizzare il filtro nella fase di selezione della modalità di revisione per cercare i numeri di lotto del catetere. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 12.1.

10.2.3 Nota della scansione

Le note sulle scansioni raccolte possono essere registrate nel campo Notes (Note) della finestra di modifica della scansione.

NOTA: Utilizzare il filtro nella schermata della fase di selezione in modalità di revisione per cercare importanti dettagli sulla scansione registrati nelle note della scansione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 12.1.

10.2.4 Visibilità del Block Level Chemogram nella scansione longitudinale

La visibilità del Block Level Chemogram all'interno della schermata dell'IVUS longitudinale può essere abilitata o disabilitata selezionando questa casella. L'opzione selezionata sarà valida solo per la scansione in corso.

NOTA: È possibile preimpostare la visibilità di default del Block Level Chemogram per tutte le nuove scansioni nelle Impostazioni di sistema. Consultare la sezione 13.6 **Visualizzazione delle scansioni**.

NOTA: Questa impostazione può essere modificata in modo rapido posizionando il mouse sul Block Level Chemogram e premendo il tasto destro per modificare l'impostazione come desiderato.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

10.2.5 Visibilità del blocco del chemogram nella scansione trasversale

La visibilità di un singolo blocco del chemogram all'interno della schermata dell'IVUS trasversale può essere abilitata o disabilitata selezionando questa casella. L'opzione selezionata sarà valida solo per la scansione in corso.

NOTA: È possibile preimpostare la visibilità di default del blocco del chemogram per tutte le nuove scansioni nelle Impostazioni di sistema. Consultare la sezione 13.6 **Visualizzazione delle scansioni**.

NOTE: Questa impostazione può essere modificata in modo rapido posizionando il mouse sul blocco del chemogram e premendo il tasto destro per modificare l'impostazione come desiderato.

10.2.6 Scan mxLCBI

Le dimensioni della finestra dell'LCBI massimo possono essere modulate sullo scan invece del valore predefinito. Utilizzare lo slider per regolare la finestra utilizzata per calcolare il mxLCBI da 1mm a 10mm.

NOTA: Il valore predefinito per tutti i nuovi scan può essere stabilito nelle Configurazioni del sistema. Consultare la Sezione 13.6.5 **Dimensioni della finestra dell'LCBI massimo**.

10.2.7 Selettore del catetere guida



AVVERTENZA

L'imaging all'interno del catetere guida deve essere ridotto al minimo per ottimizzare i risultati del chimigramma.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

Nella finestra di modifica della scansione, utilizzare il comando selettore della maschera di catetere guida per alternare la visibilità della maschera di catetere guida sul chemogram, nella mappa del filo guida, nell'IVUS longitudinale e nel Block Level Chemogram.

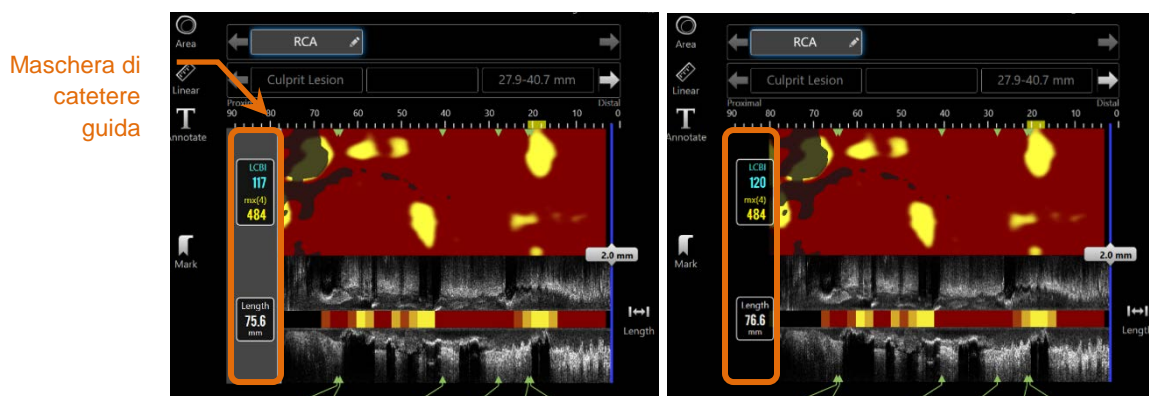


Figura 10-3. Modifica della scansione con maschera di catetere guida abilitata (sinistra). Modifica della scansione con maschera di catetere guida disabilitata (destra).

10.2.8 Selettore della mappa del filo guida

Nella finestra di modifica della scansione, utilizzare il comando selettore della mappa del filo guida per alternare la visibilità della mappa del filo guida e del chemogram. Quando la mappa del filo guida è visibile, il comando viene visualizzato in blu.



Figura 10-4. Finestra di modifica della scansione con il selettore della mappa del filo guida abilitato (sinistra); il chemogram è nascosto e la mappa del filo guida è visibile (destra).

10.2.9 Elimina scansione

Le singole scansioni possono essere eliminate tramite la finestra di modifica della scansione. L'utente riceverà una richiesta di conferma.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

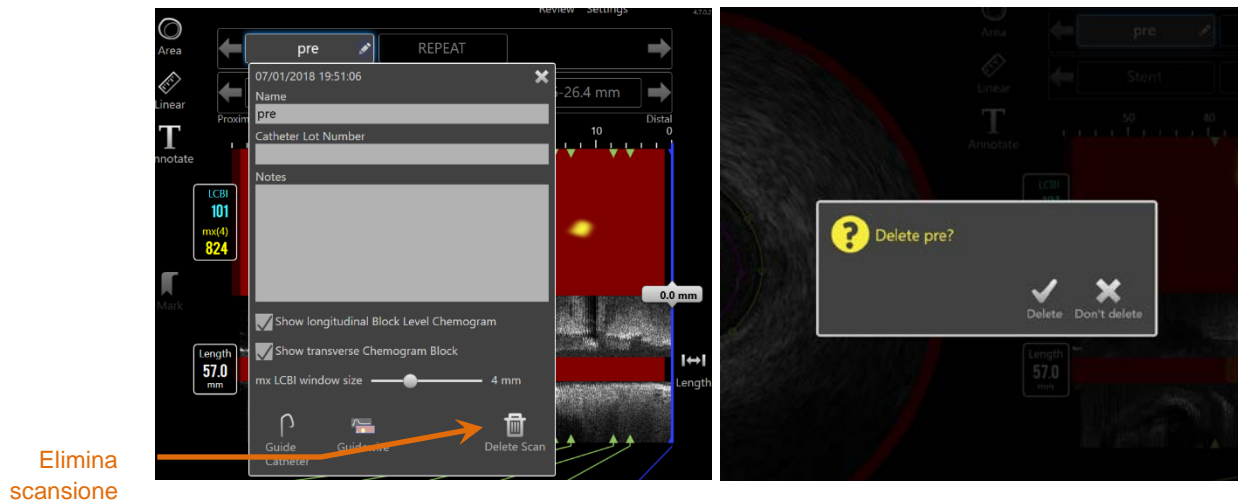


Figura 10-5. Comando Delete Scan (Elimina scansione) nella finestra di modifica della scansione (sinistra) e richiesta di conferma (destra).



Dopo la conferma da parte dell'utente, non è possibile annullare l'eliminazione di una scansione.

10.3 Navigazione nella scansione

La scansione selezionata può essere analizzata utilizzando diversi comandi.

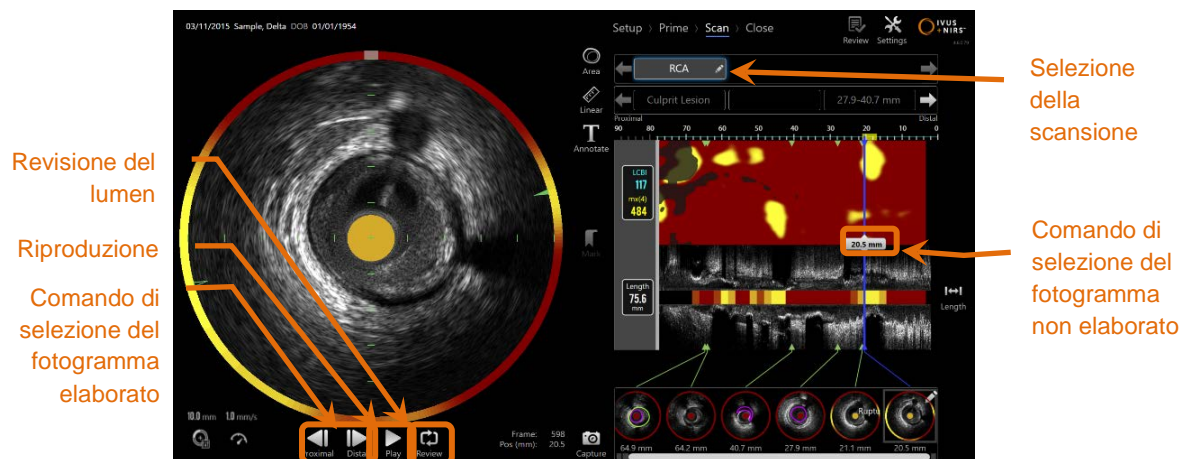




Figura 10-6. Fase di scansione della modalità di acquisizione con i comandi di riproduzione e selezione della scansione evidenziati.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

10.3.1 Riproduzione automatica

Toccare il comando **Play/Pause** (Riproduci/Pausa),  / , situato sotto l'immagine dell'IVUS trasversale per scorrere automaticamente tra i fotogrammi registrati nell'ordine in cui sono stati memorizzati.

La riproduzione avviene a circa 16 fotogrammi al secondo per registrazione Live IVUS oppure 30 fotogrammi al secondo per registrazione di retrazione automatica.

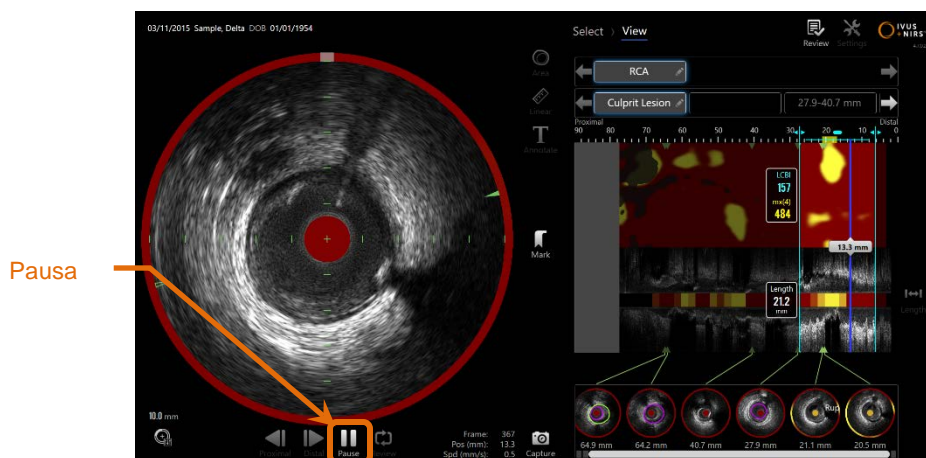


Figura 10-7. Fase di scansione della modalità di acquisizione durante una riproduzione automatica con il comando Pausa evidenziato.

La pausa interrompe la riproduzione sul fotogramma visualizzato. Il riavvio della riproduzione inizierà lo scorrimento dei fotogrammi a partire dall'ultimo di questi ultimi visualizzato.

NOTA: Quando si raggiunge l'ultimo fotogramma registrato, il ciclo di riproduzione riparte dal primo fotogramma della serie.

NOTA: Quando si seleziona una regione, la riproduzione automatica riproduce in serie i fotogrammi nella regione selezionata.

10.3.2 Revisione del lumen

Come supporto nell'esecuzione delle misurazioni e nella revisione di singoli fotogrammi, la revisione del lume riproduce una breve serie di fotogrammi per evidenziare le differenze nell'aspetto dell'IVUS del vaso fisso e della placca dal movimento rilevato al flusso sanguigno.

Commutare la revisione del lumen toccando il comando Lumen Review (Revisione

lume), , a destra del pulsante di riproduzione automatica.


Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni


NOTA: Regolare la durata o l'intervallo del Lumen Review entro le configurazioni del sistema. Consultare la Sezione 13.6.2 **Intervallo di revisione del lumen dei fotogrammi.**

10.3.3 Riproduzione manuale

La scansione selezionata può essere riprodotta anche manualmente. Toccare e tenere

premuto il comando di selezione del fotogramma elaborato, , per riprodurre lentamente la scansione nella direzione desiderata. In questo modo, la riproduzione si arresta dopo l'ultimo fotogramma per la scansione o regione selezionata e non riprodurrà in serie i fotogrammi selezionati.

NOTA: Tenere premuto il comando di selezione del fotogramma

elaborato distale, , per riprodurre i fotogrammi selezionati nell'ordine inverso della raccolta.

10.3.4 Selezione del fotogramma


10.3.4.1 *Selezione del fotogramma non elaborato*

Trascinare il controllo di Selezione del Fotogramma non elaborato tra il Chemogram o il Guidewire Detection Map [Mappa di rilevamento del filo guida] e l'IVUS longitudinale sulla linea blu per aggiornare rapidamente il fotogramma visualizzato.

NOTA: Il trascinamento del comando di selezione del fotogramma non elaborato è una riproduzione con velocità variabile.

10.3.4.2 *Selezione del fotogramma elaborato*

Toccare i comandi di selezione del fotogramma elaborato prossimale o del fotogramma

elaborato distale, , per modificare il fotogramma visualizzato in incrementi di un fotogramma.

NOTA: Con il cursore sul chemogram, sulla mappa del filo guida, l'IVUS trasversale o l'IVUS longitudinale, far scorrere la rotellina del

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

mouse per modificare il fotogramma visualizzato in incrementi di un fotogramma.

10.4 Contrassegni

Durante e dopo il completamento della scansione, è possibile creare dei contrassegni. Durante l'acquisizione della scansione, premere o toccare i comandi **Mark**



(Contrassegno), o **Mark**. Durante la revisione, navigare nel fotogramma desiderato e toccare "Mark" sullo schermo.

NOTA: È possibile creare un solo contrassegno per fotogramma.

NOTA: In una singola scansione è possibile creare fino a 30 contrassegni.

NOTA: Sulla schermata è possibile visualizzare completamente fino a cinque contrassegni per volta.

NOTA: Il completamento di una misurazione dell'IVUS trasversale o l'annotazione su fotogramma comporta la creazione automatica di un contrassegno per il fotogramma.

NOTA: Utilizzare il pulsante Mark [Contrassegno] durante le fasi Setup [Configurazione] e Prime [caricamento] per procedere alla fase successiva di modalità d'acquisizione.

NOTA: Durante l'acquisizione delle immagini, la pressione del pulsante Mark [Contrassegno] reimposterà a 0mm la distanza percorsa.

La posizione relativa di un contrassegno nella scansione è indicata da piccoli triangoli di colore verde sul chemogram e sull'IVUS longitudinale. Quando il contrassegno è selezionato, l'indicatore del fotogramma attualmente visualizzato collegherà i triangoli.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

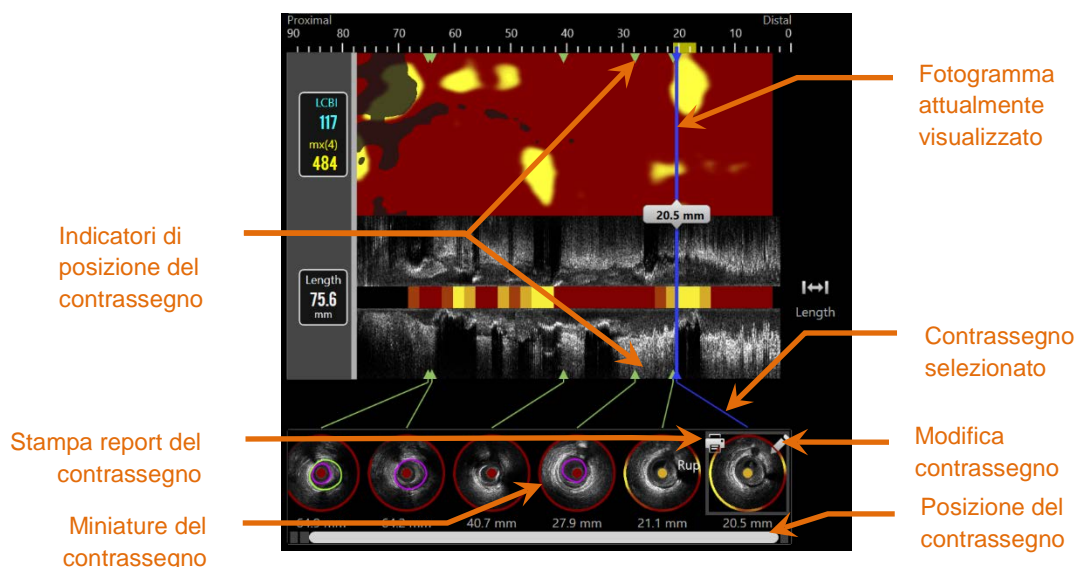



Figura 10-8. Le posizioni del contrassegno sono mostrate da indicatori a triangolo di colore verde sul chemogram e sull'IVUS longitudinale e con una miniatura visiva che mostra il contenuto del fotogramma.


10.4.1 Selezione del contrassegno

Per ciascun contrassegno posizionato sarà creata un'immagine della miniatura del contrassegno. L'immagine della miniatura è il comando per selezionare la posizione contrassegnata per una revisione successiva. Inoltre, fornisce una rappresentazione visiva del contenuto nella posizione del fotogramma.

Toccare l'immagine del contrassegno desiderato per aggiornare il display e mostrare il fotogramma nel display dell'IVUS trasversale.

10.4.2 Modifiche del contrassegno

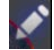I contrassegni possono essere eliminati o annotati. Toccare il pulsante **Edit** (Modifica), , sul contrassegno selezionato per aprire la finestra di modifica della scansione.

Toccare la "X", , oppure un punto al di fuori della finestra di modifica del contrassegno per chiudere la finestra, salvando tutte le modifiche.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

10.4.2.1 Annotazioni del contrassegno

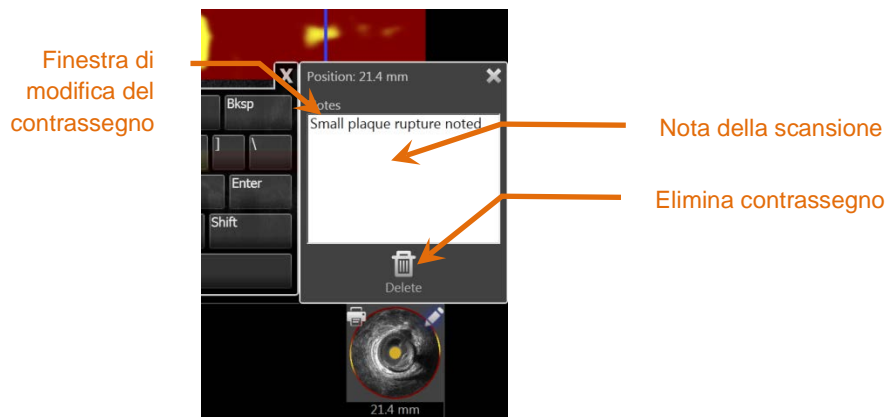
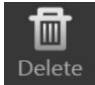


Figura 10-9. Nota del contrassegno inserita nella finestra di modifica del contrassegno.

Le note sul contenuto di un fotogramma possono essere registrate nel campo Notes (Note) della finestra di modifica del contrassegno.

10.4.2.2 Eliminazione


I contrassegni possono essere eliminati utilizzando il comando **Delete** (Elimina), , nella finestra di modifica del contrassegno.

NOTA: L'eliminazione di un contrassegno non può essere annullata.

NOTA: L'eliminazione di un contrassegno con misurazioni o annotazioni su fotogrammi richiede una conferma.

10.4.3 Stampa

I report del contrassegno sono sintetizzati nei riepiloghi di un'unica pagina della procedura incentrata sui risultati all'interno del fotogramma selezionato.

Sul contrassegno selezionato, toccare il pulsante **Print** (Stampa), , per inviare un report di 1 pagina alla stampante configurata per impostazione predefinita per il sistema.

10.5 Misurazioni

Il sistema di imaging Makoto fornisce comandi con la fase di scansione per eseguire misurazioni sulla visualizzazione trasversale e sulle visualizzazioni longitudinali (chemogram e IVUS longitudinale).

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

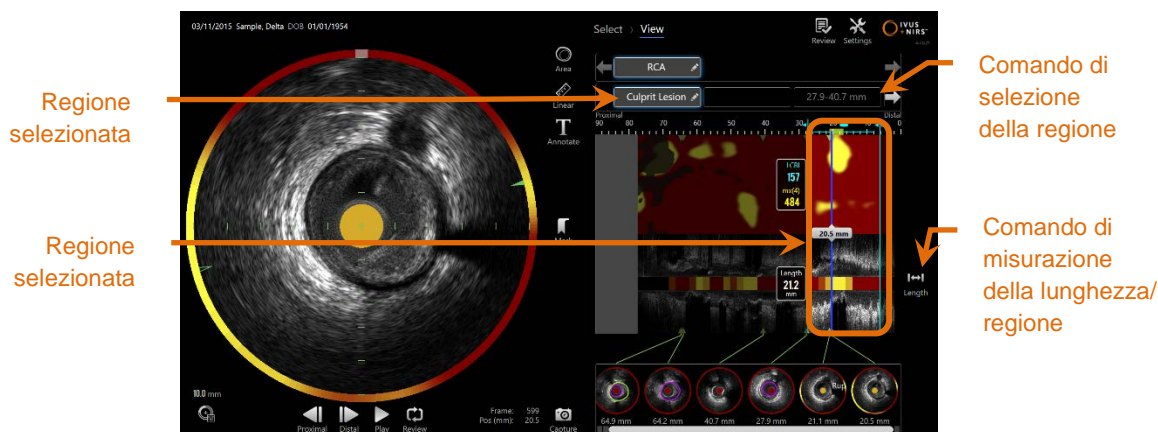


Figura 10-10. Fase di visualizzazione con una regione selezionata nella scansione "RCA".

10.5.1 Misurazioni di lunghezza, stenosi dell'area del lumen e LCBI

Le misurazioni di lunghezza, stenosi dell'area del lumen e LCBI sono realizzate sulla visualizzazione dell'IVUS longitudinale e chemogram tramite la creazione di regioni.

10.5.1.1 Creazione della regione

Le regioni sono sottosegmenti di una scansione rilevante per l'operatore o il medico. Tali segmenti possono includere lesioni, normali segmenti, stent, ecc.

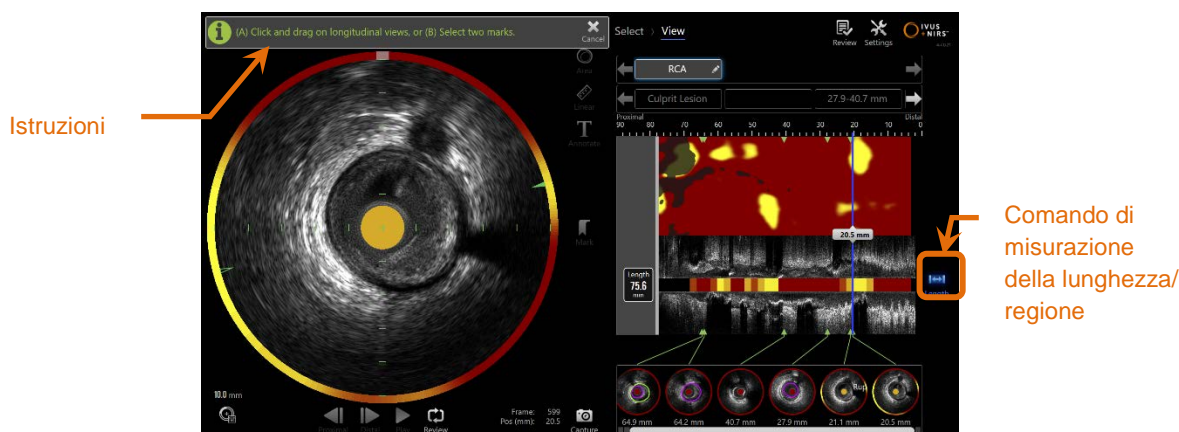



Figura 10-11. Fase di visualizzazione con creazione di Regione in corso. Osservare le istruzioni sullo schermo una volta ultimata la regione.

Le regioni vengono create toccando il comando della lunghezza, , quindi indicando una posizione di avvio e fine della regione sull'IVUS longitudinale o sul chemogram. La regione può essere definita nei due modi seguenti:

(A) toccando e mantenendo la posizione iniziale desiderata, quindi trascinandola nella posizione finale desiderata;

Makoto Intravascular Imaging System™


Manuale di istruzioni

oppure

(B) toccando le posizioni di inizio e di fine del contrassegno dalle miniature di quest'ultimo.

NOTA: Utilizzare i contrassegni per impostare l'inizio o la fine di una regione desiderata con una migliore precisione.

Dopo aver creato la regione, le aree delle visualizzazioni longitudinali all'esterno della regione sono meno nitide e viene visualizzato un comando di selezione della regione sotto i comandi di selezione della scansione.

NOTA: Utilizzare il comando di riproduzione, , per visualizzare interamente la regione selezionata.

L'LCBI e i risultati sono presentati a sinistra della regione del chemogram e la lunghezza è presentata a sinistra dell'IVUS longitudinale.

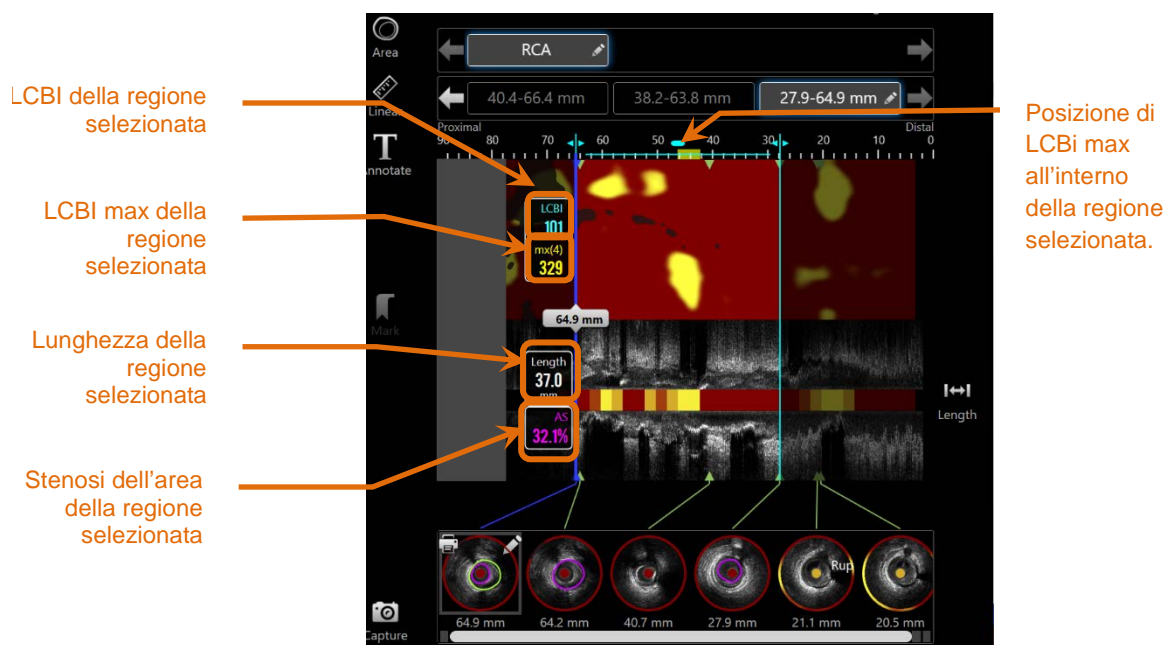


Figura 10-12. Fase di visualizzazione con una regione selezionata.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

10.5.1.2 *Modifiche di regione*

Le regioni create col chemogram possono essere regolate quanto a posizionamento entro lo scan, o possono essere modificate le rispettive posizioni iniziali e finali.

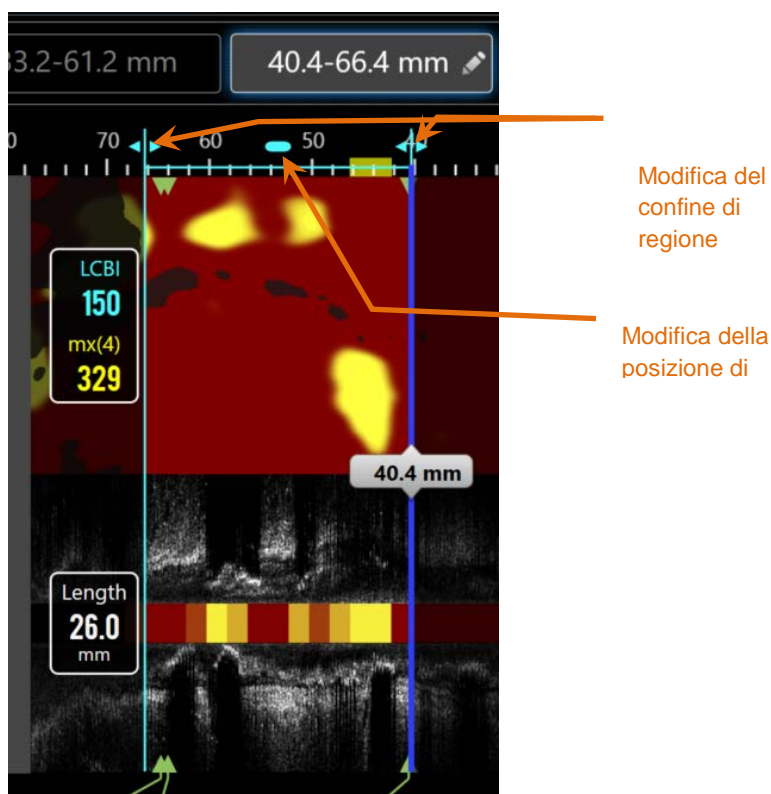


Figura 10-13. Controlli delle Modifiche di Regione

Trascinare la Posizione di regione per muovere la regione definita senza alterare la lunghezza della regione.

Trascinare i confini prossimali o distali della regione per effettuare una correzione grezza della fine selezionata della regione. La lunghezza della regione sarà automaticamente aggiornata. Gli LCBI saranno aggiornati una volta ultimate le correzioni.

NOTA: Posizionare il cursore del mouse sui controlli di modifica dell'inizio o fine posizione e utilizzare la rotellina del mouse per effettuare piccole correzioni alla posizione della regione.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

NOTA: Fissare la regione per evitare correzioni accidentali. Consultare la Sezione 10.5.1.7 **Region Locking [Fissazione della Regione]**.

10.5.1.3 *Lunghezza, LCBI e LCBI max*

Al completamento della creazione della regione, sono presentati tre risultati di misurazione relativi alla regione.

Lunghezza:	si tratta della distanza in millimetri (mm) tra la posizione iniziale e finale della regione.
LCBI:	si tratta dell'indice di carico del core lipidico della regione. L'LCBI è un rapporto di segnali lipidici positivi con i pixel validi totali nella regione selezionata su una scala da 0 a 1000.
mx(4):	si tratta dell'indice di carico del core lipidico massimo delle dimensioni fisse di una finestra all'interno dei bordi della regione. Le dimensioni predefinite della finestra sono pari a 4 mm.

10.5.1.4 *Stenosi dell'area del lumen (% AS)*

La stenosi dell'area del lumen (AS) può essere calcolata quando si crea una regione utilizzando due contrassegni che contengono ciascuno una misurazione dell'area che il sistema ha identificato come lumen.

NOTA: Aggiungere le misure del lumen al fotogramma iniziale e finale di una regione esistente per ottenere la stenosi dell'area del lumen per la regione.

10.5.1.5 *Selezione e deselezione*

Selezionare le regioni toccando il pulsante corrispondente nel comando della selezione della regione. I risultati di visualizzazione longitudinale, lunghezza, LCBI e LCBI max si aggiorneranno di conseguenza.

Deselezionare le regioni premendo nuovamente il pulsante della regione corrispondente o selezionare la scansione corrente o un'altra scansione.

NOTA: Il tentativo di creazione di una nuova regione deselezionerà la regione corrente.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

10.5.1.6 Annotazione della regione

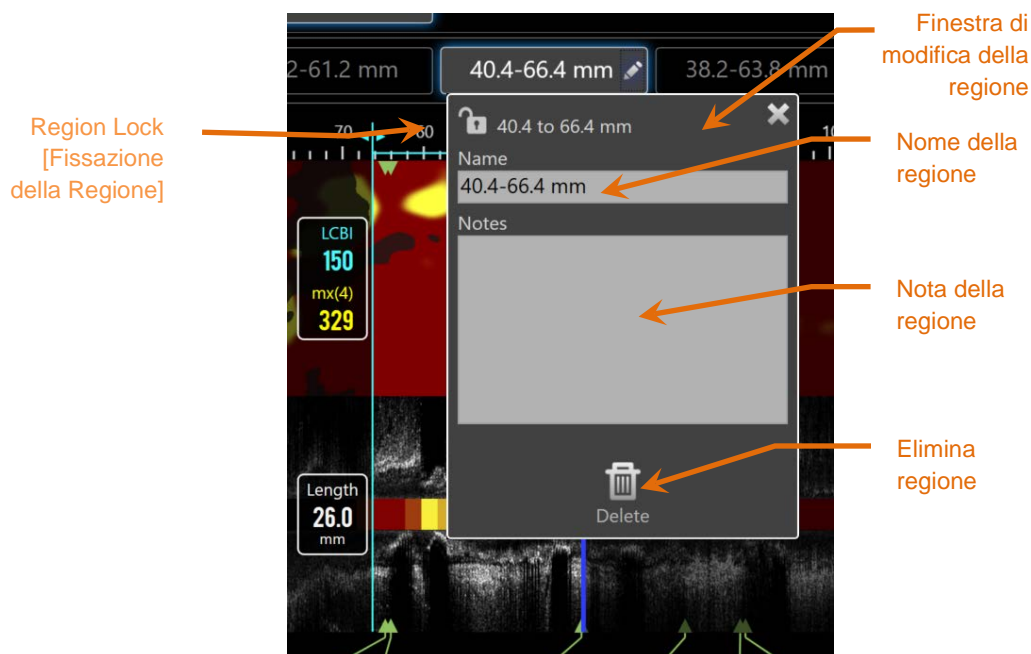






Figura 10-14. Nome della regione inserito nella finestra di modifica della regione.

Toccare il pulsante **Edit** (Modifica), , sul pulsante della regione selezionata per aprire la finestra di modifica della regione. Toccare il campo desiderato per aggiornarne i contenuti.

Toccare la "X", , oppure un punto al di fuori della finestra di modifica della regione, per chiudere e salvare tutti gli inserimenti.

10.5.1.7 Region Locking [Fissazione della Regione]

Toccare il pulsante Edit [Modifica], , sul pulsante della Regione Selezionata per aprire la finestra Region Edit [Modifica della Regione]. Toccare l'icona Region Lock


[Fissazione della Regione],  , per gestire l'abilità di regolare la posizione della regione e ultimare la posizione della regione.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

10.5.1.8 *Eliminazione della regione*

Toccare il pulsante Edit (Modifica), , sul pulsante della regione selezionata per

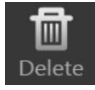aprire la finestra di modifica della regione. Toccare il comando di eliminazione, , per rimuovere la regione.

NOTA: L'eliminazione di una regione non può essere annullata.

10.5.2 **Misurazione su fotogramma**


Le misurazioni possono essere eseguite su qualsiasi fotogramma dell'IVUS trasversale per chiarire o quantificare il contenuto del fotogramma.

NOTA: Il completamento di una misurazione su fotogramma comporta la creazione automatica di un contrassegno per il fotogramma.

NOTA: Il completamento di una misurazione su un fotogramma aggiornerà l'immagine della miniatura del contrassegno.

NOTA: Quando è attivato, toccare lo strumento per abbandonare la misurazione o l'annotazione della regione in corso.

10.5.2.1 *Misurazione dell'area*

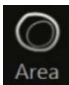Lo strumento di misurazione dell'area, , può essere utilizzato per quantificare l'area e i diametri minimo e massimo delle caratteristiche dell'immagine.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

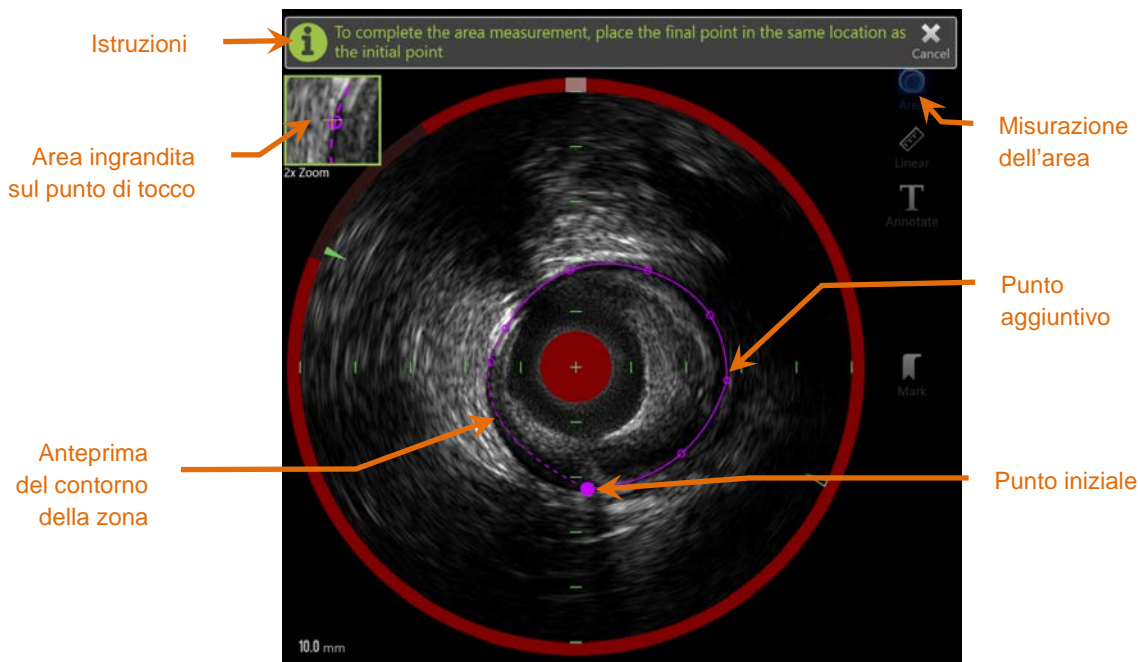


Figura 10-15. Fase Scan con la Misurazione dell'area abilitata e in corso. È importante notare che il primo punto apposto appare come un cerchio colorato più grande.




Toccare lo strumento di misurazione dell'area, **Area**, per avviare la misurazione. L'icona diventa blu quando è attiva. Le istruzioni vengono visualizzate sull'immagine dell'IVUS trasversale come guida per completare la misurazione.

Toccare l'immagine dell'IVUS trasversale per posizionare i punti lungo la funzione di interesse per iniziare a definire l'area. Continuare ad aggiungere punti finché l'area non viene definita.

NOTA: Una volta aggiunto il terzo punto per definire l'area, apparirà un'anteprima dell'area con una linea tratteggiata. Questo illustrerà come appare l'area se si tocca o clicca sul punto iniziale per completare l'area.

NOTA:

Toccare **Cancel** (Annulla), , nelle istruzioni su schermo per abbandonare la misurazione in corso.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni



Figura 10-16. Misurazione dell'area completata e risultati presentati.

Toccare il primo punto per completare la misurazione e presentare i risultati. Per ciascuna area completata, l'area inter-sezione con diametri minimo e massimo sarà presentata nell'angolo superiore sinistro dell'immagine dell'IVUS trasversale.

NOTA: Toccare il risultato della misurazione per visualizzare i diametri minimo e massimo nell'immagine.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

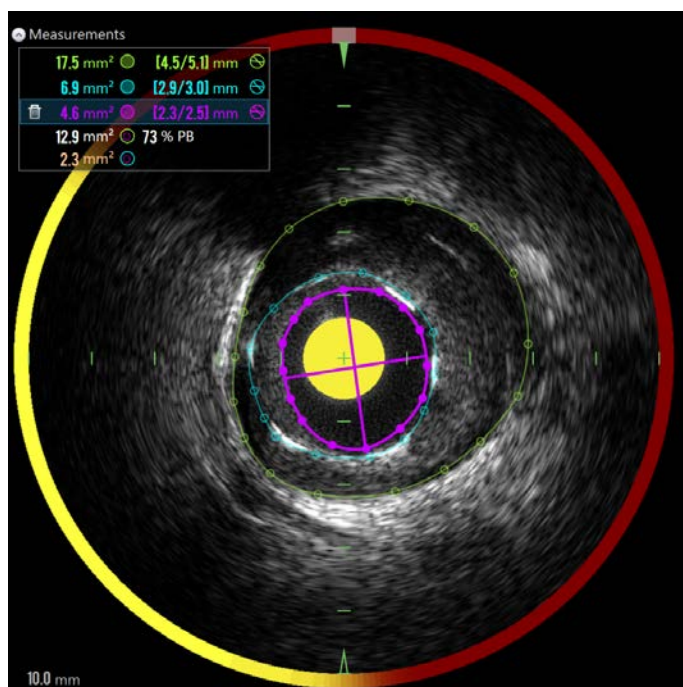


Figura 10-17: I profili e i risultati codificati con colori sono presentati quando le aree vengono tracciate completamente all'interno di un'altra area. Il bordo del lumen è selezionato e vengono mostrate le posizioni del diametro minimo e massimo.

Se è stato tracciato più di un bordo dell'area, i risultati saranno codificati con colori.

NOTA: Su ciascun fotogramma possono essere tracciate fino a tre aree.

NOTA: Ogni risultato di misurazione dell'area ha lo stesso colore del relativo profilo. Ciascuna icona dell'area calcolata, ad esempio l'area della placca, ha lo stesso colore del profilo utilizzato per definire il risultato dell'area calcolata.

NOTA: Se un'area è contenuta completamente in una seconda area sullo stesso fotogramma, il sistema Makoto™ ne assegna automaticamente una per rappresentare il lumen e una per rappresentare l'EEM, mentre vengono calcolati un'area della placca e un carico della placca (% BP).

NOTA: Se si tracciano tre aree contenute l'una nell'altra sullo stesso fotogramma, area 1 tracciata completamente all'interno dell'area 2 e area 2 tracciata completamente all'interno dell'area 3, il sistema Makoto™ assegna automaticamente l'area più esterna per rappresentare l'EEM, la parte più interna per rappresentare il lumen e quella centrale per rappresentare lo stent. Tra l'EEM e il lumen vengono calcolati un'area della placca e un carico della placca (% BP). Tra lo stent e il lumen viene calcolata un'ulteriore area.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

Ridimensionare o rimodellare l'area toccando i punti esistenti e trascinandoli fino al punto desiderato. Per ridefinire la forma dell'area completata, apporre ulteriori punti nella zona completata toccando e trascinando, o cliccando su- e trascinando- il contorno dell'area tra punti esistenti. I risultati presentati saranno aggiornati quando si completa la modifica.

NOTA: Trascinare i punti di misurazione per aprire l'ingrandimento locale e migliorare la visualizzazione dell'immagine accanto al cursore o sotto il dito dell'operatore.

10.5.2.2 *Misurazione lineare*

Le misurazioni lineari possono essere realizzate sull'immagine dell'IVUS trasversale per misurare le funzioni nell'immagine, quali diametri o spessori.

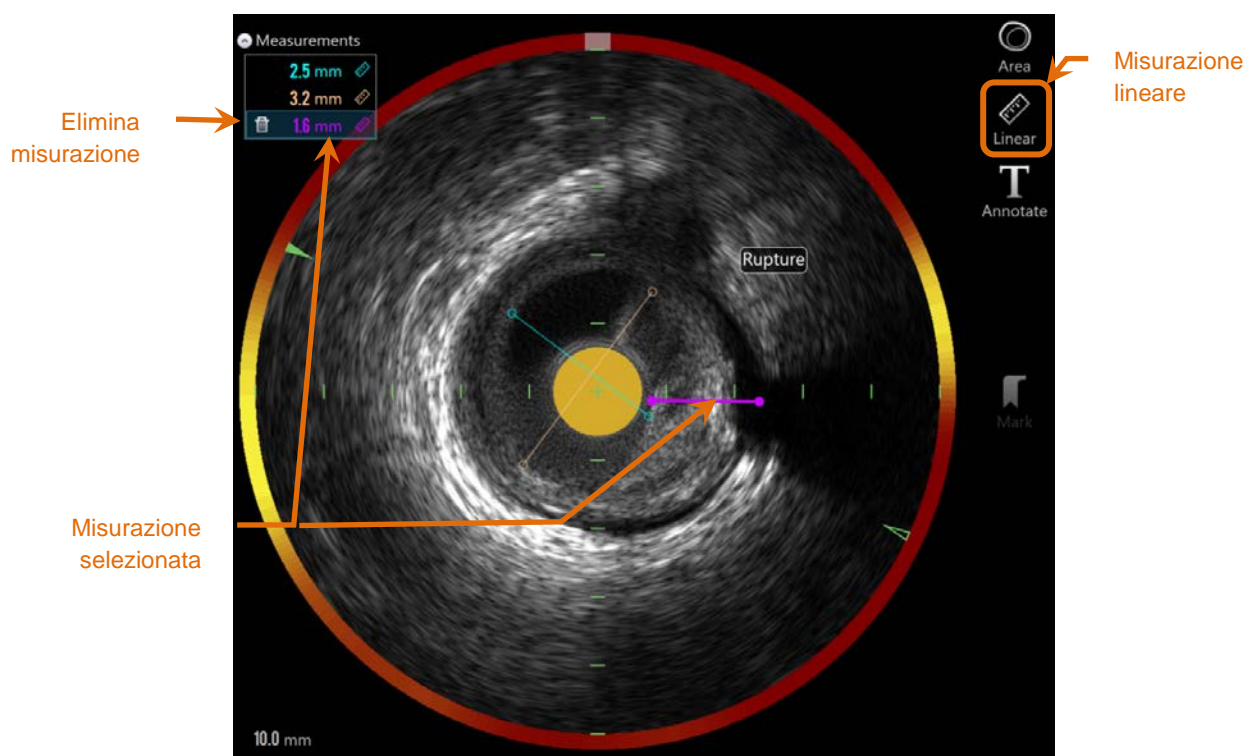



Figura 10-18. Misurazione lineare completata. Sono state effettuate quattro misurazioni lineari su questa sezione.

Toccare lo strumento di misurazione **Linear** (Lineare), , per avviare la misurazione. L'icona diventa blu quando è attiva. Le istruzioni vengono visualizzate sull'immagine dell'IVUS trasversale come guida per completare la misurazione.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Toccare il punto iniziale della funzione da misurare nell'immagine del IVUS trasversale. Toccare la posizione finale della funzione per completare la misurazione. La misurazione lineare sarà visualizzata sull'immagine dell'IVUS trasversale con la distanza tra i due punti in millimetri.

NOTA: Quando si utilizza il mouse o trascina il punto finale, l'anteprima della linea e distanza appariranno prima d'apporre il punto finale.

NOTA: Su ciascun fotogramma possono essere tracciate fino a sei misurazioni lineari.

Trascinare i punti iniziali o finali per regolare la misurazione.

10.5.2.3 *Eliminazione delle misurazioni su fotogramma*

Per eliminare le singole misurazioni su fotogramma, selezionare il risultato della misurazione per iniziare.

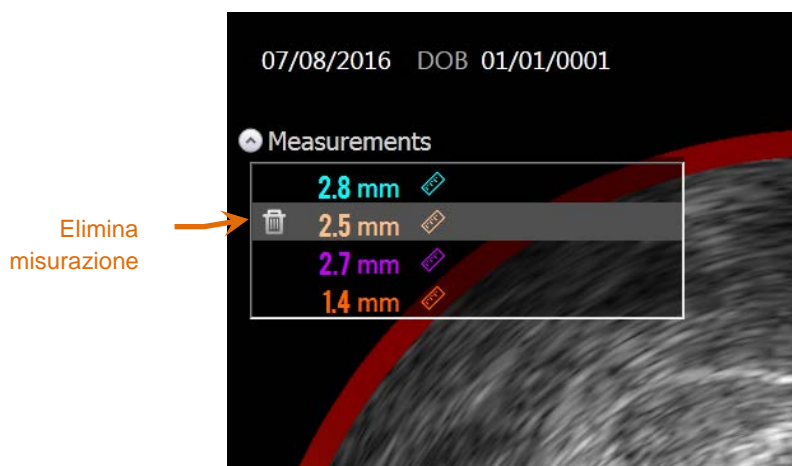




Figura 10-19. Contrassegno con una misurazione lineare selezionata. Notare l'opzione per eliminare la misurazione e il risultato.

Quando si selezionano i risultati della misurazione, un comando di eliminazione, , viene visualizzato sul risultato selezionato. Toccando il comando di eliminazione, , si cancella la misurazione e il risultato dalla scansione.

NOTA: L'eliminazione delle misurazioni non può essere annullata.

NOTA: L'eliminazione delle singole misurazioni non richiede conferma.

Makoto Intravascular Imaging System™


Manuale di istruzioni

NOTA: Eliminare il contrassegno per cancellare TUTTE le misurazioni da un fotogramma in una singola fase.

10.6 Annotazione su fotogramma

Oltre alle misurazioni, i commenti possono essere creati direttamente sull'immagine dell'IVUS trasversale.



Toccare il comando dell'annotazione su fotogramma, , per iniziare a creare commenti su fotogramma. Determinare la posizione in cui deve essere visualizzata la nota; imposterà il bordo sinistro della nota. Toccare <Enter> (Invio) sulla tastiera virtuale per completare l'annotazione.

NOTA: Il completamento di un'annotazione su fotogramma comporta la creazione automatica di un contrassegno per il fotogramma.

NOTA: Le annotazioni su fotogramma completate possono essere tracciate in nuove posizioni sul fotogramma corrente.

NOTA: Il completamento di un'annotazione su fotogramma aggiornerà l'immagine della miniatura del contrassegno.

Per eliminare un'annotazione su fotogramma, toccare l'annotazione per



selezionarla, quindi toccare il comando dell'eliminazione, .

10.7 Acquisizione di schermata

Le immagini dell'intera schermata possono essere registrate durante le fasi di scansione e visualizzazione. Questa immagine acquisirà tutto il contenuto della schermata, nonché i pulsanti e i comandi.

Durante la revisione di una scansione, navigare nel fotogramma desiderato utilizzando i comandi di regolazione del fotogramma elaborato o non elaborato.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

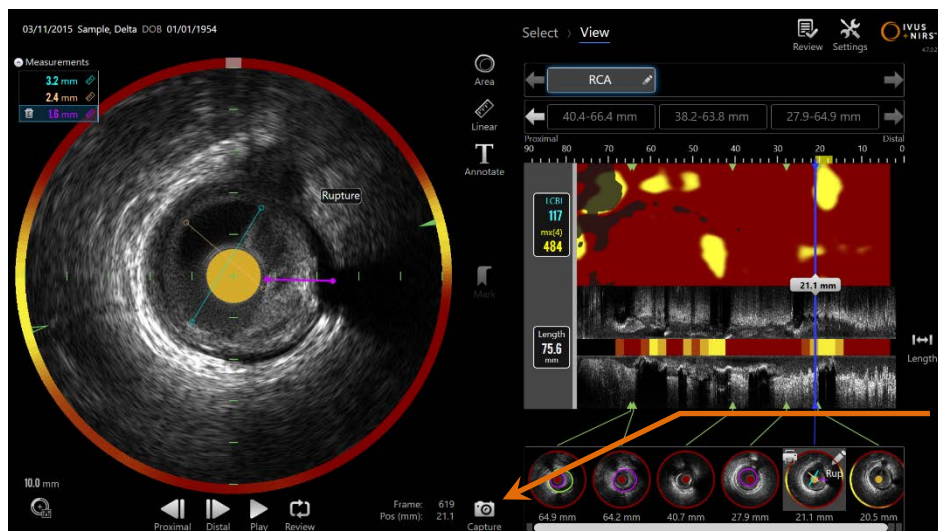


Figura 10-20. La fase di scansione della modalità di acquisizione con il comando dell'acquisizione della schermata indicato.

Toccare il comando di acquisizione, , per registrare un'immagine dell'intera schermata per un utilizzo successivo.

NOTA: È possibile registrare un limite di acquisizioni di 30 schermate per ciascuna scansione.

NOTA: Le acquisizioni della schermata possono essere stampate o eliminate dalla fase di chiusura della modalità di acquisizione o nella fase di selezione della modalità di revisione.

10.8 Impostazione di visualizzazione

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ fornisce diversi comandi per ottimizzare il layout di visualizzazione e la qualità delle immagini dell'IVUS renderizzato.

10.8.1 Rotazione dell'IVUS longitudinale

L'immagine dell'IVUS longitudinale è creata dai dati dell'immagine insieme all'asse contrassegnato nell'immagine dell'IVUS trasversale. L'asse contrassegnato nell'immagine dell'IVUS trasversale è identificato dai triangoli aperti e solidi sull'asse. Il triangolo solido sull'asse identifica la porzione dell'immagine che sarà tracciata nella metà superiore dell'IVUS longitudinale.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

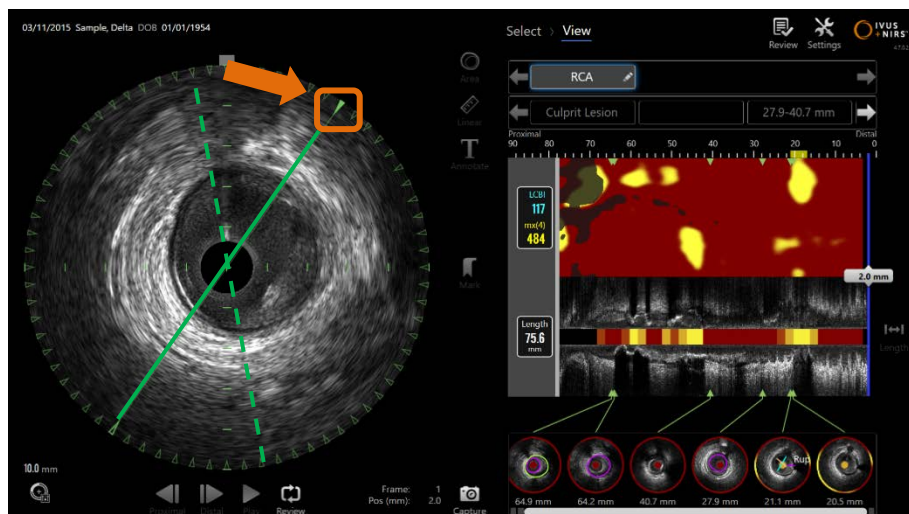


Figura 10-21. Rotazione dell'IVUS longitudinale. La linea verde tratteggiata illustra il punto in cui l'asse dell'IVUS longitudinale è stato avviato e la linea piena illustra il punto in cui l'asse si trova in quel momento. In questo esempio le linee sono migliorate per scopi illustrativi.

Per regolare i dati visualizzati con l'IVUS longitudinale, trascinare il triangolo colorato sull'asse evidenziato verso una nuova posizione sulla circonferenza dell'immagine dell'IVUS trasversale.

NOTA: La modifica di questa visualizzazione dell'IVUS longitudinale non influirà sulle regolazioni apportate alla rotazione del chemogram.

10.8.2 Rotazione del chemogram

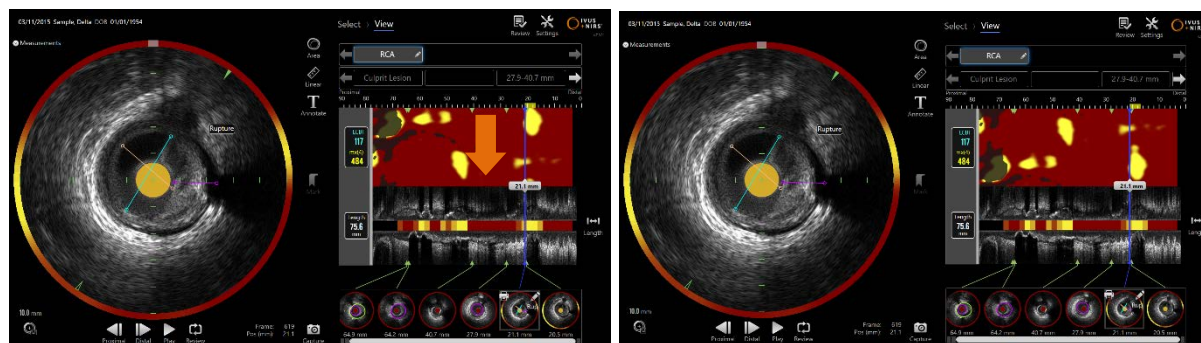


Figure 10-22 I chemogram possono essere ruotati per rimuovere gli accumuli lipidici dal bordo del chemogram ai fini di una più agevole visualizzazione e interpretazione.

L'asse verticale del chemogram è in dimensione continua a 360 gradi. Ciò significa che il bordo superiore del chemogram è collegato al bordo inferiore. La posizione del taglio che consente di rappresentarlo su una mappa bidimensionale è arbitraria. Questo può causare la separazione di alcuni elementi nei bordi superiori e inferiori.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Per regolare la collocazione del taglio, toccare o cliccare sul chemogram, e trascinare in direzione verticale.

NOTA: Il sistema si ricorderà la regolazione della linea di taglio effettuata su questo chemogram e l'applicherà in futuro per le visualizzazioni delle scansioni o la generazione dei report. Le acquisizioni delle schermate non verranno modificate.

NOTA: La regolazione effettuata per questa visualizzazione del chemogram non influirà sulle regolazioni apportate all'IVUS longitudinale.

10.8.3 Rotazione dell'IVUS trasversale

L'immagine trasversale può essere ruotata per facilitare il paragone con altri scan o per aiutare l'utente a visualizzare meglio l'anatomia.

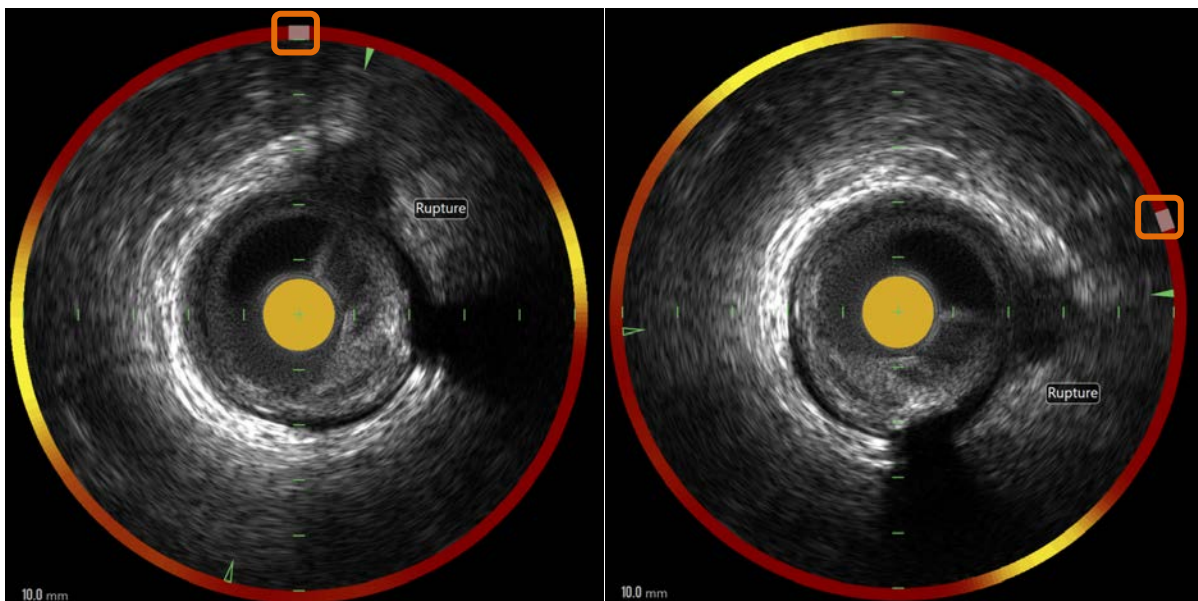


Figure 10-23. Rotazione dell'IVUS trasversale. L'immagine a sinistra mostra l'orientamento predefinito e l'immagine a destra mostra l'immagine dopo la rotazione effettuata trascinando il pulsante sull'alone del chemogram verso una nuova posizione.

Per regolare la rotazione dell'immagine trasversale, trascinare il pulsante dell'arco grigio che appare nell'alone del chemogram verso una nuova posizione.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

NOTA: L'immagine dell'IVUS trasversale e l'alone del chemogram sono collegati rotativamente. Ruotando l'immagine trasversale si ruota anche l'alone del chemogram.

NOTA: La rotazione dell'immagine trasversale viene eseguita su tutti i fotogrammi nello scan.

NOTA: La rotazione dell'immagine dell'IVUS longitudinale è relativa alla rotazione dell'IVUS trasversale, sicché regolando la rotazione dell'IVUS trasversale non si interferisce con la visualizzazione selezionata dell'IVUS longitudinale.

NOTA: La rotazione dell'IVUS trasversale apparirà nei resoconti, avi e nelle immagini DICOM generate nella Modalità Revisione.

10.8.4 Impostazioni dell'immagine trasversale

L'immagine dell'IVUS trasversale può essere regolata utilizzando il comando delle impostazioni dell'immagine. Questi comandi contengono sia una serie di comandi di base sia una serie avanzata.

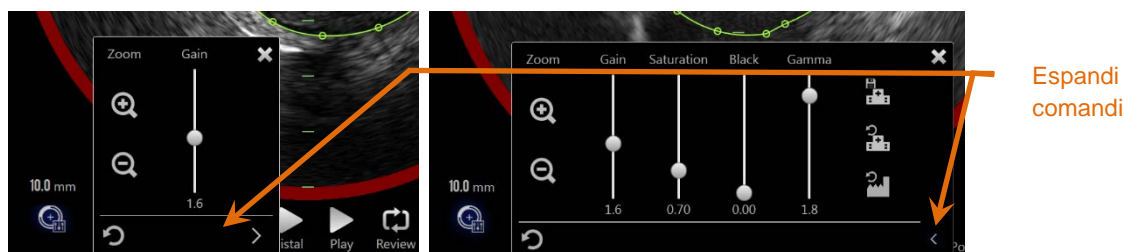




Figura 10-24. Impostazioni dell'immagine trasversale. Comandi di base, a sinistra. Comandi avanzati, a destra.

Toccare il comando delle impostazioni dell'immagine per ottenere l'accesso, quindi utilizzare il comando **Expand** (Espandi), , per raggiungere le impostazioni e le funzioni avanzate.

Toccare la "X", , oppure un punto al di fuori della finestra per utilizzare le impostazioni correnti e chiudere la finestra.

10.8.4.1 Zoom

La profondità di campo dell'IVUS trasversale può essere regolata utilizzando i comandi di ingrandimento (Zoom) accanto all'immagine dell'IVUS trasversale.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

La profondità dell'immagine dell'IVUS trasversale può essere regolata da 6 mm a 16 mm in incrementi di 2 mm.

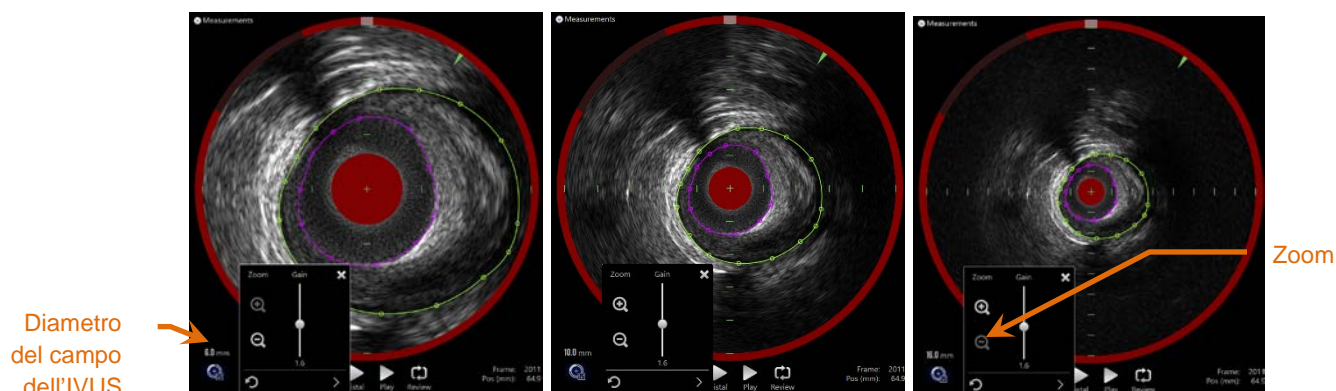




Figura 10-25. Il diametro dell'IVUS trasversale viene regolato utilizzando il comando di ingrandimento (Zoom). Diametro 6 mm, a sinistra. Diametro 10 mm, al centro. Diametro 16 mm, a destra.

Toccare i comandi di ingrandimento (Zoom) per aumentare, , o per ridurre, , l'ingrandimento dell'IVUS trasversale. Un aggiornamento corrispondente sarà eseguito sulla visualizzazione dell'IVUS longitudinale.

10.8.4.2 *Guadagno*

Trascinare il cursore per regolare il valore dell'impostazione del guadagno. L'intervallo è compreso tra 0,5 e 3,0.

Bassi valori producono un'immagine scura, mentre valori elevati creano un'immagine più brillante.

10.8.4.3 *Saturazione*

Trascinare il cursore per regolare il valore dell'impostazione della saturazione. L'intervallo è compreso tra 0,50 e 1,50.

Bassi valori producono un'immagine scura, mentre valori elevati creano un'immagine più brillante. Utilizzare in combinazione con l'impostazione del colore nero per controllare l'intervallo dinamico.

10.8.4.4 *Nero*

Trascinare il cursore per regolare il valore dell'impostazione del colore nero. L'intervallo è compreso tra 0,00 e 0,50.

Bassi valori producono un'immagine brillante, mentre valori elevati creano un'immagine più scura. Utilizzare in combinazione con l'impostazione di saturazione per controllare l'intervallo dinamico.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

10.8.4.5 *Gamma*

Trascinare il cursore per regolare il valore dell'impostazione della gamma. L'intervallo è compreso tra 0,5 e 2,6.

Bassi valori producono un'immagine più bianca, mentre valori elevati creano un'immagine più scura.

10.8.4.6 *Tornare alla schermata precedente*



Toccando il comando per tornare alla schermata precedente, le impostazioni vengono ripristinate ai valori presenti all'apertura della finestra. Non influiranno sull'impostazione di ingrandimento (Zoom).

10.8.4.7 *Salvare alle impostazioni predefinite locali*



Toccando il comando di salvataggio alle impostazioni locali, si salvano le impostazioni correnti come predefinite. Tutte le nuove procedure si avviano con queste impostazioni dell'immagine, escluso Zoom.

Questi valori saranno utilizzati quando si tocca il comando per tornare alle impostazioni locali.

10.8.4.8 *Tornare alle impostazioni locali*



Toccando il comando per tornare alle impostazioni locali, si caricano le impostazioni locali predefinite.

10.8.4.9 *Tornare alle impostazioni di fabbrica*



Toccando il comando per tornare alle impostazioni di fabbrica, si caricano le impostazioni predefinite dal produttore.

11 Procedure di chiusura

Alla fase di chiusura della procedura, i dettagli della procedura possono essere analizzati prima di inviare le scansioni e le analisi nella memoria del sistema locale.



Figura 11-1. Fase di chiusura della modalità di acquisizione con il comando della procedura di chiusura abilitato.

I dettagli dell'impostazione della procedura, le scansioni raccolte, i contrassegni e le acquisizioni delle schermate sono presentati per conferma. È un'opportunità per analizzare i dati della fase di impostazione o eliminare le scansioni indesiderate prima di chiudere la procedura.

NOTA: Se mancano informazioni cruciali minime ai fini dell'identificazione di una procedura, l'operatore riceverà un messaggio che lo invita a ritornare alla fase di Setup (Impostazione).

NOTA: Se è stata avviata una scansione dal controller Makoto™, la modalità di acquisizione porterà automaticamente alla fase di scansione.

Se sono necessarie modifiche, toccare i comandi **Return to scan** (Torna a scansione)



o **Edit** (Modifica), **Edit**, oppure toccare la fase appropriata dal comando della barra di avanzamento per modificare la procedura.



Toccare **Close Procedure** (Procedura di chiusura), **Close procedure**, per confermare l'invio di tutte le scansioni alla memoria locale e reimpostare la modalità di acquisizione per una nuova procedura.

12 Revisione e archiviazione delle procedure

Le procedure precedentemente registrate possono essere revisionate, archiviate, modificate ed eliminate in modalità di revisione.

Per accedere alla modalità di revisione dalla modalità di acquisizione, toccare il selettore di modalità Makoto quando non sono attive procedure.

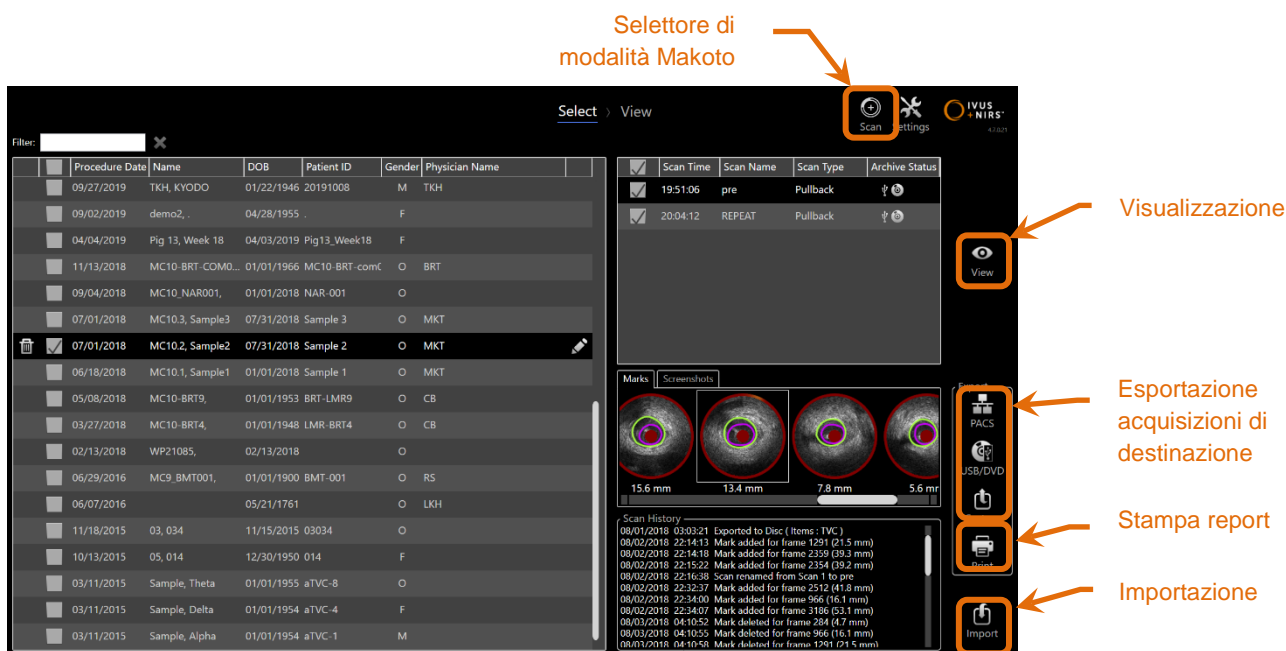


Figura 12-1. Modalità di revisione che mostra la fase di selezione.

Al momento dell'inserimento della modalità di revisione, l'operatore visualizza la fase di selezione del flusso di lavoro di revisione. Durante questa fase, l'operatore deve effettuare una selezione delle procedure e delle scansioni su cui eseguire ulteriori operazioni. L'operatore può scegliere di modificare, visualizzare, eliminare o stampare report con la procedura o le scansioni selezionate.

Le scansioni possono essere selezionate per l'importazione nella memoria locale.

12.1 Selezione di procedure e scansioni

Le procedure e le singole scansioni possono essere selezionate per ulteriori azioni nella fase di selezione della modalità di revisione.

I dati contenuti nel sistema sono disposti in tre tabelle in base al tipo di informazioni. È disponibile una tabella per procedure, scansioni nell'ambito della procedura selezionata e contrassegni e acquisizioni della schermata nell'ambito della selezione della scansione corrente.

Filtro

Elenco delle procedure

Procedure Date	Name	DOB	Patient ID	Gender	Physician Name
09/27/2019	TKH, KYODO	01/22/1946	20191008	M	TKH
09/02/2019	demo2_	04/28/1955		F	
04/04/2019	Pig 13, Week 18	04/03/2019	Pig13_Week18	F	
11/13/2018	MC10-BRT-COM0...	01/01/1966	MC10-BRT-comC	O	BRT
09/04/2018	MC10_NAR001	01/01/2018	NAR-001	O	
07/01/2018	MC10.3, Sample3	07/31/2018	Sample 3	O	MKT
07/01/2018	MC10.2, Sample2	07/31/2018	Sample 2	O	MKT
06/18/2018	MC10.1, Sample1	01/01/2018	Sample 1	O	MKT
05/08/2018	MC10-BRT9	01/01/1953	BRT-LMR9	O	CB
03/27/2018	MC10-BRT4	01/01/1948	LMR-BRT4	O	CB
02/13/2018	WP21085	02/13/2018		O	
06/29/2016	MC9_BMT001	01/01/1900	BMT-001	O	RS
06/07/2016		05/21/1761		O	LGH
11/18/2015	03_034	11/15/2015	03034	O	
10/13/2015	05_014	12/30/1950	014	F	
03/11/2015	Sample, Theta	01/01/1955	aTVC-8	O	
03/11/2015	Sample, Delta	01/01/1954	aTVC-4	F	
03/11/2015	Sample, Alpha	01/01/1954	aTVC-1	M	

Elenco delle scansioni

Scan Time	Scan Name	Scan Type	Archive Status
19:51:06	pre	Pullback	
20:04:12	REPEAT	Pullback	

Elenco dei contrassegni

Marks	Screenshots
15.6 mm	
13.4 mm	
7.8 mm	
5.6 mm	

Cronologia della scansione

Scan History

- 08/01/2018 03:03:21 Exported to Disc (Items : 1VC)
- 08/02/2018 22:14:13 Mark added for frame 1291 (21.5 mm)
- 08/02/2018 22:14:13 Mark added for frame 2359 (39.3 mm)
- 08/02/2018 22:15:22 Mark added for frame 2354 (39.2 mm)
- 08/02/2018 22:16:38 Scan renamed from Scan 1 to pre
- 08/02/2018 22:32:37 Mark added for frame 2512 (41.8 mm)
- 08/02/2018 22:34:00 Mark added for frame 965 (16.1 mm)
- 08/02/2018 22:34:07 Mark added for frame 3186 (53.1 mm)
- 08/03/2018 04:10:52 Mark deleted for frame 284 (4.7 mm)
- 08/03/2018 04:10:52 Mark deleted for frame 966 (16.1 mm)
- 08/03/2018 04:10:52 Mark deleted for frame 3291 (21.6 mm)

Figura 12-2. Fase di selezione della modalità di revisione con elenchi di informazioni evidenziati.

Le procedure selezionate possono essere visualizzate oppure è possibile acquisire schermate o stampare report di contrassegni. Le procedure verificate possono essere esportate e visualizzate. Inoltre, è possibile stampare le schermate acquisite o i report dei contrassegni se la procedura selezionata è anche la selezione corrente.

Per effettuare una singola selezione della procedura, toccare qualsiasi punto in una singola fila di informazioni della procedura nell'elenco delle procedure. La procedura selezionata diventerà la selezione corrente. Le scansioni nell'ambito di tale procedura sono visualizzate nell'elenco delle scansioni.

Toccare le caselle di controllo per selezionare più procedure per l'esportazione dei dati come batch dal sistema.

NOTA: Per impostazione predefinita, le procedure saranno ordinate con la data della procedura più recente in cima all'elenco.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

NOTA: Per impostazione predefinita, le scansioni saranno ordinate cronologicamente con la scansione meno recente in cima all'elenco.

NOTA: Toccare le intestazioni della colonna negli elenchi di procedure e scansioni per ordinare nuovamente le informazioni.

NOTA: Per una procedura selezionata, tutte le scansioni contenute saranno selezionate per impostazione predefinita.

Per effettuare selezioni di più procedure, toccare la casella di controllo accanto alle informazioni relative alla procedura desiderata. Rimuovere le procedure dalla selezione multipla toccando nuovamente la casella di controllo.

NOTA: L'esportazione predefinita è disponibile solo per una singola procedura.

12.1.1 Cronologia della scansione

Gli aggiornamenti eseguiti sulle scansioni dopo i completamenti della procedura saranno registrati nella cronologia della scansione. Ciò include le modifiche al nome della scansione, alle aggiunte o eliminazioni del contrassegno e alle azioni di esportazione o archiviazione.

12.1.2 Filtro dell'elenco delle procedure

Il catalogo delle procedure salvate può diventare lungo tra archiviazioni di routine e rimozione di dati dal sistema. Utilizzare un termine filtro per ridurre il numero visualizzato di inserimenti nell'elenco delle procedure in modo da facilitare la selezione.

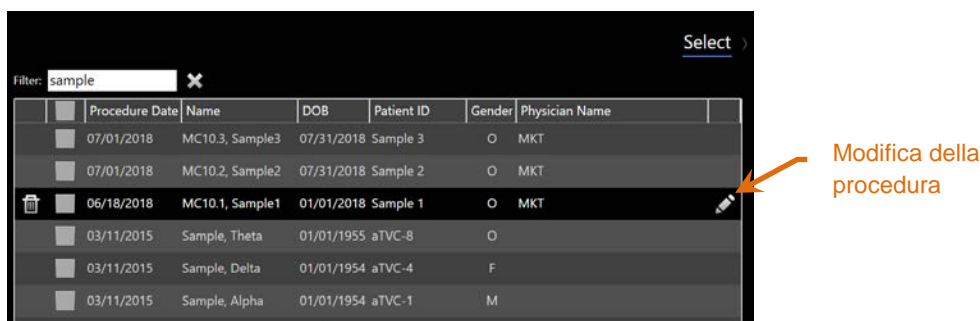


Figura 12-3. Fase di selezione con filtro applicato agli elenchi delle procedure e delle scansioni per inserimenti contenenti "Sample" (Campione).

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Inserire una quantità limitata di testo nel comando del filtro, in modo da ridurre l'elenco a un numero più gestibile di voci inserite.

Il sistema cercherà tutti gli ID procedura, i nomi del paziente, l'ID paziente, i nomi del medico, i numeri di lotto del catetere, i nomi della scansione o le note della scansione per tali caratteri.



Toccare Clear (Cancella), , per tornare all'elenco delle procedure completo.


12.1.3 Modifica della procedura

Le informazioni relative a procedura e paziente possono essere modificate per correggere o modificare le informazioni. Nell'elenco delle procedure con la selezione



corrente, toccare l'icona Edit (Modifica), , per aprire la richiesta di modifica della procedura.

I dettagli della procedura corrente saranno visualizzati nella richiesta di modifica della procedura. Utilizzare i comandi disponibili per aggiornare i campi.

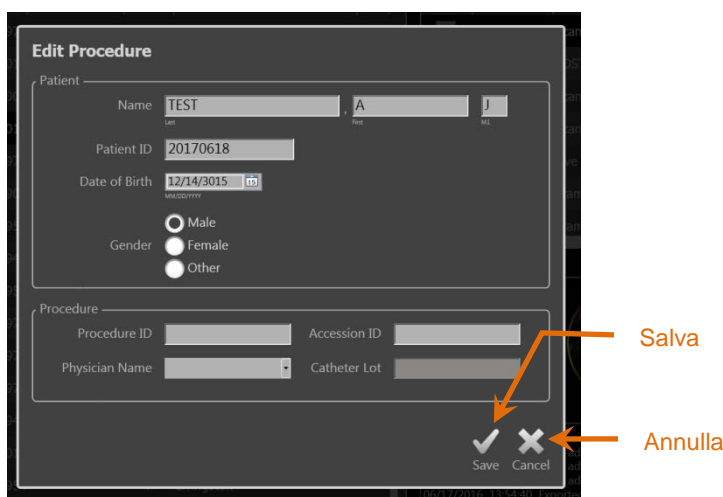

La finestra "Edit Procedure" è divisa in due sezioni principali: "Patient" e "Procedure".

Section Patient:

- Name: TEST (first name), A (last name), J (middle name)
- Patient ID: 20170618
- Date of Birth: 12/14/2015
- Gender: Male (selected), Female, Other

Section Procedure:

- Procedure ID: [empty]
- Accession ID: [empty]
- Physician Name: [empty]
- Catheter Lot: [empty]

Nella parte inferiore della finestra ci sono due pulsanti: "Save" (con un'icona di checkmark) e "Cancel" (con un'icona di X). Due frecce arancine puntano da queste etichette a destra ai rispettivi pulsanti.

Figura 12-4. Fase di selezione con la finestra di modifica della procedura aperta.



Toccare "Save" (Salva), , per inviare le modifiche e chiudere il messaggio di



richiesta. Toccare "Cancel" (Annulla), , per chiudere il messaggio di richiesta senza salvare le modifiche.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

NOTA: Le modifiche apportate alla procedura influiranno su tutte le scansioni associate alla procedura sul sistema. Ciò include le scansioni deselezionate.


NOTA: Visualizzare la procedura per modificare i dettagli della scansione nella procedura selezionata.

12.1.4 Stampa report

È possibile stampare report completi per selezioni di procedure singole o multiple dal sistema Makoto Intravascular Imaging System™ con una stampante compatibile configurata.

NOTA: Per ulteriori informazioni relative alle stampanti compatibili e alle configurazioni, contattare il rappresentante commerciale locale o il servizio clienti Infraredx.

I report completi conterranno un riepilogo di tutte le scansioni eseguite in una procedura, tra cui regioni create e contrassegni e misurazioni eseguite. Stampare un report completo selezionando una procedura mediante selezione della casella accanto alla voce nell'elenco delle procedure, quindi toccare il comando di stampa del report

della procedura .

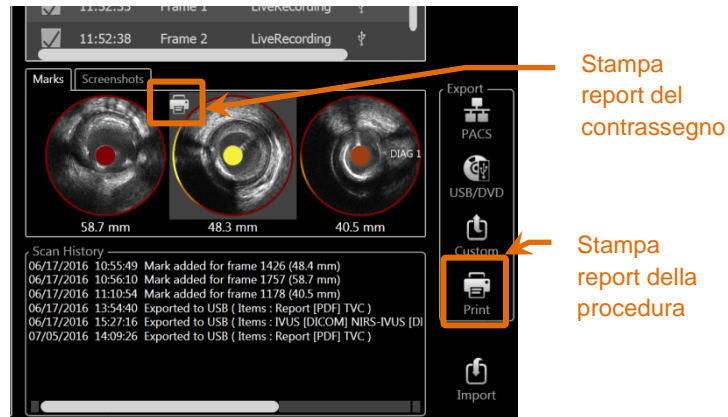



Figura 12-5. Fase di selezione con comando della stampa del report del contrassegno evidenziato.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni


Selezionando un contrassegno o l'acquisizione di una schermata e toccando Print

(Stampa), , si invia un report del contrassegno di una pagina o l'acquisizione della schermata alla stampante.

NOTA: Il contenuto di un report del contrassegno è presente nel report completo per la procedura.

12.1.5 Visualizzazione

Per visualizzare, modificare, analizzare ed eliminare le scansioni contenute con la

procedura attualmente selezionata, toccare il comando **“View”** (Visualizzazione), . In questo modo si caricano tutte le scansioni dalla procedura attualmente selezionata alla fase di visualizzazione della modalità di revisione.

È possibile navigare, visualizzare, analizzare, modificare ed eliminare la procedura e le scansioni in modo simile alla fase di scansione della modalità di acquisizione.

Per ulteriori informazioni e indicazioni, consultare la sezione 10 Revisione, misurazione e annotazione delle scansioni.

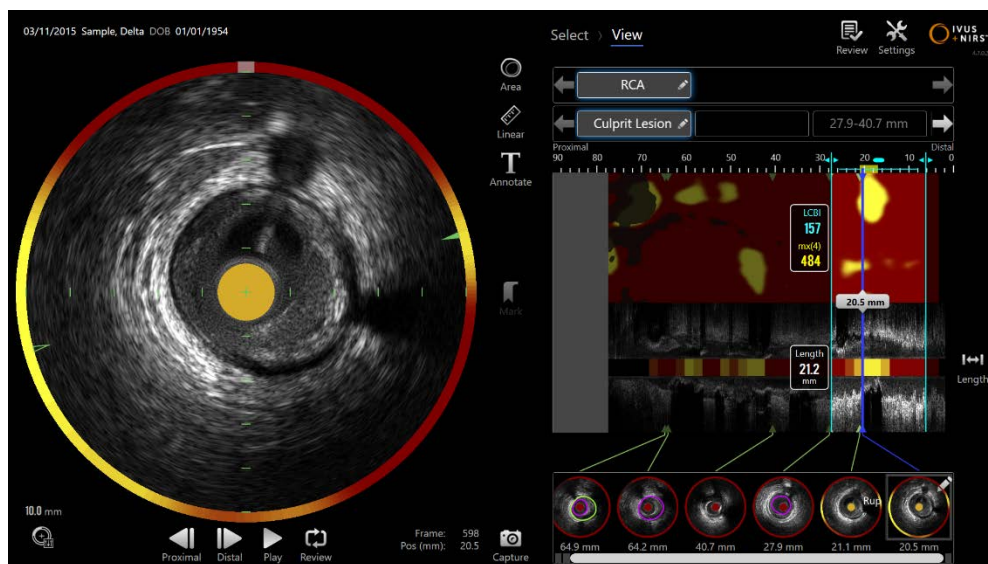


Figura 12-6. Fase di visualizzazione della modalità di revisione.

NOTA: Le modifiche a contrassegni, regioni, misurazioni e annotazioni durante la fase di visualizzazione diventeranno parte dei dati procedurali salvati quando si torna alla fase di selezione.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Toccare **Select** (Seleziona), **Select**, nel comando della barra di avanzamento o nel selettore di modalità Makoto per tornare alla fase di selezione della modalità di revisione.

12.2 Esportazione e archiviazione

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ fornisce diversi metodi e formati per l'esportazione dei dati dal sistema. Sono disponibili due metodi accelerati configurabili per l'esportazione e un metodo per un'esportazione personalizzata.

Selezioni di procedure singole o multiple possono essere esportate dal sistema per scopi di archiviazione o altri utilizzi. Dopo aver effettuato le selezioni delle procedure desiderate, utilizzare i comandi di esportazione di destinazione per avviare il trasferimento dei dati.

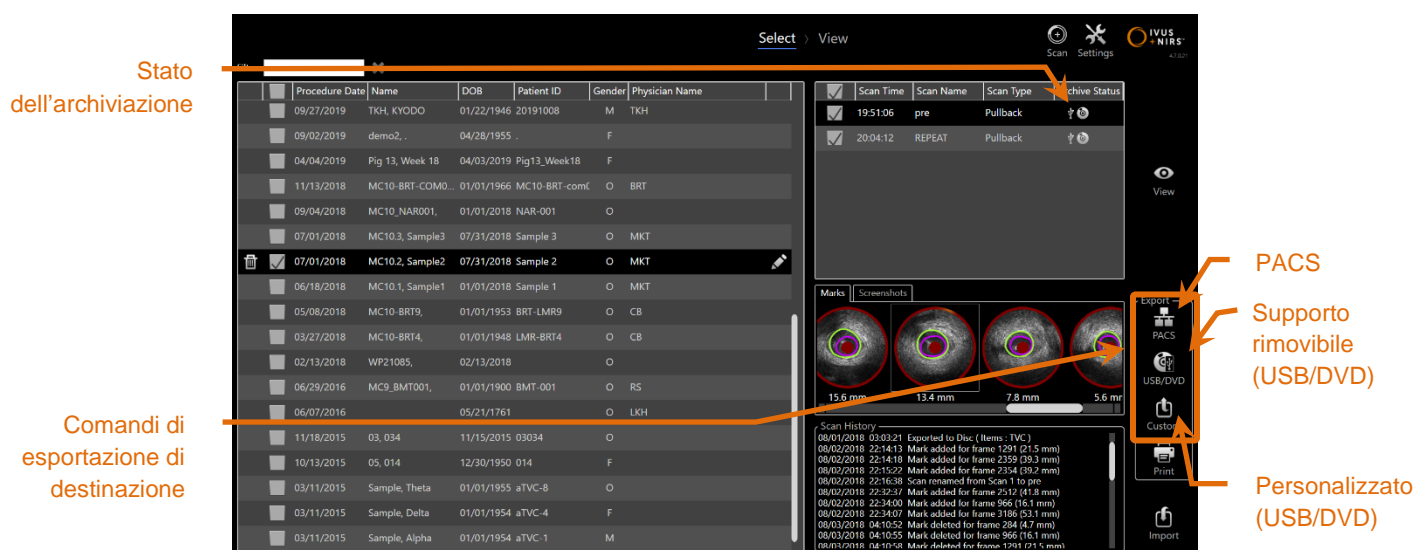


Figura 12-7. Fase di selezione con comandi di esportazione di destinazione evidenziati.

Al completamento dell'esportazione, l'elenco delle scansioni sarà aggiornato con la destinazione dell'archiviazione nella colonna Stato dell'archiviazione.

12.2.1 Configurazione delle destinazioni di esportazione

I formati di esportazione predefiniti e la compressione possono essere configurati per destinazioni PACS e su supporti rimovibili (USB/DVD).

Consultare le sezioni 13.2 e 13.3 per ulteriori informazioni sulla modalità di configurazione di queste impostazioni predefinite.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

12.2.2 Esportazione PACS



AVVERTENZA

Verificare che i cavi che fuoriescono da o si collegano al sistema Makoto Intravascular Imaging System™ siano ben aderenti al pavimento.


I dati dal sistema Makoto Intravascular Imaging System™ possono essere visualizzati nel sistema PACS dell'ospedale se i sistemi sono stati configurati adeguatamente. I sistemi PACS accetteranno i dati formattati utilizzando lo standard DICOM.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

Il sistema è realizzato per essere collegato a una rete ospedaliera protetta per scopi di trasferimento diretto di dati del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ in una soluzione di archiviazione di rete quale PACS. Collegare un cavo schermato Cat5e al cavo del connettore PACS o al cavo di integrazione mobile Infraredx al connettore radiografico a destra della console Makoto™.

Configurare i parametri della connessione PACS utilizzando le indicazioni fornite nella sezione 13 Impostazioni di sistema.



Toccare il comando PACS, , per avviare il trasferimento delle procedure selezionate alla destinazione configurata.



ATTENZIONE

Il collegamento alle reti IT, che include un'altra apparecchiatura, potrebbe comportare rischi non identificati in precedenza per i pazienti, gli operatori o terzi.



ATTENZIONE

Modifiche alla rete IT potrebbero introdurre nuovi rischi e richiedere ulteriori analisi. Modifiche alla rete IT includono:

- Modifiche alla configurazione di rete
 - Collegamento a elementi aggiuntivi
 - Scollegamento di elementi
 - Aggiornamenti dell'apparecchiatura
 - Upgrade dell'apparecchiatura
-



ATTENZIONE

Il cliente deve identificare, analizzare, valutare e controllare i rischi associati al collegamento del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ a una rete IT.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

12.2.3 Esportazione di supporti rimovibili (USB/DVD)

I dati del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ possono essere esportati su supporti rimovibili, USB o supporti scrivibili Blu-Ray/DVD/CD.



Figura 12-8. Pannello dei supporti rimovibili del sistema Makoto Intravascular Imaging System™

Il sistema controllerà automaticamente se sono disponibili supporti rimovibili nelle porte USB del sistema e nelle unità ottiche.

Analizzare le selezioni di procedura e scansioni e le dimensioni di esportazione totali. Confermare i formati del tipo di file da esportare.

Se le dimensioni di esportazione desiderate sono inferiori allo spazio disponibile sul supporto di destinazione, toccare il supporto desiderato per avviare l'esportazione. Se le dimensioni di esportazione stimate sono eccessive per il supporto, analizzare i formati e le selezioni della procedura per ridurre le dimensioni dell'esportazione.

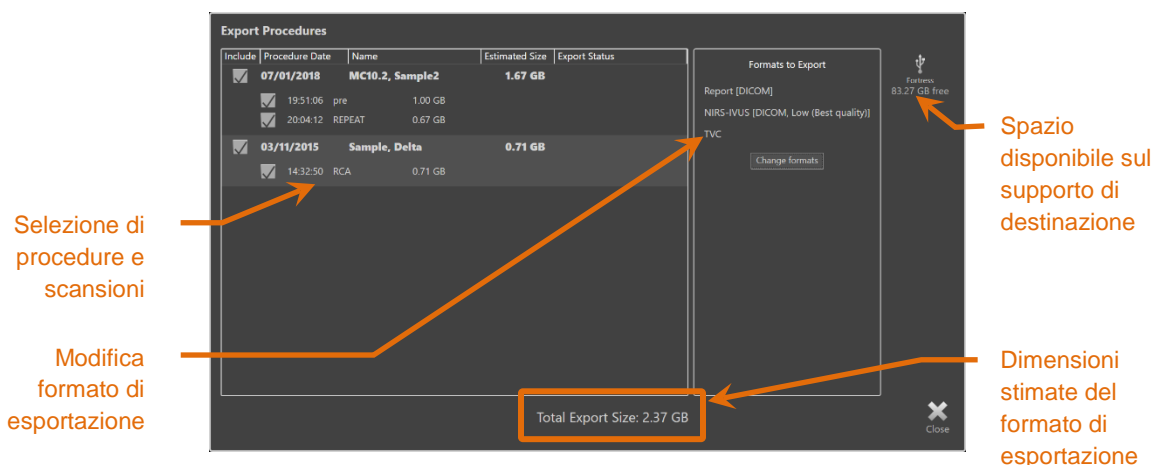


Figura 12-9. Messaggio di richiesta di esportazione su supporto rimovibile.

Deselezionare le singole scansioni o le intere procedure per ridurre le dimensioni di esportazione.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione e sulla modifica dei formati di esportazione predefiniti, consultare la sezione 13.3.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

NOTA: è possibile creare un disco di supporto ottico di sessione aperta in grado di accettare esportazioni multiple; a tale fine deselezionare “Finalize disc” (Finalizza disco) nelle opzioni di esportazione USB/DVD delineate nella sezione 13.3.

12.2.4 Esportazione personalizzata

I dati del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ possono essere esportati su supporti rimovibili in diversi modi personalizzati. Questo metodo di esportazione richiede la selezione o la conferma dei formati dei dati e della destinazione di archiviazione. Inoltre, il metodo permette all'utente di eliminare elementi identificativi dai dati impostati in base alle esigenze.




ATTENZIONE

L'identificazione delle informazioni contenute nel testo delle annotazioni sui fotogrammi o sulle scansioni non sarà modificata.

NOTA: L'esportazione personalizzata è utile per esportazioni di dati non di routine o per applicazioni di ricerca che richiedono l'anonimizzazione.

NOTA: L'esportazione personalizzata è disponibile solo per una singola procedura.

Selezionare la procedura e le scansioni desiderate toccando le voci inserite negli elenchi delle procedure e delle scansioni. Toccare il comando di esportazione

personalizzata, , per visualizzare la finestra di esportazione personalizzata.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

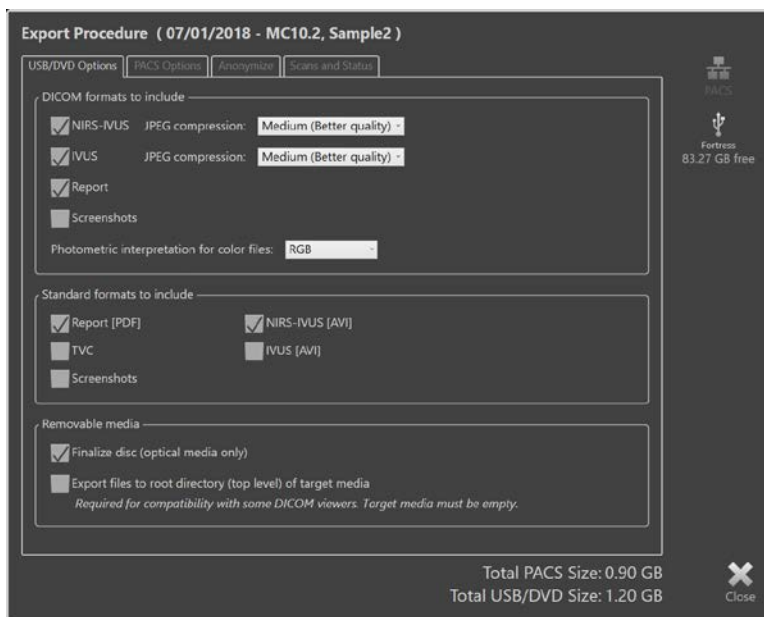


Figura 12-10. Finestra di esportazione personalizzata per l'impostazione di tipi di dati e formati per l'esportazione di supporti rimovibili.

Confermare le impostazioni utilizzate per l'ultimo formato di dati per i supporti rimovibili o regolare in base alle necessità per questa esportazione. Per ulteriori informazioni relative ai tipi di dati e ai formati, consultare la sezione 13.2.

Consultare la sezione 13.3 per ulteriori dettagli riguardo alla finalizzazione delle unità ottiche.

Se il lettore DICOM di destinazione richiede la scrittura della DICOMDIR nella directory principale dell'unità rimovibile desiderata, selezionare l'opzione "Export files to root directory (top level) of target media" ("Esportare i file nella directory principale (primo livello) dell'unità di destinazione"). Per l'applicazione di quest'opzione è necessario che l'unità di destinazione sia vuota.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

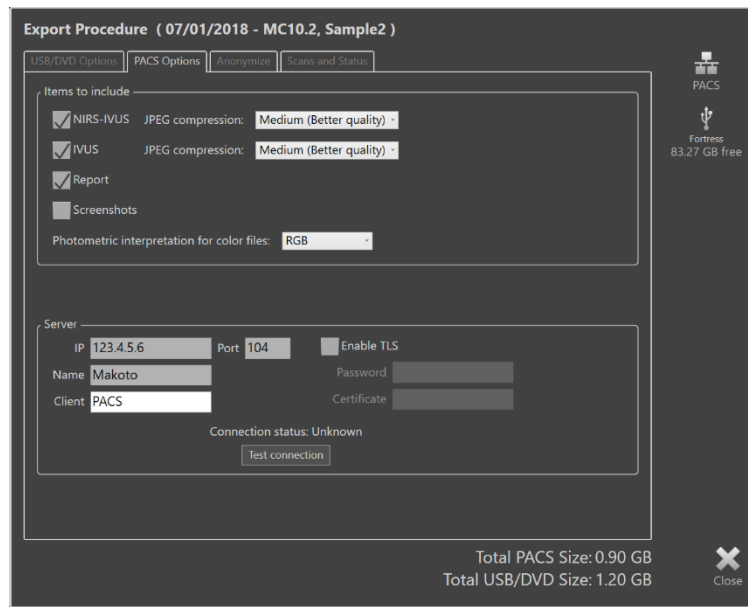


Figura 12-11. Finestra di esportazione personalizzata per la configurazione di posizioni di archiviazione di rete alternative.

Se i dati di esportazione personalizzati sono inviati tramite rete, confermare o regolare le impostazioni di compressione e i file di dati DICOM. Configurare un server PACS alternativo per inviare i dati personalizzati.

NOTA: Le voci PACS da includere e le impostazioni PACS per un'esportazione personalizzata non influiscono sulle impostazioni standard PACS.

NOTA: Diversi programmi di analisi che possono analizzare i dati del sistema Makoto™ accettano il trasferimento in rete delle informazioni DICOM. Utilizzare l'esportazione personalizzata per configurare l'indirizzo di rete delle workstation di analisi se sono diverse rispetto a quelle del PACS della cartella medica ospedaliera.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

The screenshot shows a software window titled "Export Procedure (07/01/2018 - MC10.2, Sample2)". It has four tabs: "USB/DVD Options", "PACS Options", "Anonymize", and "Scans and Status". The "Anonymize" tab is active. Inside, there is a section "Anonymize procedure information" with a checked checkbox. Below this are two main sections: "Patient" and "Procedure". The "Patient" section contains fields for Name (Last: S, First: T, MI:), Patient ID (abcdefg), Date of Birth (01/01/2021), and Gender (radio buttons for Male, Female, Other). The "Procedure" section contains fields for Procedure ID, Accession ID, Physician Name (dropdown), Catheter Lot, and Procedure Date (07/01/2018). On the right side of the window, there are icons for PACS and a USB drive labeled "Fortress" with "83.27 GB free". At the bottom right, it shows "Total PACS Size: 0.90 GB" and "Total USB/DVD Size: 1.20 GB", along with a "Close" button.

Figura 12-12. Finestra dell'esportazione personalizzata per l'anonimizzazione del record della procedura.

Rendere i dati anonimi utilizzando le funzioni "Anonymize" (Anonimizza). Selezionare la casella di anonimizzazione e inserire le informazioni alternative desiderate.

NOTA: L'anonimizzazione non modifica i dati originali che restano quindi nel sistema.

NOTA: Le funzioni di anonimizzazione non influiscono sui tempi della procedura, su eventuali note, commenti o annotazioni apportate nelle scansioni.

NOTA: Le funzioni di anonimizzazione nascondono il nome e la data di nascita del paziente ma non influiscono su altri contenuti delle acquisizioni di schermate.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

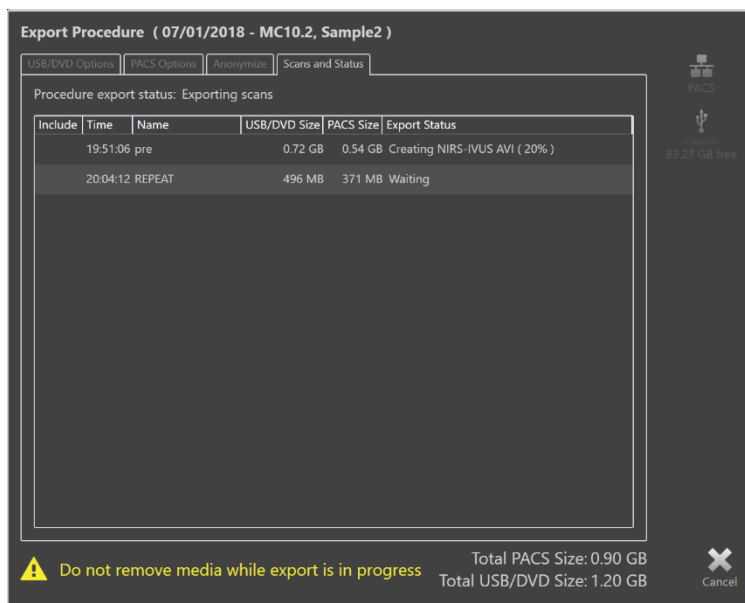


Figura 12-13. Finestra dell'esportazione personalizzata con esportazione di scansione su supporto USB in corso.

Analizzare le dimensioni dei dati da esportare per assicurare che siano idonee ai supporti di destinazione. Eseguire le regolazioni necessarie alle selezioni.

Toccare la destinazione del supporto rimovibile per avviare il trasferimento nella destinazione con i tipi di file, di formato e di compressione configurati.

12.3 Importazione dei dati

I dati delle scansioni e delle procedure possono essere importati sul sistema Makoto Intravascular Imaging System™ per visualizzazione, modifica, misurazione e nuova esportazione.

NOTA: I dati archiviati in formato TVC possono essere importati su qualsiasi sistema Makoto Intravascular Imaging System™ con un numero di modello compatibile per una successiva visualizzazione.

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ supporta dati in formato TVC (*.tvc da TVC-MC10 o TVC-MC9) o dati di esportazione TVC (*.zip da TVC-MC8 o TVC-MC8x) generati da questo sistema o da un altro sistema di imaging TVC. Tali dati possono essere importati da sorgenti Blu-Ray, DVD o USB.

12.3.1 Conflitti durante l'importazione

Se i dati esistono già o i dati procedurali di scansione importati o dei pazienti sono simili a quelli già presenti nel sistema, potrebbe essere richiesta un'ulteriore azione da parte dell'utente per completare l'operazione.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

La risoluzione dei conflitti si verifica dopo l'elaborazione di tutti i tentativi di importazione. In questo modo, tutti i conflitti possono essere risolti in un'unica soluzione facilitando notevolmente l'importazione del batch.

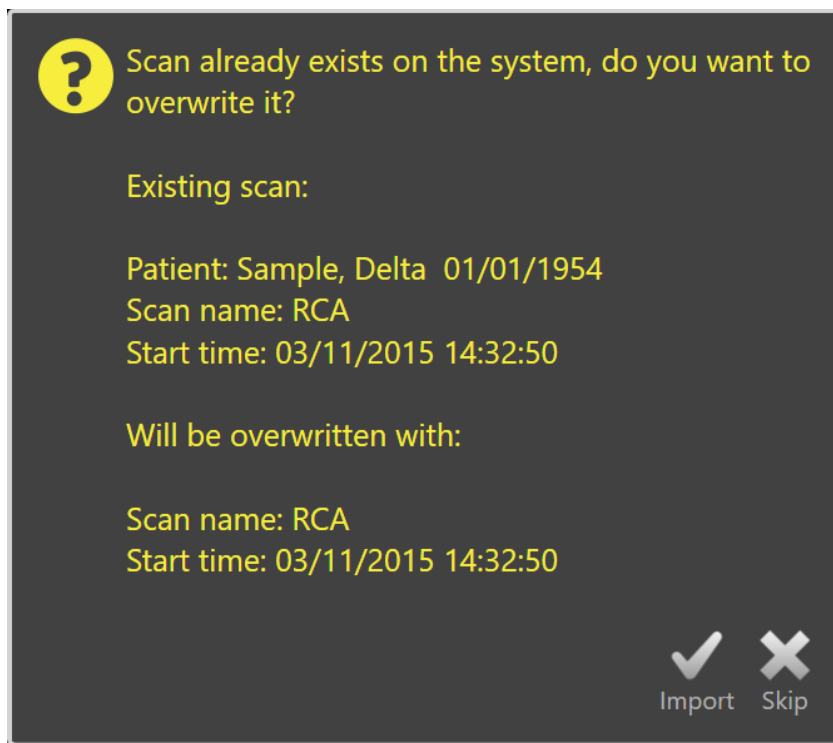


Figura 12-14. Messaggio di richiesta relativo a un conflitto durante l'importazione. Procedere con la risoluzione e sovrascrivere o annullare l'importazione di questo file in conflitto.

Quando viene visualizzato il messaggio di richiesta relativo al conflitto durante l'importazione, scegliere:

Import (Importa) Per procedere con la risoluzione del conflitto. Se non vi sono modifiche nella procedura o nei dati del paziente, il file esistente sul sistema sarà sovrascritto. Se vi sono differenze nella procedura o nei dati del paziente, all'utente viene richiesto di decidere in base alle informazioni appropriate.

Oppure

Skip (Salta) Questa importazione in conflitto sarà saltata e all'utente viene richiesto di risolvere altri conflitti con il batch da importare.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

	Import Information	Existing Information
Procedure Date	03/11/2015	03/11/2015
Procedure ID		
Physician Name		
Accession ID		
Catheter Lot Number	64623	64623
Patient Name	Sample, Delta	Sample, D
Patient DOB	01/01/1954	01/01/1954
Patient ID	aTVC-4	aTVC-4
Patient Gender	Female	Other

Use import **Use existing**

Overwriting the procedure data will modify other scans that belong to the same procedure

Information will be used for subsequent imports for the same procedure during this import session

Import **Skip**

Figura 12-15. Messaggio di richiesta di risoluzione dei conflitti di importazione.

Se l'utente decide di risolvere il conflitto con l'importazione e le informazioni relative a procedura o paziente sono cambiate, deve scegliere:

Use Import (Utilizza importazione) Per utilizzare le informazioni relative a procedura e paziente dal file importato. Questa decisione si applicherà ad altre scansioni importate per questa procedura durante questa importazione di batch E aggiornerà eventuali scansioni già presenti nel sistema che appartengono alla stessa procedura.

Oppure

Use Existing (Utilizza informazioni esistenti) Per utilizzare le informazioni relative a procedura e paziente già presenti nella memoria del sistema per aggiornare il file importato. Questa decisione si applicherà ad altre scansioni importate per questa procedura durante questa importazione di batch.

Oppure

Skip (Salta) Questa importazione in conflitto sarà saltata e all'utente viene richiesto di risolvere altri conflitti con il batch da importare.

Selezionando Import (Importa) si procederà con l'importazione di questi dati procedurali in base alla selezione.

12.4 Eliminazione di scansioni e procedure

Le procedure e le scansioni memorizzate nel sistema possono essere eliminate per creare più spazio disponibile nella memoria locale.

È possibile eliminare intere procedure, una per volta, dalla fase di selezione della modalità di revisione. Toccare la procedura per selezionarla, quindi toccare il comando



dell'eliminazione. In questo modo si richiede all'utente conferma dell'azione, in quanto non è possibile annullare l'eliminazione.



ATTENZIONE

L'eliminazione dei dati dal sistema è permanente e **NON PUÒ** essere annullata.

Le scansioni possono essere eliminate durante la fase di visualizzazione o la fase di scansione eliminando singolarmente le scansioni mediante apertura della finestra di modifica di scansione. Per ulteriori informazioni e indicazioni su questa funzione, consultare la sezione 10.2.9.

NOTA: L'ultima scansione in una procedura non può essere eliminata durante la fase di visualizzazione. Tornare alla fase di selezione ed eliminare la procedura per rimuoverla completamente dal sistema.

NOTA: L'eliminazione di una scansione rimuove tutte le misurazioni e le acquisizioni di schermata associate.

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ non è realizzato per essere una posizione di archiviazione dei dati permanente. Si incoraggia vivamente il cliente a eseguire un backup dei dati e un piano di archiviazione che include un'eliminazione periodica dei dati dal sistema.



ATTENZIONE

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ non è destinato a essere una posizione di archiviazione o memorizzazione dei dati permanente.

13 Impostazioni di sistema

Le impostazioni locali del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ possono essere regolate per soddisfare le esigenze dell'utente. L'utente può configurare le impostazioni di comunicazione di rete, i formati di esportazione predefiniti, regolare i parametri del display e accedere alle utilità diagnostiche del sistema.

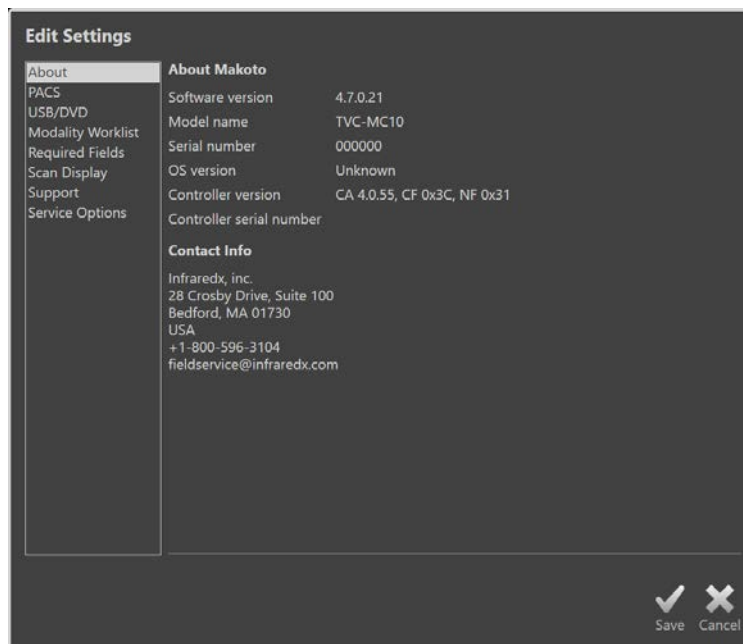



Figura 13-1. Impostazioni di sistema, sezione Informazioni.

NOTA: L'utente deve utilizzare il pulsante "Save" (Salva),  , per salvare le modifiche alle impostazioni.

13.1 Informazioni

La sezione Impostazioni di sistema fornisce informazioni relative al numero di modello del sistema nonché i numeri di versione del software attualmente installato.

Le informazioni di contatto per il fornitore di servizi e/o commerciale del cliente sono disponibili in questa posizione.

13.2 PACS

Nella sezione Impostazioni di sistema, configurare i tipi di dati, la posizione del server PACS e le credenziali.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

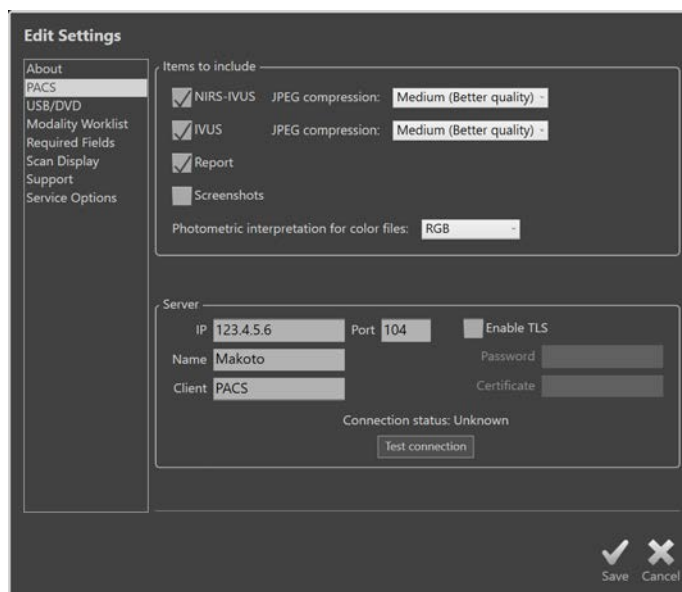


Figura 13-2. Impostazioni di sistema, sezione PACS.

13.2.1 Elementi di dati da includere

Sono disponibili diversi tipi di dati e report che possono essere generati dal sistema Makoto Intravascular Imaging System™.

Questi tipi di file e formati sono descritti nella seguente tabella:

Tabella 1: Tipi di file di dati e formati disponibili

Tipo di file	Formati disponibili		Descrizione
	DICOM	Standard	
NIRS-IVUS	Sì	*.avi	Un ciclo dei fotogrammi trasversali registrati dei dati NIRS e IVUS. Le registrazioni Live IVUS e dei fotogrammi produrranno solo immagini IVUS o in scala di grigi.
IVUS	Sì	*.avi	Un ciclo dei fotogrammi trasversali registrati dei soli dati IVUS.
Report	Sì	*.pdf	Un report che riassume i dati del paziente, i dettagli della procedura, le annotazioni, le misurazioni, le regioni e i Mark (Contrassegna).
TVC	No	*.tvc	Un file che contiene i dati NIRS e IVUS nel formato del sistema nativo.
Acquisizione di schermata	Sì	*.png	Acquisizioni di schermata generate dal sistema e registrate dall'utente.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

13.2.2 Compressione JPEG

Le impostazioni di compressione del formato dei dati DICOM possono essere regolate per migliorare la qualità delle immagini o ridurre le dimensioni del file di dati.

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ offre una compressione JPEG per produrre file di immagini di compressione bassa, media o alta.

Tabella 2. Impostazioni di compressione DICOM

Impostazioni di compressione	Qualità dell'immagine (qualitativo)	Impostazione della qualità dell'immagine (1-100)	Dimensione del file (qualitativo)
Bassa	Ottimale	100	Grande
Media	Migliore	80	Media
Alta	Ottima	50	Piccola

13.2.3 Interpretazione fotometrica per i file a colori DICOM

Lo standard DICOM fornisce differenti metodi di codifica delle informazioni delle immagini a colori. Sul sistema Makoto Intravascular Imaging System™ scegliere da “RGB” o “YBR Full 422”.


Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

13.2.4 Impostazioni di connessione del server PACS

Per utilizzare l'opzione di esportazione del PACS, è necessario configurare l'indirizzo di rete del server PACS. Per configurare l'indirizzo, inserire le seguenti informazioni:

IP	Protocollo Internet, versione 4, indirizzo del PACS.
Port (Porta)	La porta di comunicazione su cui si prevede la comunicazione del PACS. Generalmente è la porta 104.
Name (Nome)	Nome della rete del server PACS.
Client	Nome tramite cui il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ sarà identificato in rete.
Enable TLS (Abilita TLS)	Selezionare o deselezionare questa opzione se il PACS richiede credenziali sicure per l'accesso. Se selezionata, fornire la password e il certificato necessari.

Toccare Test Connection (Test connessione), , per verificare che il PACS e il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ possano comunicare. Per assistenza relativa alla configurazione, contattare il rappresentante dei servizi locale o il servizio clienti Infraredx.

13.3 USB/DVD (supporti rimovibili)

Le opzioni predefinite sul formato dei dati da salvare sui supporti rimovibili possono essere configurate nella sezione Impostazioni di sistema.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

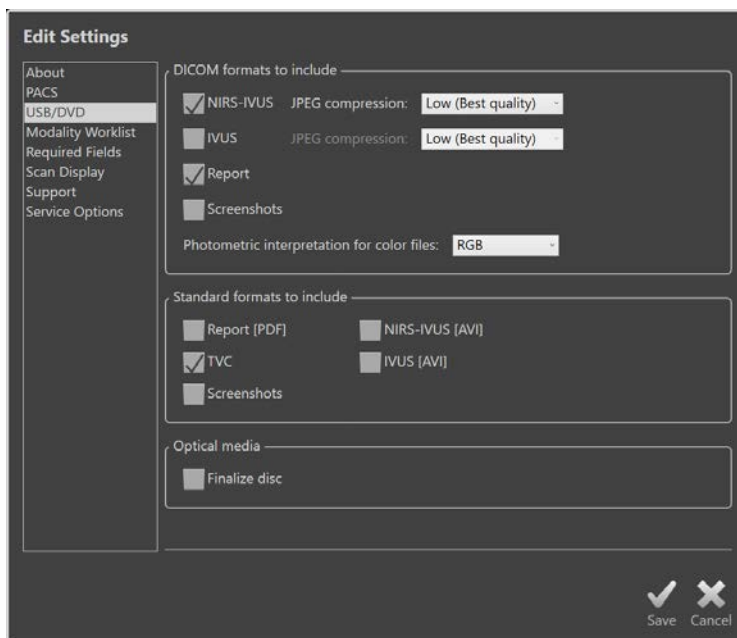


Figura 13-3. Impostazioni di sistema, sezione USB/DVD.

13.3.1 Formati DICOM da includere

I formati DICOM disponibili, descritti nella Tabella 1 mostrata in precedenza, sono disponibili anche per l'esportazione su supporti rimovibili. L'esportazione di formati di file standard e DICOM può essere combinata in una singola azione di esportazione.

13.3.2 Formati standard da includere

Oltre ai tipi di file di dati disponibili solo in formato DICOM, è possibile selezionare ulteriori tipi di file di dati in formato standard (non DICOM).

I formati standard possono essere più adatti alla creazione o visualizzazione di una presentazione quando gli strumenti DICOM non sono disponibili.

13.3.2.1 *Compressione AVI*

Le impostazioni di compressione avi dei dati IVUS o IVUS+NIRS sono configurate sui seguenti codec: XviD.

13.3.3 Supporti ottici

La registrazione multisessione è supportata durante l'esportazione su supporti ottici (CD, DVD, Blu-Ray). Deselezionare "Finalize disc" (Finalizza disco) per consentire esportazioni aggiuntive sugli stessi supporti.

13.4 Elenco di lavoro delle modalità

La posizione della rete dell'elenco di lavoro delle modalità e le credenziali di connessione possono essere configurate completando i campi presenti in questa sezione.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

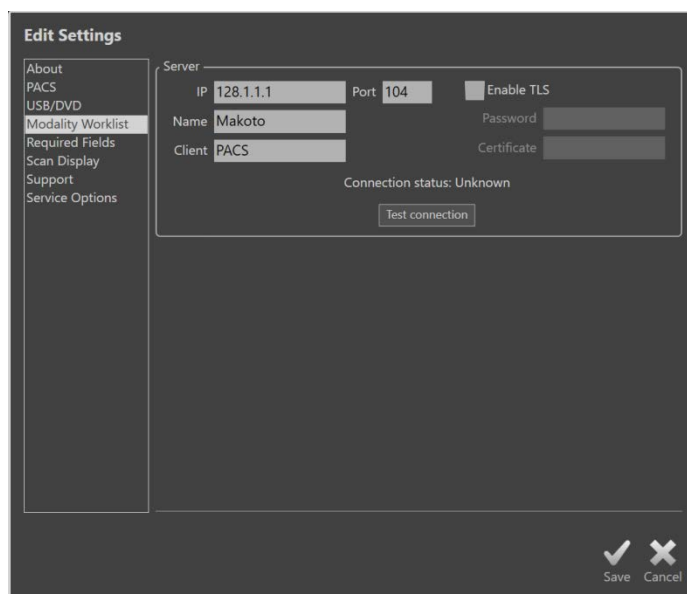



Figura 13-4. Impostazioni di sistema, elenco di lavoro delle modalità.

13.4.1 Impostazioni di connessione del server dell'elenco di lavoro delle modalità

Per utilizzare le opzioni di impostazione della procedura semi-automatica dell'elenco di lavoro delle modalità, è necessario configurare l'indirizzo di rete del server dell'elenco di lavoro. Per configurare l'indirizzo, inserire le seguenti informazioni:

IP	Protocollo Internet, versione 4, indirizzo del server dell'elenco di lavoro.
Port (Porta)	La porta di comunicazione su cui si prevede la comunicazione del server dell'elenco di lavoro. Generalmente è la porta 104.
Name (Nome)	Nome della rete del server dell'elenco di lavoro.
Client	Nome tramite cui il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ sarà identificato in rete.
Secure TLS (TLS sicuro)	Selezionare o deselezionare questa opzione se il server dell'elenco di lavoro richiede credenziali sicure per l'accesso. Se selezionata, fornire la password e il certificato necessari.

Toccare Test Connection (Test connessione), , per verificare che il server dell'elenco di lavoro e il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ possano comunicare. Per assistenza relativa alla configurazione, contattare il rappresentante dei servizi locale o il servizio clienti Infraredx.

13.5 Campi obbligatori

È possibile configurare la fase di Setup (Impostazione) del sistema in modo che risulti obbligatorio completare particolari campi prima di chiudere le procedure o modificare le informazioni relative alle procedure completate. Si possono impostare i campi obbligatori selezionandoli dall'elenco dei campi "Not Required" ("Non obbligatori") e poi toccando o cliccando sul pulsante "Add >>" (Aggiungi). Per rendere un campo non obbligatorio selezionarlo dall'elenco di quelli "Required" ("Obbligatori") e poi toccare o cliccare il pulsante "<< Remove" ("Rimuovi").

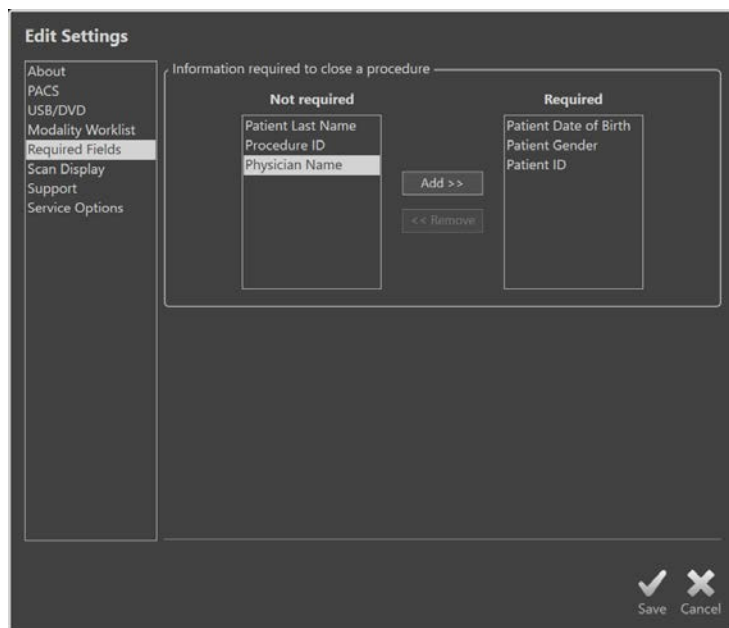


Figure 13-5: Impostazioni di sistema, sezione dei Required Fields (Campi obbligatori).

13.6 Visualizzazione delle scansioni

La sezione Visualizzazione delle scansioni delle impostazioni di sistema consente di personalizzare alcuni aspetti visivi della fase di scansione e delle fasi di visualizzazione.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

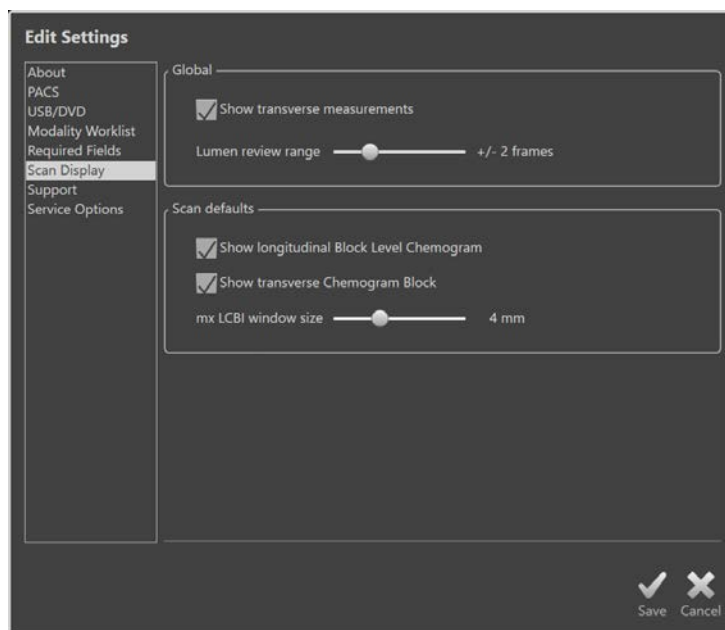


Figura 13-6. Impostazioni di sistema, sezione Visualizzazione delle scansioni.

13.6.1 Misurazioni trasversali

Utilizzare questo selettore per visualizzare o nascondere le misurazioni trasversali e i risultati sul display. La compressione dei risultati di misurazione nasconde anche i profili della misurazione. Quando si aprono le scansioni per analizzarle, le misurazioni risulteranno nascoste e i risultati saranno compressi.

13.6.2 Intervallo di revisione del lumen dei fotogrammi

Utilizzare questo controllo per alterare l'intervallo di fotogrammi che saranno riprodotti quando si attiva la revisione del lumen; consultare la Sezione 10.3.2 Revisione del lumen.

13.6.3 Visibilità del Block Level Chemogram in una scansione longitudinale

La visibilità del Block Level Chemogram può essere aggiornata in base alle preferenze dell'utente. Le modifiche apportate rimarranno preimpostate per la registrazione di tutte le nuove scansioni. La visibilità del Block Level Chemogram nelle single scansioni può essere impostata modificando le proprietà delle scansioni, consultare la sezione 10.2 Modifica delle scansioni.

NOTA: Per regolare la visibilità del Block Level Chemogram di una singola scansione longitudinale consultare la sezione 10.2 **Modifica delle scansioni**.

13.6.4 Modifica del blocco del chemogram in una scansione trasversale

La visibilità del blocco del chemogram al centro dell'IVUS trasversale può essere aggiornata in base alle preferenze dell'utente. Le modifiche apportate rimarranno

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

preimpostate per la registrazione di tutte le nuove scansioni. La visibilità del blocco del chemogram nelle single scansioni può essere impostata modificando le proprietà delle scansioni, consultare la sezione 10.2 Modifica delle scansioni.

NOTA: Per regolare la visibilità del blocco del chemogram di una singola immagine IVUS trasversale consultare la sezione 10.2 **Modifica delle scansioni**.

13.6.5 Dimensioni della finestra dell'LCBI massimo

Utilizzare questo controllo per variare le dimensioni della finestra dell'LCBI massimo sul display. Saranno generati i risultati massimi LCBI nei resoconti utilizzando l'attuale impostazione per le dimensioni della finestra dell'LCBI massimo. Questo valore può essere stabilito utilizzando il controllo dello slide fornito in una gamma che va 1 mm a 10 mm, in incrementi di 1 millimetro.

NOTA: Per regolare le dimensioni dell'LCBI Massimo in una singola scansione consultare la sezione 10.2 **Modifica delle scansioni**.

13.7 Supporto

La sezione Impostazioni di sistema fornisce i comandi per l'esportazione di file di log del sistema. Questi file forniscono informazioni utili per il personale addetto all'assistenza nella diagnosi dei problemi prestazionali del sistema.

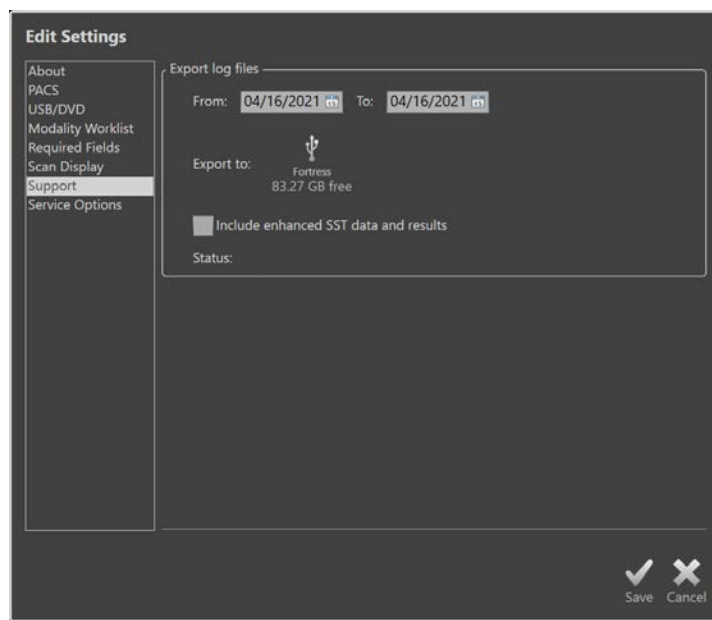


Figura 13-7. Impostazioni di sistema, sezione Supporto.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Impostare l'intervallo di date desiderato utilizzando i comandi forniti, determinare se includere i dati SST avanzati e i file dei risultati, quindi scegliere la destinazione in cui copiare i file.

I file generati da questa utilità non contengono informazioni sanitarie protette.

13.8 Opzioni di assistenza

In questa sezione delle impostazioni, definire il nome dell'istituto in cui vengono eseguite e registrate le procedure. La voce inserita in questo campo viene visualizzata nell'intestazione DICOM dei file generati dal sistema.

Se il sistema è stato configurato con una stampante predefinita, i pulsanti di stampa del sistema possono essere abilitati e disabilitati.

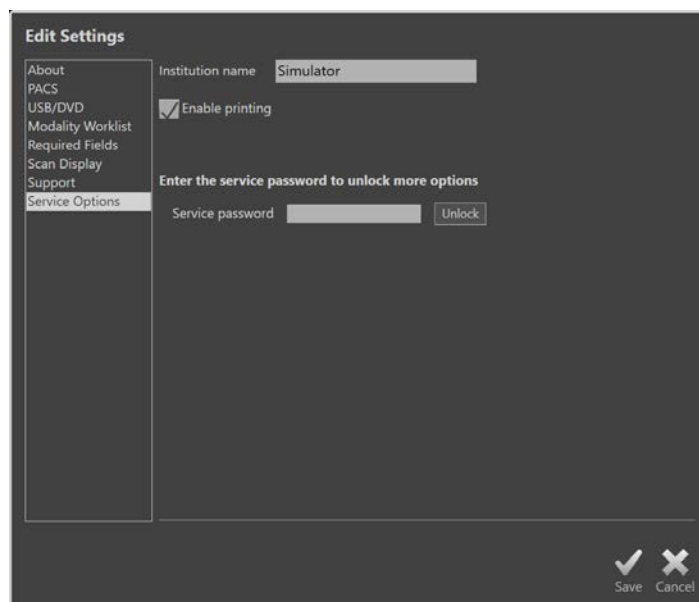


Figura 13-8. Impostazioni di sistema, sezione Assistenza.

Quest'area delle impostazioni di sistema contiene anche l'accesso alle utilità di diagnostica per il personale di assistenza formato.

14 Integrazione del sistema radiografico ed esportazione video

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ può trasmettere video, dati o condividere il controllo con un sistema radiografico di fluoroscopia compatibile collegato.

L'utilizzo delle funzionalità descritte in questa sezione può richiedere il collegamento alla console Makoto™ di cavi supplementari da postazioni fisse.



AVVERTENZA

Verificare che i cavi che fuoriescono da o si collegano al sistema Makoto Intravascular Imaging System™ siano ben aderenti al pavimento.

14.1 Uscita video digitale

Il segnale video della console Makoto™ può essere esportato collegando un monitor esterno al sistema tramite un cavo DVI-D. Tramite il collegamento del cavo DVI-D al connettore Video Out è possibile esportare le immagini da 1920x1080 pixel visualizzate sul display del monitor del medico.

In via opzionale, la risoluzione del video esportato può essere configurata a 1600x1200 pixel (rapporto 4:3). In tal caso, contattare il rappresentante dei servizi locale o il servizio clienti Infraredx per assistenza.



Figura 14-1. Video e pannello di esportazione di controllo del sistema Makoto Intravascular Imaging System™

L'uscita video DVI-D si trova in prossimità della parte centrale del pannello come terzo connettore partendo dal bordo destro.

15 Glossario dei termini

Block Level Chemogram	Rappresentazione semplificata delle informazioni del chemogram segmentata nei blocchi discreti che non dipendono dalle informazioni della posizione di rotazione.
Chemogram	Mappa in forma di rappresentazione grafica indicante la probabilità che il core lipidico contenente placche di interesse sia presente.
Blocco del chemogram	Singolo segmento nel blocco del chemogram.
Alone del chemogram	Rappresentazione della porzione di un chemogram situato in un particolare fotogramma dell'IVUS trasversale che viene visualizzato con un anello colorato attorno all'IVUS trasversale che viene registrato a rotazione.
Console	Il componente principale del sistema Makoto Intravascular Imaging System™: contiene il laser, il software, l'alimentatore e il computer.
Interfaccia utente della console	Fornisce all'utente un'interfaccia interattiva per raccogliere o analizzare i dati utilizzando i pulsanti di comando su schermo.
Indicatore spettri buoni	Display grafico per rappresentare il numero degli spettri validi registrati durante un'acquisizione della retrazione.
Maschera di catetere guida	Inclusa nel pacchetto software per rilevare automaticamente un catetere guida. Questa funzione può essere attivata e disattivata dal medico.
Mappa del filo guida	Mappa che consente al medico di identificare possibili artefatti, tra cui quelli causati dalla presenza di un filo guida.
Letterbox	L'aspetto delle informazioni visualizzate in cui viene visualizzato un bordo nero al di sopra e al di sotto del contenuto dell'immagine per riempire una schermata e non distorcere i contenuti dell'immagine.
Indice del carico di core lipidico	Una misura della proporzione totale di core lipidico nel segmento di arteria scansionato su una scala da 0 a 1000 (carico di core lipidico da basso ad alto).

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Immagine composita	Configurazione del display del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ che contiene il chemogram, l'IVUS longitudinale e l'IVUS trasversale con l'alone del chemogram.
Ombelicale	Cavo che collega il controller Makoto™ alla console Makoto™.
XviD	Codec di compressione file video che crea piccoli file video gestibili che possono essere riprodotti su più visualizzatori.

16 Manutenzione

16.1 Informazioni di sistema

Il sistema è caratterizzato da tre componenti principali: una console, un controller (sottosistema di rotazione/retrazione) e il catetere. Questi componenti sono collegati otticamente, elettricamente e meccanicamente.

Il sistema è compatibile con i seguenti accessori:

Kit stampante Bluetooth	(REF. TVC-9BPK)
Cavo schermato Cat5e	(REF. PN2690)
Cavo video schermato DVI-D	(REF. PN2665)
Cavo video e dati integrati	(REF. TVC-10PMC)

I sistemi Makoto Intravascular Imaging System™ (TVC-MC10, TVC-MC10i) prodotti da Infraredx sono realizzati per essere utilizzati con il seguente modello di catetere:

Catetere per imaging IVUS+NIRS Dualpro™	(REF. TVC-C195-42)
---	--------------------

Le specifiche della console del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ e il controller Makoto™ sono elencate di seguito. Le specifiche del catetere per imaging coronarico sono reperibili nella documentazione delle istruzioni per l'uso del catetere inclusa nella confezione del catetere.

16.1.1 Requisiti fisici

- La console Makoto™ occupa un volume di 61 cm (larghezza) x 150 cm (altezza) x 71 cm (profondità) (esclusi cavi e fibre).
- La console Makoto™ dispone di quattro ruote, due delle quali possono essere bloccate in posizione e due che possono essere bloccate in modo direzionale.
- La maniglia della console Makoto™ è progettata per far scorrere la console. La console non può essere sollevata tramite la maniglia.
- Il controller Makoto™ occupa un volume di 12,7 x 15,2 x 43,2 cm (esclusi cavi e fibre).
- Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ pesa 92 kg.

16.1.2 Requisiti ambientali

- La temperatura della stanza in cui viene utilizzata la console deve essere compresa tra 15 °C e 32 °C.
- L'umidità della stanza in cui viene utilizzata la console deve essere compresa tra 20% e 80% (senza condensa).
- La console deve essere trasportata e conservata a una temperatura compresa tra -12 °C e 50 °C.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

- La console deve essere trasportata e conservata a un'umidità relativa compresa tra il 10% e l'85% (senza condensa).
- La temperatura della stanza in cui si utilizza e conserva il catetere compatibile TVC-C195-42 deve essere compresa tra 15 °C e 30 °C.
- Il catetere compatibile TVC-C195-42 non presenta requisiti di umidità relativa rilevanti per il funzionamento o la conservazione. Mantenere il prodotto asciutto.
- Il catetere compatibile TVC-C195-42 deve essere trasportato a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C.
- Il catetere compatibile TVC-C195-42 deve essere trasportato a un'umidità relativa < 85% (senza condensa).

16.1.3 Requisiti elettrici

- Il prodotto funziona tramite una fonte di alimentazione che fornisce nominalmente 100 V CA, 120 V CA, 220 V CA o 240 V CA, 50 - 60 Hertz in monofase. Il modulo di ingresso dell'alimentazione deve essere configurato manualmente per la tensione di ingresso e la fusione appropriati. Per un funzionamento a 100 V CA o 120 V CA si utilizzano due fusibili rapidi 3AG da 5 A, a elevata capacità di interruzione. Per un funzionamento a 240 V CA si utilizzano due fusibili rapidi 3AG da 3 A, a elevata capacità di interruzione.
- Il dispositivo funziona con un singolo cavo di alimentazione.
- Il collegamento dell'alimentazione è di tipo ospedaliero.
- L'apparecchio è un dispositivo elettrico di classe I.
- Parte applicata con tipo di protezione CF.
- Il sistema è in grado di trasmettere e ricevere una comunicazione wireless tramite il protocollo di comunicazione Bluetooth® 2.0.

16.1.4 Requisiti ottici

- Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ contiene un laser nel vicino infrarosso di classe 1M.
- La luce del laser viene trasmessa dalla console al catetere connesso tramite il controller Makoto™ e i cavi di collegamento.

16.1.5 Controller Makoto™

- Velocità di rotazione = 960, 1800 rpm, in senso antiorario visualizzando la presa di collegamento.
- Velocità longitudinale = 0,5, 1,0, 2,0, 10,0 mm/s.
- Intervallo completo di movimento longitudinale = 155 mm (minimo).
- Il controller Makoto™ funziona all'interno di una barriera sterile intermedia del controller Makoto™.

16.2 Responsabilità di installazione

In questa sezione sono descritti i requisiti del sito di installazione e il potenziale ricollocamento del sistema.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

16.2.1 Responsabilità del cliente

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è destinato a essere installato in un laboratorio di cateterismo coronarico. Prima dell'installazione, il sito scelto deve essere preparato come descritto in questa sezione. Il sito deve disporre di sufficiente spazio per ospitare il sistema, deve fornire la configurazione di potenza elettrica e le prese adatte e deve rispettare le specifiche ambientali addizionali descritte di seguito.

È responsabilità del cliente assicurare che la configurazione dell'installazione del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ (TVC-MC10) sia conforme ai requisiti applicabili come descritto nello standard IEC 60601-1.

16.2.2 Responsabilità del produttore

L'installazione del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è eseguita da un rappresentante di assistenza. Dopo l'installazione, il personale Infraredx o un rappresentante autorizzato istruirà il personale designato del laboratorio di cateterismo circa il funzionamento di base e la manutenzione del sistema; queste istruzioni integrano le informazioni più dettagliate presentate in questo manuale.

16.3 Requisiti di installazione

16.3.1 Requisiti della struttura

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è progettato per essere utilizzato in un tipico laboratorio di cateterismo coronarico. Nella maggior parte dei casi, non sono necessarie modifiche speciali alla struttura esistente.

16.3.2 Requisiti di spazio

Il sistema necessita di sufficiente spazio sul pavimento. È richiesto uno spazio libero di circa 40 cm tra il pannello posteriore del sistema e la parete dietro di esso, per garantire lo spazio per il cavo di alimentazione e per consentire la circolazione dell'aria dalle aperture di raffreddamento.

16.3.3 Requisiti elettrici

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è progettato per funzionare con gli impianti elettrici standard disponibili in un laboratorio di cateterismo coronarico.

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è munito di un bullone di terra equipotenziato situato sul retro dell'unità.

16.4 Requisiti ambientali/precauzioni

16.4.1 Qualità dell'aria

Assicurarsi che l'atmosfera sia non corrosiva, senza sali o acidi in sospensione nell'aria. Gli acidi, le sostanze corrosive e i materiali volatili possono facilmente attaccare gli impianti elettrici e le superfici dei componenti ottici.

Mantenere le particelle di polvere sospese nell'aria al minimo. Le particelle di polvere possono causare danni permanenti alle superfici ottiche. La polvere metallica può essere distruttiva per gli apparecchi elettrici.

La console è dotata di un filtro dell'aria. Questo filtro deve essere ispezionato e pulito o sostituito in base alle necessità durante le ispezioni di manutenzione di routine.

16.5 Informazioni generali e di contatto

In generale, il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ non richiede all'utente particolari accorgimenti per la manutenzione. La manutenzione di routine del Controller Makoto™ e le operazioni di pulizia e disinfezione della parte esterna del sistema sono descritte nella sezione 16.5.2 Pulizia e disinfezione.

Gli indicatori di avvertenza e di guasto sono descritti nella sezione 16.6 Indicatori di avvertenza e di guasto, insieme alle risposte raccomandate.

Tutte le rimanenti operazioni di manutenzione e assistenza devono essere eseguite da un rappresentante di assistenza qualificato. La manutenzione preventiva di routine del sistema deve essere eseguita da un rappresentante di assistenza qualificato almeno una volta ogni 12 mesi. Durante ciascuna di queste visite, il rappresentante di assistenza controlla e regola la funzionalità del sistema in base alle necessità.

16.5.1 Informazioni di contatto

Per tutte le richieste di assistenza, manutenzione e sostituzione dei pezzi, contattare il rappresentante commerciale locale e il fornitore di servizi locale oppure chiamare Infraredx, Inc. al numero: +1-800-596-3104.

16.5.2 Pulizia e disinfezione

La parte esterna della console del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ e del controller Makoto™ può essere pulita con un panno morbido inumidito con una soluzione di sapone delicato e acqua. Non vanno utilizzati detergenti aggressivi. Se

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

risulta necessario disinfettare la parte esterna della console Makoto™ o del controller Makoto™, si può utilizzare un panno morbido inumidito con disinfettante ospedaliero.



Gli ospedali e le strutture sanitarie devono seguire il proprio protocollo per la gestione dei rischi di malattie a trasmissione sanguigna.



Prestare attenzione per evitare che i liquidi di pulizia, le soluzioni fisiologiche o altri liquidi penetrino nel controller o nella console Makoto™.



Prestare attenzione per evitare la contaminazione dei connettori ottici del controller Makoto™. Nel caso in cui i connettori in fibra ottica del controller non possano essere puliti, contattare il fornitore di servizi locale o Infraredx per ulteriori istruzioni.

16.6 Indicatori di avvertenza e di guasto

Durante l'uso del sistema Makoto Intravascular Imaging System™, il software di acquisizione dati controlla il collegamento di comunicazione elettrico con il controller Makoto™ e la sorgente di luce laser. Se i dispositivi non sono installati o la comunicazione con uno dei dispositivi non funziona correttamente, il software avverte l'utente con un messaggio di guasto che viene visualizzato in cima allo schermo.

Se si verifica questo guasto, contattare il fornitore di servizi locale o il servizio clienti Infraredx.

Oltre agli indicatori di avvertenza e di guasto elencati sopra, non ve ne sono altri sul sistema Makoto Intravascular Imaging System™.

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

16.7 Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibili cause	Rimedi
Il sistema non si accende	Sistema non collegato	Collegare il sistema; consultare la sezione 6.1.
	Fusibili non funzionanti	Contattare il fornitore di servizi; consultare la sezione 13.1.
Il sistema non rimane acceso	La batteria della CPU è scarica.	Collegare il Sistema alla fonte di alimentazione tra un utilizzo e quello successivo .
	La corrente di alimentazione è instabile.	Provare una diversa fonte di alimentazione o presa di corrente. Rivolgersi al fornitore di servizi, consultare la sezione 13.1.
Nessuna immagine sul monitor della console	Monitor spenti	Individuare e premere il pulsante di accensione sulla parte inferiore del monitor del medico.
		Individuare e premere il pulsante di accensione sul retro del monitor del tecnico.
	Monitor non alimentati	Fissare il cavo di alimentazione nel monitor.
		Contattare il fornitore di servizi; consultare la sezione 13.1.
	Alimentazione video scollegata	Fissare i collegamenti dei cavi del video al monitor.
	Sottosistema di distribuzione video interno non funzionante	Contattare il fornitore di servizi; consultare la sezione 13.1.

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

Sintomo	Possibili cause	Rimedi
Il software del sistema non si avvia, ricevuto errore..	Un componente del sistema non risponde durante le sequenze di avvio.	Spegnere e riaccendere il sistema. Se il problema persiste, contattare il fornitore di servizi, consultare la sezione 13.1.
	Il sistema operativo non riesce ad aprire una configurazione necessaria o un file dati.	Spegnere e riaccendere il sistema. Se il problema persiste, contattare il fornitore di servizi, consultare la sezione 13.1.
Touchscreen non funzionante	Cavo USB allentato	Controllare il collegamento del cavo USB.
	Mouse in movimento	Stabilizzare il mouse o ruotarlo.
	Sistema non correttamente configurato per l'uscita video 1600x1200	Contattare il fornitore di servizi; consultare la sezione 13.1.
Selettore di modalità di revisione disabilitato	Procedura attiva in corso con dati registrati	Procedura di chiusura; consultare la sezione 1.
		Eliminare tutte le scansioni; consultare la sezione 10.2.9.
Esportazione dei dati disabilitata	Nessuna procedura selezionata	Selezionare le procedure; consultare la sezione 12.2.
Esportazione personalizzata disabilitata	Multiple procedure selezionate	Ridurre le selezioni a 1 procedura, consultare la sezione 12.2.4.
Nessuna procedura nella fase di selezione	Tutti i dati rimossi dal sistema	Eseguire più procedure; consultare la sezione 7.
		Importare i dati; consultare la sezione 12.3.

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

Sintomo	Possibili cause	Rimedi
	Il filtro non ha trovato procedure o scansioni applicabili	Rimuovere il filtro; consultare la sezione 12.1.2.
Nessun dispositivo di archiviazione USB riconosciuto	Dispositivo incompatibile	Utilizzare un dispositivo di archiviazione USB alternativo.
	Il dispositivo crittografato ha tentato di caricare i dati o un programma sul sistema di imaging	Utilizzare un dispositivo di archiviazione USB alternativo.
Nessuna immagine dell'IVUS visibile	Valore troppo alto del livello nero o altra regolazione d'immagine impropria.	Ripristinare l'immagine alle impostazioni di fabbrica o regolare il livello di nero; consultare la sezione 10.8.4
	Priming insufficiente del catetere	Risciacquare il catetere con ulteriore soluzione fisiologica eparinizzata, oppure Consultare le istruzioni per l'uso del catetere.
	Trasduttore del catetere non funzionante	Cambiare il catetere.
Immagine dell'IVUS tenue o con sfarfallii	Le impostazioni dell'immagine devono essere regolate	Ripristinare l'immagine alle impostazioni di fabbrica o regolare le impostazioni della singola immagine; consultare la sezione 10.8.3
	Priming insufficiente del catetere	Risciacquare il catetere con ulteriore soluzione fisiologica eparinizzata, oppure Consultare le istruzioni per l'uso del catetere.

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

Sintomo	Possibili cause	Rimedi
La mappa del filo guida è completamente bianca	Fibra ottica del catetere danneggiata	Cambiare il catetere.
Il catetere Dualpro™ non si carica o non si collega.	Il controller non è in posizione LOAD (Caricamento)	Utilizzare i comandi del movimento distale sul controller Makoto™ finché il display non mostra "LOAD".
		Controller fuori taratura. Contattare il fornitore del servizio, consultare la Sezione 13.1.
	La maniglia del catetere non è allineata con la presa del controller.	Orientare la maniglia del catetere con il bottone colorato verso l'alto prima di inserirla nella presa del catetere del controller Makoto™.
	Il nucleo dell'imaging rotatorio del catetere non è allineato con la maniglia del catetere.	Utilizzando il coperchio, girare il nucleo di modo che i colori del nucleo corrispondano ai pulsanti sulla maniglia.
Il Catetere Dualpro™ non si scarica o non si sconnette (la parte centrale interna resta connessa dopo che la maniglia è stata rimossa)	Il controller non è nella posizione READY al momento della sconnessione	Riconnettere la maniglia del catetere e far avanzare il controller nella posizione READY prima di provare a sconnettere.
	I pulsanti della maniglia del catetere sono premuti durante la rimozione.	Riconnettere la maniglia del catetere, regolare l'impugnatura per evitare di premere i pulsanti colorati sulla maniglia del catetere durante la sconnessione.

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

Sintomo	Possibili cause	Rimedi
		Rimuovere la guarnizione della barriera sterile dalla presa del controller. Inserire la maniglia nella guarnizione e connettere la presa del controller nella barriera. Riprovare a rimuovere il catetere.
Il chemogram non viene generato	Acquisizione Live IVUS eseguita	Durante le acquisizioni Live IVUS non vengono generati chemogram. Consultare la sezione 9.1.
	Distanza di retrazione insufficiente	Ripetere l'acquisizione della retrazione automatica con una lunghezza maggiore; consultare la sezione 9.2.2.
	Segnale ottico eccessivamente basso registrato durante la scansione.	Tornare su READY, scaricare quindi caricare nuovamente il catetere. Riprovare la scansione.
	Fibre ottiche del catetere danneggiate	Cambiare il catetere, quindi riprovare.
	Guasto del componente ottico del sistema	Contattare il fornitore di servizi; consultare la sezione 13.1.
Il chemogram è coperto da macchie scure	Fonte biologica dell'artefatto: riflesso di un trombo in eccesso	Escludere l'analisi del chemogram in questa regione o ripetere l'acquisizione automatica. Consultare la sezione 9.3.
	Fonte non biologica dell'artefatto: riflesso di uno spazio denso di stent sovrapposti o coperti	Escludere l'analisi del chemogram in questa regione o ripetere l'acquisizione automatica. Consultare la sezione 9.3.

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

Sintomo	Possibili cause	Rimedi
	Fonte biologica dell'artefatto: profondità sanguigna eccessiva	Escludere l'analisi del chemogram in questa regione o ripetere l'acquisizione automatica. Consultare la sezione 9.3.
	Fibre ottiche del controller sporche	Contattare il fornitore di servizi; consultare la sezione 13.1.
	Malfunzionamento del controller.	Contattare il fornitore di servizi; consultare la sezione 13.1.
	Fibre ottiche del catetere sporche	Cambiare il catetere, quindi riprovare.
	Fibre ottiche del catetere danneggiate	Cambiare il catetere, quindi riprovare.
Il controller non ripristina il nucleo imaging alla posizione READY [PRONTA] o non si muove distalmente	Tentativo di spostare il nucleo di imaging in una finestra di trasmissione ritorta	Seguire le istruzioni sullo schermo. Spianare le piegature e riprovare. Se il problema persiste, cambiare il catetere e riprovare.
	Il nucleo imaging del catetere è legato o danneggiato.	Rimuovere attentamente il la maniglia del catetere e poi il nucleo imaging, facendo trazione sul tronco del catetere.
Il carrello interno del controller non si muove quando il motore è in funzione e i pulsanti di traslazione sono premuti.	Il controllore ha logorato il meccanismo del drive.	Contattare il fornitore del servizio, consultare la Sezione 13.1.

16.8 Parti di ricambio

Per informazioni sugli ordini, contattare il fornitore di servizi locale o Infraredx, Inc. al numero: +1-800-596-3104.

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

16.9 Dismissione del sistema Makoto™ Imaging System

Per informazioni relative alla dismissione in sicurezza del sistema, rivolgersi al fornitore di servizi locale oppure alla Infraredx, Inc. al seguente numero telefonico:

1-800-596-3104.

17 Appendici

17.1 Appendice A: Garanzia e informazioni relative

La maggior parte delle richieste di supporto di assistenza che si verificano durante il primo anno dall'acquisto del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è coperta dalla nostra garanzia, come spiegato nelle seguenti sezioni. Per il supporto non specificamente coperto ai sensi della garanzia Infraredx, forniremo il supporto sulla base delle singole chiamate. Contattare l'Infraredx Field Service Department al numero +1-800-596-3104 per il supporto degli apparecchi per il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ o per informazioni sui programmi di supporto di assistenza disponibili.

Garanzia

Infraredx garantisce che tutti i componenti standard del suo sistema Makoto Intravascular Imaging System™ sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di un (1) anno. Infraredx riparerà o sostituirà, a sua discrezione, tutti i componenti difettosi durante questo periodo di garanzia. Qualsiasi sostituzione di tale tipo potrà includere parti o componenti rinnovati. Dopo la scadenza del periodo della garanzia iniziale o di qualsiasi garanzia estesa di acquisto, i servizi di riparazione potranno essere acquistati da Infraredx secondo il suo listino prezzi.

Infraredx garantisce che il software progettato per l'uso con lo strumento eseguirà le proprie istruzioni di programmazione laddove correttamente installato. Infraredx fornirà qualsiasi correzione del software o "bug-fix" se e quando questi diventino disponibili, gratuitamente, per un periodo di un (1) anno dall'installazione. Il periodo di garanzia inizierà alla data dell'installazione iniziale per l'hardware e il software installati dal personale Infraredx a meno che la data di installazione non sia stata ritardata su richiesta del cliente. Le garanzie precedenti non si applicano a difetti derivanti da errato utilizzo, negligenza o incidenti, tra cui, a titolo esemplificativo: utilizzo da parte di operatori non qualificati; funzionamento al di fuori delle specifiche ambientali per lo strumento o per gli accessori; manutenzione impropria o inadeguata da parte dell'utente; installazione di software o sistemi di interfaccia non forniti da Infraredx; effettuazione di modifiche allo strumento o al software non autorizzate da Infraredx; effettuazione di riparazioni da parte di chiunque tranne Infraredx o un agente di riparazione autorizzato da Infraredx.

Spedizioni in garanzia, restituzioni e correzioni

Un reclamo di garanzia deve essere presentato tempestivamente e deve essere ricevuto da Infraredx durante il periodo di garanzia applicabile. Nel caso in cui risulti necessario restituire un prodotto per farlo riparare e/o correggere, si deve ottenere una Return Merchandise Authorization (RMA, Autorizzazione della merce in restituzione) dal reparto del servizio clienti Infraredx (+1-800-596-3104). Infraredx fornirà le istruzioni relative a come e dove spedire i prodotti. Qualsiasi prodotto o componente restituito per un esame o per la riparazione di garanzia dovrà essere inviato con posta assicurata e prepagata tramite i mezzi di trasporto specificati dal servizio clienti di Infraredx.

Le spese di spedizione per tutti i prodotti o componenti sostituiti o riparati in garanzia saranno interamente a carico dell'acquirente. In tutti i casi, Infraredx ha la sola responsabilità di determinare la causa e la natura del guasto di un prodotto o componente, e la determinazione di Infraredx a tale riguardo sarà definitiva.

Decontaminazione delle apparecchiature restituite

Per rispettare le leggi postali e di trasporto degli Stati Uniti, le apparecchiature restituite a Infraredx devono essere correttamente decontaminate con un germicida chimico che sia approvato per l'uso come disinfettante ospedaliero. Se le apparecchiature vengono ricevute senza essere state decontaminate, Infraredx addebiterà i costi di pulizia al cliente.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Limitazioni

Questa garanzia non copre il catetere intravascolare IVUS+NIRS Dualpro™ e i relativi componenti del test, né altre apparecchiature OEM che non siano incluse nel sistema Makoto Intravascular Imaging System™. Questa garanzia non copre la normale calibrazione, pulizia o manutenzione del sistema. Qualsiasi prodotto restituito a Infraredx senza previa autorizzazione sarà restituito a spese del mittente. Infraredx si riserva il diritto di modificare o sospendere questo prodotto, le relative specifiche e il suo prezzo senza preavviso.

Risarcimento

L'acquirente acconsente a risarcire e a indennizzare Infraredx da e contro qualsiasi azione, procedimento, responsabilità, reclamo, multa, danno, perdita o spesa, incluse le ragionevoli parcelle degli avvocati e le spese legali (le "Perdite") subite o imposte in relazione a qualsiasi azione, causa legale, reclamo o domanda, presentati da terze parti, inclusi, a titolo esemplificativo, quelli derivanti dalla violazione di leggi locali, statali o federali in relazione al prodotto o al suo uso, incluse, a titolo esemplificativo, le Perdite relative a ispezione impropria, lesioni a qualsiasi persona o danni o distruzione di qualsiasi proprietà, selezione dei pazienti, applicazione, operazione o utilizzo di prodotti Infraredx, incluso l'uso multiplo di articoli monouso, tranne per quelle Perdite risultanti dalla sola ed esclusiva negligenza di Infraredx, dei suoi dipendenti e degli agenti debitamente autorizzati. Nessun agente, dipendente o rappresentante di Infraredx detiene alcuna autorità per variare alcunché di quanto esposto in precedenza, o per far assumere, o vincolare Infraredx ad alcun obbligo o responsabilità aggiuntiva in connessione con il prodotto.

Licenze

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ è composto di hardware e software sviluppati da e di proprietà di Infraredx, Inc., e di software ottenuti in licenza da Infraredx da vari concessionari di licenze software ("Fornitori di software di Infraredx"). I prodotti software installati di Infraredx e dei Fornitori di software di Infraredx, così come tutti i mezzi di comunicazione associati, i materiali stampati, e la documentazione "online" o elettronica ("SOFTWARE") sono protetti dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali sul copyright, così come da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Il software viene fornito all'utente ai sensi di una licenza o sublicenza non trasferibile e non esclusiva per l'uso da parte esclusivamente dell'utente in relazione all'utilizzo del sistema Makoto Intravascular Imaging System™, la cui licenza potrebbe essere più compiutamente stabilita in un contratto di licenza separato con il prodotto. Con la presente non viene trasferito all'utente alcun titolo o possesso del SOFTWARE né di alcuna sua parte. È possibile utilizzare il SOFTWARE soltanto sul sistema Makoto Intravascular Imaging System™. Non è possibile: (1) copiare (tranne che per scopi di backup), distribuire, noleggiare, affittare o concedere in sublicenza alcuna parte del SOFTWARE; (2) modificare o realizzare lavori derivati del SOFTWARE; (3) mostrare pubblicamente le visualizzazioni del SOFTWARE; o (4) trasmettere il SOFTWARE via rete, telefono o elettronicamente, utilizzando qualsiasi altro mezzo. L'utente acconsente a mantenere riservati e a fare del proprio meglio per prevenire e proteggere i contenuti del SOFTWARE da divulgazione o uso non autorizzati. Non è possibile sottoporre a reingegnerizzazione, decompilare o disassemblare il SOFTWARE, tranne e solo nella misura in cui tale attività sia espressamente permessa dalla legge applicabile.

Infraredx GARANTISCE CHE È STATA IMPIEGATA RAGIONEVOLE CURA NEL DESIGN E NELLA PRODUZIONE DEL PRODOTTO VENDUTO CON LA PRESENTE. IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È" E Infraredx NON GARANTISCE CHE IL SUO FUNZIONAMENTO SARÀ ININTERROTTO O ESENTE DA ERRORI O DA BUG. TUTTI I RISCHI PER QUANTO RIGUARDA LA QUALITÀ SODDISFACENTE, LE PRESTAZIONI, L'ACCURATEZZA E LO SFORZO (INCLUSA LA MANCANZA DI NEGLIGENZA) GRAVANO SULL'UTENTE. INOLTRE, NON VI È GARANZIA CONTRO EVENTUALI INTERFERENZE CON L'UTILIZZO DEL SOFTWARE O CONTRO EVENTUALI VIOLAZIONI. **LA PRESENTE GARANZIA E I RISARCIMENTI STABILITI SOPRA SOSTITUISCONO ED ESCLUDONO QUALSIASI ALTRA GARANZIA NON ESPRESSAMENTE STABILITA QUI, CHE SIA ESPRESSA O IMPLICITA PER AZIONE DI LEGGE O ALTRIMENTI, INCLUSA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO.**

LA GESTIONE, LA CONSERVAZIONE, LA PULIZIA E LA STERILIZZAZIONE DEL PRODOTTO, COSÌ COME ALTRI FATTORI RELATIVI AL PAZIENTE, ALLA DIAGNOSI, AL TRATTAMENTO, ALLE

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

PROCEDURE CHIRURGICHE E ALTRE MATERIE AL DI LÀ DEL CONTROLLO DI INFRAREDx INCIDONO DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO E SUI RISULTATI OTTENUTI DAL SUO USO. INFRAREDx DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI PERDITA, DANNO O SPESA INCIDENTALE O CONSEGUENTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PERDITA D'USO, PERDITE COMMERCIALI, PERDITA DI RICAVI, PROFITTI, DATI O AVVIAMENTO) ANCHE SE INFRAREDx È A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. INFRAREDx NON SI ASSUME, NÉ AUTORIZZA QUALSIASI ALTRA PERSONA AD ASSUMERE PER SUO CONTO, QUALSIASI ALTRA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AL PRODOTTO.

INFRAREDx NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AI DISPOSITIVI CHE VENGONO RIUTILIZZATI, RIGENERATI O RISTERILIZZATI E NON OFFRE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA COMMERCIALIZZABILITÀ O L'IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO IN RELAZIONE A TALI DISPOSITIVI.

Restrizioni per l'esportazione

Salvo diversamente concordato con Infraredx, se si esporta il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ l'utente si assume tutta la responsabilità per ottenere qualsiasi autorizzazione all'esportazione richiesta e dovrà rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili di tutte le autorità governative, incluso, a titolo esemplificativo, l'Export Administration Act. L'utente non può esportare o riesportare dati tecnici forniti da Infraredx o il prodotto diretto di tali dati in violazione delle norme applicabili sulle esportazioni. L'utente riconosce che il software proviene dagli Stati Uniti. L'utente acconsente a rispettare tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili al software, incluse le U.S. Export Administration Regulations, così come le restrizioni sull'utente finale, sull'uso finale e sul Paese di destinazione emanate dagli Stati Uniti e da altri governi.

17.2 Appendice B: Sintesi degli studi ex vivo e clinici

Il sistema di imaging vicino all'infrarosso (NIR) di Infraredx è stato sviluppato per identificare le placche di interesse di core lipidico (LCP) nelle arterie coronarie. L'algoritmo di rilevamento LCP per questo sistema è stato sviluppato dai dati raccolti nei cuori provenienti da autopsie in uno studio *ex vivo*. In parallelo, le misurazioni NIR delle arterie coronarie venivano raccolte *in vivo* in uno studio clinico cardine (SPECTACL). Lo studio *ex vivo* ha valutato in prospettiva la precisione delle letture NIR confrontate con l'istologia, mentre lo studio clinico ha valutato in prospettiva l'equivalenza delle misurazioni *in vivo* ed *ex vivo*.

17.2.1 Studio ex vivo

Obiettivo dello studio

L'obiettivo dello studio *ex vivo* era calibrare e convalidare in prospettiva il sistema di imaging NIR di Infraredx per il rilevamento delle LCP. La calibrazione e la convalida del sistema sono state eseguite usando le arterie coronarie provenienti da cuori umani di autopsie in cui i criteri istologici predefiniti fungevano da metodo di comparazione.

Strutturazione dello studio

La calibrazione e la convalida del sistema Infraredx è stata eseguita acquisendo dati spettroscopici e istologici co-registrati da 84 cuori umani, 33 dei quali sono stati usati nello sviluppo della calibrazione e 51 nella convalida finale. L'insieme dei dati di calibrazione è stato utilizzato per costruire un modello di discriminazione multivariato per rilevare la presenza di LCP dalle misurazioni di scansione NIR. Questo modello è stato quindi convalidato in prospettiva testando le sue prestazioni di rilevamento LCP sull'insieme dei dati di convalida.

Ciascun segmento arterioso nella calibrazione e nella convalida è stato montato in un'installazione ideata per consentire la perfusione con il sangue e la registrazione precisa del sito della misurazione NIR con le successive sezioni istologiche. Tutte le scansioni sono state eseguite con un dispositivo automatico di retrazione e rotazione che tirava la punta ottica lungo la lunghezza dell'arteria a 0,5 mm/s con una velocità di rotazione di 240 rpm. Gli spettri individuali venivano raccolti a una velocità di circa 40 Hz. Con una lunghezza di segmento media di quasi 50 mm, questa configurazione ha dato come risultato una media prossima ai 4000 punti di tessuto interrogati per segmento. L'LCP è stato definito come fibroateroma con core lipidico maggiore di 60 gradi in un'estensione di circonferenza non contigua, maggiore di 200 micron di spessore in media, e coperto da un cappuccio fibroso avente uno spessore medio di 0 - 450 micron. Una sezione istologica è stata analizzata per ogni inter-sezione (blocco) di 2 mm di arteria. Le caratteristiche istologiche delle arterie sono state classificate da un patologo in base allo schema "modified AHA classification" (Virmani R, Kolodgie FD, Burke AP, Farb A, Schwartz SM. Lessons From Sudden Coronary Death: A Comprehensive Morphological Classification Scheme for Atherosclerotic Lesions. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2000; 20(5):1262-1275).

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Tabella 1. Caratteristiche demografiche dei donatori, anamnesi e causa della morte

Caratteristiche	(n=51)
Profilo demografico	
Maschio, n (%)	36 (71)
Età media +/- DS, anni	65,9 ± 15
Anamnesi, n (%)	
Ipertensione	31 (61)
Fumatore cronico	21 (41)
Diabete mellito	17 (33)
CHF pregressa	16 (31)
MI pregresso	11 (22)
CABG pregresso	4 (8)
Causa di decesso, n (%)	
Relativa all'apparato cardiovascolare	40 (78)
Non relativa all'apparato cardiovascolare	8 (16)
Sconosciuta	3 (6)

Punti finali dello studio

L'accuratezza diagnostica del sistema Infraredx è stata valutata in tre punti finali di studio usando l'area sotto la curva (AUC) della curva Receiver Operating Characteristic (ROC, Caratteristica operante del ricevitore) per due usi clinici: accuratezza del rilevamento dell'LCP e determinazione del carico di core lipidico totale di un segmento di arteria scansionato.

Punto finale primario: accuratezza di immagine nel rilevamento dell'LCP senza riguardo allo spessore del cappuccio

L'accuratezza del rilevamento localizzato è stata valutata per tutti i blocchi da 2 mm adeguati di un'arteria scansionata utilizzando l'analisi ROC dei valori di intensità chemogram dei blocchi rispetto ai confronti istologici accoppiati per i blocchi aventi un diametro del lumen inferiore o uguale a 3,0 mm. L'intensità chemogram del blocco è l'intensità al 90° percentile dei pixel del chemogram in un blocco di 2 mm di arteria scansionata, che visivamente corrisponde al 10% dei pixel più gialli nel blocco. Il confronto istologico consisteva nella presenza o assenza di LCP in ciascun blocco da 2 mm. L'accordo positivo e negativo percentuale dei valori chemogram dei blocchi con soglia è stato calcolato con una variazione della soglia su tutte le possibili soglie così da coprire la curva ROC, ed è stata calcolata l'area sotto la curva ROC (AUC). Per il punto finale primario non è stata imposta alcuna restrizione sullo spessore del cappuccio della placca nella definizione dell'LCP.

Punto finale secondario 1: accuratezza dell'immagine nel rilevare l'LCP con uno spessore del cappuccio <0,45 mm

Questo punto finale secondario utilizzava la stessa ipotesi e gli stessi metodi di analisi del punto finale primario ma restringeva la definizione di LCP a quelle placche con uno spessore

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

del cappuccio inferiore a 0,45 mm in media. Le LCP con uno spessore del cappuccio superiore o uguale a 0,45 mm sono state analizzate come parte del gruppo negativo.

Punto finale secondario 2: accuratezza dell'indice del carico di core lipidico

Questo punto finale secondario dello studio di convalida CDEV3 supportava un uso secondario del sistema: la valutazione complessiva del carico di core lipidico in un segmento di arteria scansionato utilizzando l'indice di carico del core lipidico (LCBI). L'accuratezza di questa misura è stata valutata per tutti i segmenti di arteria scansionati adeguati utilizzando l'analisi ROC dei valori LCBI rispetto ai confronti istologici accoppiati. Tutti i diametri del lumen sono stati inclusi nell'analisi. L'LCBI è la frazione di pixel chemogram di un segmento scansionato con intensità superiore a 0,6, che corrisponde visivamente a una transizione dal rosso all'arancione scuro sul chemogram. Il confronto istologico consisteva nella presenza o assenza di fibroateroma di qualsiasi dimensione nel segmento scansionato. L'accordo positivo e negativo percentuale dei valori LCBI con soglia è stato calcolato con una variazione della soglia su tutte le possibili soglie così da coprire la curva ROC, ed è stata calcolata l'area sotto la curva ROC (AUC).

Risultati dello studio

Il sistema AUC complessivo per il rilevamento di LCP senza riguardo allo spessore del cappuccio è risultato essere 0,80 (95% intervallo di confidenza 0,76 –0,85) nelle arterie con diametri del lumen inferiori o uguali a 3,0 mm. Nel rilevamento di LCP con cappucci inferiori a 0,45 mm di spessore, l'AUC era ugualmente 0,80 (95% intervallo di confidenza 0,76 –0,84). L'AUC per il rilevamento della presenza di qualsiasi fibroateroma lungo un segmento di arteria usando l'LCBI era 0,86 (97,5% intervallo di confidenza 0,80 –0,91) per tutti i diametri di arteria. La Tabella 2 riassume i risultati di accuratezza diagnostica per i 3 punti finali dello studio. Figura 17-1 mostra i valori di accordo percentuale corrispondenti come funzioni della soglia di intensità chemogram dei blocchi (punto finale primario e punto finale secondario 1) o come soglia LCBI (punto finale secondario 2).

Tabella 2: Risultati di accuratezza per i tre punti finali dello studio ex vivo

Punto finale dello studio	AUC
Punto finale primario: accuratezza di immagine nel rilevamento di LCP senza riguardo allo spessore del cappuccio ¹	0,80 (95% IC: 0,76 - 0,85)
Punto finale secondario 1: accuratezza di immagine nel rilevamento di LCP con spessore del cappuccio <0,45 mm ¹	0,80 (95% IC: 0,76 - 0,84)
Punto finale secondario 2: accuratezza dell'indice del carico di core lipidico ²	0,86 (97,5% IC: 0,80 - 0,91)

¹ 51 cuori, 122 segmenti, 1909 blocchi da 2 mm; diametro del lumen medio ≤ 3 mm

² 51 cuori, 120 segmenti

17.2.2 Studio clinico cardine

Obiettivo dello studio

L'obiettivo complessivo dello studio di SPECTACL era valutare la similarità delle misurazioni ottenute sotto condizioni cliniche con quelle acquisite da campioni autoptici. Non erano disponibili confronti istopatologici per i pazienti clinici: ciò ha precluso quindi la valutazione diretta dell'accuratezza delle immagini delle arterie NIR *in vivo*. Pertanto, lo studio ha utilizzato i dati spettrali sottostanti le immagini per dimostrare che le informazioni acquisite *in vivo* erano simili alle informazioni utilizzate nello studio *ex vivo*.

Strutturazione dello studio

SPECTACL era uno studio clinico multicentrico prospettico di pazienti sottoposti a intervento coronarico percutaneo elettivo o non di emergenza di una lesione arteriosa coronarica nativa *de novo*. Sono stati selezionati i pazienti con angina stabile o progressiva, così come i pazienti con sindrome coronarica acuta stabilizzata. Lo studio clinico SPECTACL era progettato per mostrare che le caratteristiche spettrali dei dati acquisiti nei pazienti erano sostanzialmente simili alle caratteristiche spettrali dei dati raccolti nello studio *ex vivo*.

Periodo di studio, siti clinici e arruolamento

Lo studio cardine SPECTACL è stato condotto in un periodo di 21 mesi presso 6 sedi cliniche negli Stati Uniti e in Canada. Durante questo periodo sono stati coinvolti nello studio 106 pazienti in totale. Le immagini NIR non sono state ottenute in 17 di questi pazienti, quindi i dati per l'analisi provenivano da 89 pazienti. Le ragioni per la mancata acquisizione di immagini NIR sono state: l'incapacità di individuare i vasi sanguigni (7), il guasto del dispositivo (7), l'errore procedurale (2) e la configurazione non corretta degli accessori (1).

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

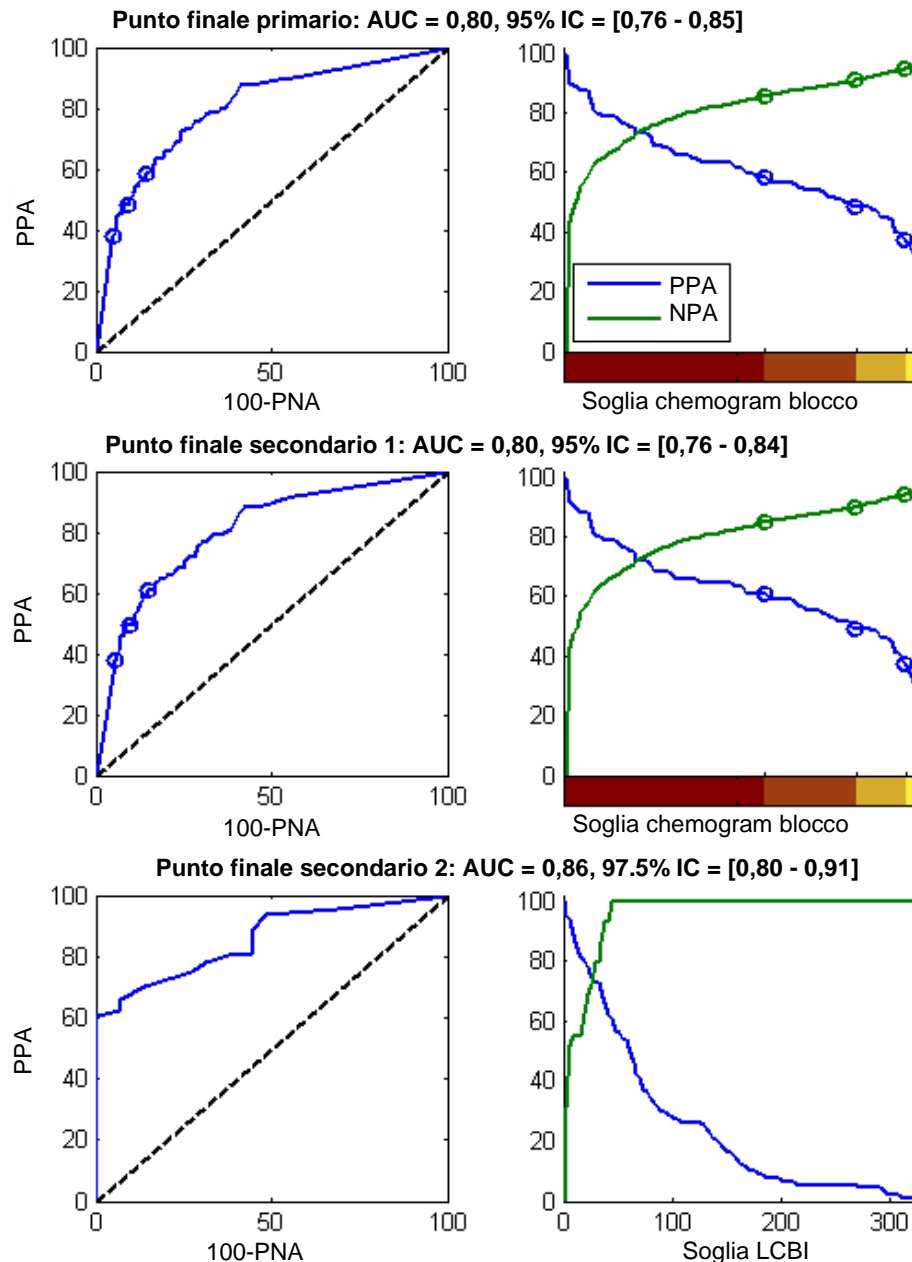


Figura 17-1. Curve ROC (colonna sinistra) e le curve di accordo positivo e negativo percentuale rispetto alla soglia del test (colonna destra) per i 3 punti finali dello studio.
A: Punto finale primario - Nessuna soglia di spessore del cappuccio. L'accuratezza del chemogram rispetto all'istologia in blocchi da 2 mm (51 cuori, 122 segmenti e 1909 blocchi da 2 mm). Le tre soglie colorate sul chemogram dei blocchi (delineanti il rosso, l'arancione scuro, l'arancione chiaro e il giallo) determinano le percentuali di accordo positivo e negativo indicate dai cerchi.
B: Punto finale secondario 1 - Una soglia di spessore del cappuccio di 450 micron.
C: Punto finale secondario 2 - Accuratezza dell'indice del carico di core lipidico (LCBI) rispetto all'istologia (51 cuori, 120 segmenti).
 PPA: accordo positivo percentuale. PNA: accordo negativo percentuale.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Tra gli 89 pazienti, i dati per 30 dei pazienti erano non ciechi durante il corso dello studio clinico per lo sviluppo dell'algoritmo. Come risultato, sono rimaste le immagini NIR di 59 pazienti per una valutazione prospettica di similarità delle misurazioni NIR *in vivo* ed *ex vivo*.

Tabella 3: Dati demografici e caratteristiche cliniche ex vivo

Dati demografici	n=18 cuori (%)
Età (anni)	
Età media +/- DS	65 ± 14
Sesso	
Maschio	13 (72)
Razza	
Caucasica	17 (94)
Afroamericana	0
Asiatica	1 (6)
Isole del Pacifico	0
Nativo americano	0
Altro	0
Anamnesi	
Storia familiare di arteriopatia coronarica	9 (50)
Ipertensione	14 (78)
Diabete mellito	6 (33)
Uso di tabacco	9 (50)
Infarto miocardico pregresso	1 (6)
Incidente cerebrovascolare/ attacco ischemico transitorio	9 (50)
Insufficienza cardiaca congestizia	3 (17)
Causa di decesso	
Relativa all'apparato cardiovascolare	11 (61)
Non relativa all'apparato cardiovascolare	3 (17)
Sconosciuta	4 (22)

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

Tabella 4: Dati demografici dei pazienti in vivo, anamnesi e presentazione clinica

Dati demografici	n = 106 (%) ¹	n = 48 (%) ²
Età (anni)		
Media +/- DS	61,7 ± 10,0	61,4 ± 9,2
Sesso		
Maschio	86 (81)	38 (79)
Razza		
Caucasica	95 (90)	40 (83)
Afroamericana	5 (5)	2 (4)
Asiatica	1 (1)	1 (2)
Isole del Pacifico	0 (0)	0 (0)
Nativo americano	0 (0)	0 (0)
Altro	4 (4)	4 (8)
Sconosciuta/non riportata	1 (1)	1 (2)

¹ Numero totale di pazienti coinvolti

² Numero di pazienti in gruppo di convalida prospettica con retrazioni spettralmente adeguate (vedere **Risultati dello studio**)

Anamnesi	n = 106 (%)	n = 48 (%)
Iperlipidemia	70 (66)	36 (75)
Ipertensione	74 (70)	36 (75)
Diabete mellito	23 (22)	11 (23)
Infarto miocardico pregresso	16 (15)	5 (10)
Intervento percutaneo pregresso	28 (26)	13 (27)
Impianto di bypass artero-coronarico	3 (3)	0 (0)
Incidente cerebrovascolare/attacco ischemico transitorio	0 (0)	0 (0)
Malattia vascolare periferica	4 (4)	2 (4)
Storia familiare di arteriopatie coronariche	46 (43)	19 (40)
Dolore al petto negli ultimi 7 giorni	67 (63)	33 (69)
Angina stabile	54 (51)	27 (56)
Insufficienza cardiaca congestizia	6 (6)	0 (0)

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Presentazione clinica	n = 106	n = 48
Infarto post-miocardico	15 (14)	8 (17)
Angina instabile	10 (9)	7 (15)
Angina stabile	40 (38)	16 (33)
Studio funzionale positivo	25 (24)	14 (29)
Dolore al petto atipico	9 (8)	0 (0)
Insufficienza cardiaca congestizia	1 (1)	0 (0)
Altro	6 (6)	3 (6)

Sicurezza

Mentre lo studio SPECTACL non aveva la possibilità di valutare la sicurezza dello strumento Infraredx, il monitoraggio degli eventi avversi ha assicurato che il profilo di sicurezza fosse simile a quello visto con cateteri simili. Dal momento che il catetere Infraredx è simile al catetere IVUS nelle caratteristiche fisiche e nell'impiego, ci si aspettava che le frequenze e i tipi di eventi avversi associati con il dispositivo Infraredx nello studio SPECTACL sarebbero stati simili a quelli della ben documentata esperienza con i cateteri IVUS in un gruppo di pazienti PCI simile.

Punto finale dello studio

Il punto finale primario di SPECTACL è stato giudicato in prospettiva valutando la frazione di pazienti con una retrazione simile ai dati delle autopsie nel training set dell'algoritmo LCP. Le retrazioni di pazienti individuali sono state considerate simili alle misurazioni *ex vivo* se più dell'80% degli spettri di qualità adeguata nella retrazione rispettavano le soglie sulle metriche di similarità, come descritto di seguito.

Adeguatezza spettrale

Le retrazioni spettralmente inadeguate erano considerate di scarsa qualità come risultato di ostruzioni o errori nell'acquisizione dei dati e sono state escluse dall'analisi di similarità. L'adeguatezza spettrale dei singoli spettri è stata determinata sulla base di numerose metriche individuali. Queste metriche erano progettate per identificare le ostruzioni nel percorso del raggio ottico che potevano distorcere la misurazione spettrale. Gli elementi isolati di ostruzione comprendevano:

- Spettri raccolti con il filo guida che ostruiva la parete arteriosa.
- Spettri raccolti con la punta ottica all'interno del catetere guida.
- Spettri segnalati con bandiera dalla metrica di oscillazione (ad es. qualità scadente delle connessioni ottiche, microbolle nella soluzione salina di priming con cui sono stati riempiti i cateteri).
- Spettri segnalati con bandiera dalla metrica di visibilità della parete (parete arteriosa non visibile a causa della quantità eccessiva di sangue interposto).

Allo scopo di valutare la qualità dei dati, una retrazione veniva suddivisa in blocchi da 2 mm contigui e ciascuno di essi era valutato per l'adeguatezza spettrale. Un blocco era

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

giudicato spettralmente adeguato se più del 75% degli spettri all'interno del blocco erano adeguati. A sua volta, una retrazione veniva considerata spettralmente adeguata se più del 75% dei blocchi al suo interno erano adeguati.

Similarità spettrale

Sono state utilizzate due metriche multivariate per valutare la similarità tra uno spettro e quelli nel gruppo di calibrazione del modello: la distanza Mahalanobis (MD, Mahalanobis distance) e il rapporto F spettrale (SFR). La prima è una misura della distanza ponderata di covarianza tra un punto e il centroide di un insieme di punti in uno spazio multidimensionale. Per uno spettro di predizione x e lo spettro medio y del gruppo di calibrazione, la metrica MD è data da (in unità quadrate)

$$MD = (x - y)' S^{-1} (x - y), \quad (1)$$

dove S^{-1} è l'inverso della matrice di covarianza del training set. Dal momento che i dati nell'applicazione del sistema sono bimodali (positivi o negativi per l'LCP), sono state calcolate MD separate relative a ciascuna classe. Ovvero, una MD veniva calcolata rispetto al sottogruppo di spettri di calibrazione con riferimento LCP positivo (MD+), e l'altra era calcolata rispetto al sottogruppo di spettri di calibrazione con riferimento LCP negativo (MD-). Un certo spettro di convalida viene assegnato alla più piccola delle due distanze (MD+ o MD-).

L'SFR è una misura della somma di residui quadrati dello spettro di convalida alla somma media di residui quadrati del gruppo di calibrazione. Il residuo spettrale è la differenza tra lo spettro stimato costruito in uno spazio di proiezione dimensionale inferiore circondato dal modello e dallo spettro effettivamente misurato. Per i residui spettrali e_{val} e e_{cal} corrispondenti rispettivamente alla convalida e alla calibrazione degli spettri, l'SFR è dato da

$$SFR = m \left(\sum_{k=1}^n e_{val,k}^2 \right) / \left(\sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n e_{cal,i,k}^2 \right), \quad (2)$$

per m spettri di calibrazione e n lunghezze d'onda in uno spettro.

Una retrazione era giudicata simile se almeno l'80% degli spettri adeguati nella retrazione si trovavano sotto le soglie per entrambe le metriche MD e SFR. Le soglie MD e SFR venivano stabilite nella calibrazione ex vivo come parte dei parametri dell'algoritmo.

Verifica dell'ipotesi

L'ipotesi nulla da testare era:

$$H_0: p \leq 0,67$$

$$H_a: p > 0,67$$

dove p è la proporzione di pazienti che mostrano similarità spettrale tra le registrazioni cliniche e il gruppo di dati dell'autopsia. L'ipotesi nulla era da rifiutare e quindi il punto finale primario veniva raggiunto, se il limite inferiore dell'intervallo di confidenza 95% superava lo 0,67.

Risultati dello studio

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

Nella convalida sono state valutate un totale di 59 retrazioni di pazienti (una retrazione per ciascun paziente). Undici retrazioni sono state giudicate di inadeguata qualità spettrale a causa della connessione ottica scadente, del numero eccessivo di bolle nella soluzione fisiologica di priming con cui sono stati riempiti i cateteri, dei disturbi del flusso sanguigno o dell'oscuramento della parete arteriosa a causa dell'eccessiva quantità di sangue. Tra le 48 retrazioni di qualità adeguata, 40 sono risultate spettralmente simili agli spettri ex vivo, per un tasso di successo di 0,83 (95% intervallo di confidenza, 0,70-0,93). Questo tasso di successo ha soddisfatto il punto finale primario dello studio cardine SPECTACL dimostrando che il limite inferiore sull'intervallo di confidenza del 95% superava lo 0,67. Figura 17-2 è un tracciato della similarità percentuale di ciascuna delle 48 retrazioni. La linea tratteggiata orizzontale rappresenta il valore mediano della similarità spettrale (96%) delle retrazioni. La linea continua orizzontale indica il limite inferiore per giudicare la similarità spettrale di una retrazione.

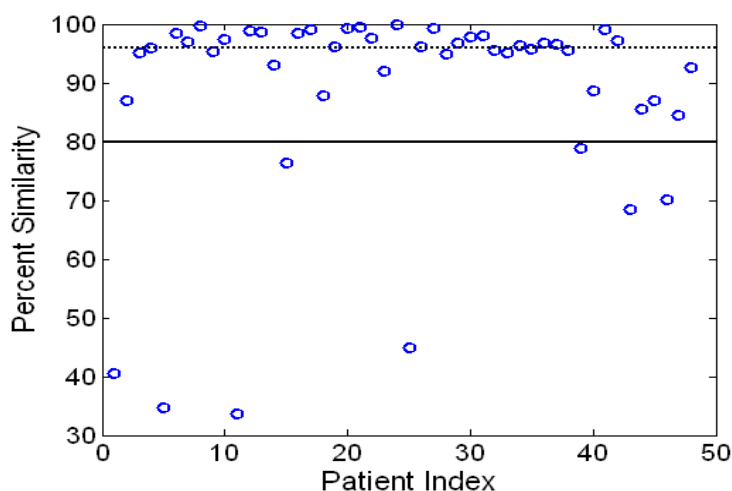


Figura 17-2. Similarità percentuale di retrazioni corrette. La linea tratteggiata è la similarità percentuale mediana (96%). La similarità percentuale è definita come la percentuale di spettri in una retrazione che rientrano in entrambe le soglie metriche di MD e SFR. La linea nera continua rappresenta la soglia minima dell'80% per definire una retrazione simile a livello spettrale. Quaranta delle 48 retrazioni (0,83) hanno una similarità percentuale al di sopra della soglia. Il confronto degli spettri dello studio SPECTACL *in vivo* è eseguito in relazione agli spettri di calibrazione CDEV3 *ex vivo* (18 cuori).

Un ulteriore diagramma che illustra la similarità degli spettri raccolti nei pazienti con quelli misurati nei campioni autoptici è riportato nella Figura 17-3. Il grafico mostra la metrica MD per un 1% casuale degli spettri in ciascuna delle calibrazioni CDEV3 (18 cuori), gruppi di dati di convalida SPECTACL e CDEV3. La significativa sovrapposizione tra i differenti gruppi di dati illustra la similarità fra gli spettri ex vivo e in vivo misurati con il sistema di imaging NIR di Infraredx.

Makoto Intravascular Imaging System™ Manuale di istruzioni

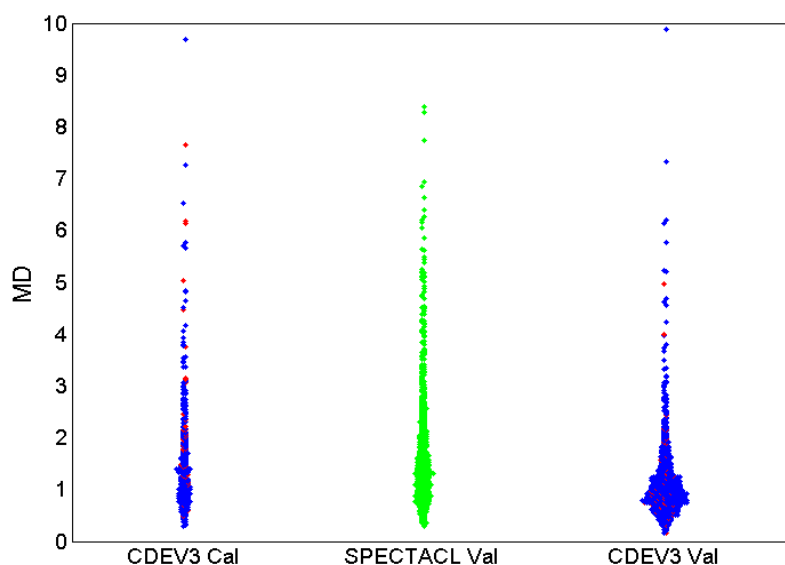


Figura 17-3. Similarità fra spettri CDEV3 ex vivo e SPECTACL in vivo da parte di MD. Il rosso indica positività per l'LCP da parte dell'istologia; il blu indica negatività per l'LCP da parte dell'istologia; il verde indica nessuna istologia. CDEV3 Cal = dati del modello di calibrazione (18 cuori, 51 segmenti, 790 spettri); SPECTACL Val = dati dello studio clinico cardine (48 pazienti, 48 segmenti, 1770 spettri); CDEV3 Val = dati di convalida (51 cuori, 126 segmenti, 3416 spettri). Ciascun cluster rappresenta l'1% degli spettri selezionati casualmente da ogni gruppo.

Sicurezza

Durante lo studio cardine SPECTACL sono stati raccolti gli spettri NIR in 89 pazienti. Aggiungendo i 10 pazienti scansionati in uno studio di fattibilità precedente, il catetere per imaging NIR è stato inserito in un totale di 99 pazienti. Nessun evento avverso è stato determinato essere in relazione al dispositivo come risultato di queste procedure.

17.3 Appendice C: Letteratura di riferimento

- 1 Gardner CM, Tan H, Hull EL, et al. Detection of lipid core coronary plaques in autopsy specimens with a novel catheter-based near-infrared spectroscopy system. JACC Cardiovasc Imaging 2008; 1: 638–48.
- 2 Waxman S, Dixon SR, L'Allier P, et al. In vivo validation of a catheter-based near-infrared spectroscopy system for detection of lipid core coronary plaques: initial results of the SPECTACL study. JACC Cardiovasc Imaging 2009; 2: 858–68.
- 3 Waksman R, Di Mario C, Torguson R, et al. Identification of patients and plaques vulnerable to future coronary events with near-infrared spectroscopy intravascular ultrasound imaging: a prospective, cohort study. Lancet 2019; 394: 1629–37.
- 4 Erlinge D, Maehara A, Ben-Yehuda O, et al. Identification of vulnerable plaques and patients by intracoronary near-infrared spectroscopy and ultrasound (PROSPECT II): a prospective natural history study. Lancet. 2021;397:985-995.

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

**17.4 Appendice D: Emissione acustica (I) Conformità alla norma
IEC 60601-2-37:2007**

Modello del sistema: Makoto Intravascular Imaging System™ (TVC-MC10)

Trasduttore: catetere per imaging IVUS+NIRS Dualpro™ (TVC-C195-42), 50 MHz

Modalità operativa: modo B

Applicazione: vascolare

Modello delle sonde	Tipo TI	Valore TI (senza unità)	MI (senza unità)
TVC-C195-42	TIS	0,43	0,36

Questi dati riportano il caso peggiore. Poiché né MI né TI sono superiori a 1,0, non è necessario compilare ulteriori tabelle.

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

17.5 Appendice E: Emissione acustica (II) Tabella di rapporto per la traccia 1

Modello del sistema: Makoto Intravascular Imaging System™ (TVC-MC10)

Modello del trasduttore: catetere per imaging IVUS+NIRS Dualpro™ (TVC-C195-42), 50 MHz

Modalità operativa: modo B

Applicazione: intravascolare

Emissione acustica			MI	I _{spta.3} (mW/cm ²)	I _{sppa.3} (W/cm ²)
Valore massimo globale			0,36	98	257
Parametro acustico associato	P _{r,a}	(Mpa)	2,6		
	W	(mW)		1,73	1,73
	f _c	(MHz)	51,97	51,97	51,97
	Z _{sp}	(cm)	0,1		0,1
	Dimensioni del raggio	x-6 (cm)			0,0123
		y-6 (cm)			0,0317
	PD	us	0,1356		0,1356
	PRF	Hz	61440		61440
	EDS	Az. (cm)		0,31	
		Elev. (cm)		0,05	
Condizioni di controllo operativo	Nessuna impostazione dell'operatore influisce sull'emissione acustica				

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

17.6 Appendice F: Tavola delle indicazioni per l'uso sugli ultrasuoni

Modello del sistema: Makoto Intravascular Imaging System™ (TVC-MC10)

Modello del trasduttore: catetere per imaging IVUS+NIRS Dualpro™
(TVC-C195-42), 50 MHz

Applicazione clinica		Modalità di funzionamento						
Generale	Specifica	B	M	PWD	CWD	Color Doppler	Combinata (specificare)	Altro* (specificare)
Oftalmica	Oftalmica							
Imaging fetale e altro	Fetale							
	Addominale							
	Intraoperatoria (specificare)							
	Intraoperatoria (neuro)							
	Laparoscopica							
	Pediatrica							
	Organo piccolo (specificare)							
	Neonatale							
	Cefalica							
	Adulta cefalica							
	Transrettale							
	Transvaginale							
	Transuretrale							
	Transesof. (non card.)							
	Muscolo-scheletrica (convenzionale)							

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

	Muscolo-scheletrica (superficiale)							
	Intravascolare							
	Altro							
Cardiaca	Cardiaca adulta	X						
	Cardiaca pediatrica							
	Intravascolare (cardiaca)	X						
	Transesof. (cardiaca)							
	Intracardiaca							
	Altro (specificare)							
Vaso periferico	Vaso periferico							
	Altro (specificare)							

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

17.7 Appendice G: Accuratezza e precisione della misurazione

Misurazione IVUS	Specificazione/Criteri di accettazione	Risultato del test*
Precisione della co-registrazione IVUS/NIR	La deviazione standard degli offset angolari tra i canali NIR e IVUS è minore o uguale a 25 gradi.	6 gradi
	La deviazione standard degli offset longitudinali tra i canali NIR e IVUS è inferiore a 0,5 mm.	0,17 mm
Precisione della misurazione dell'IVUS	Per i diametri di lumen inferiori a 5 mm, la deviazione standard nel diametro del lumen misurato è inferiore o uguale a 0,125 mm.	0,10 mm
	Per i diametri di lumen inferiori o uguali a 4 mm con i diametri dei vasi inferiori o uguali a 7,5 mm, la deviazione standard dell'area inter-sezione (CSA, cross sectional area) della placca misurata dovuta a incertezze nel vaso (EEM) e ai confini del lumen e agli effetti del NURD dovrebbe essere inferiore o uguale a 2,79 mm ² .	1,56 mm ²
Accuratezza delle misurazioni dell'IVUS	Per i diametri di lumen inferiori o uguali a 4 mm con i diametri dei vasi inferiori o uguali a 7,5 mm, l'errore nell'accuratezza dell'area intersezione (CSA) della placca misurata dovuta a incertezze nel vaso (EEM) e ai confini del lumen e agli effetti del NURD dovrebbe essere inferiore o uguale a -9%, +14% del valore misurato $\pm 0,10$ mm ² .	1,74%
	Per i diametri di lumen tra 1,8 mm e 5 mm inclusi, l'errore nell'accuratezza dell'area del lumen misurata dovuta a incertezze nel confine del lumen dove gli ultrasuoni attraversano solo il sangue dovrebbe essere inferiore o uguale a $\pm 5\%$ della misurazione $\pm 0,10$ mm ² .	1,89%
Profondità di imaging	Il design del sistema deve essere compatibile con la misurazione di strutture a una profondità che arriva fino a 8 mm e di aree fino a 200 mm ² .	Superamento

* Media del risultato a velocità di retrazione automatica minime (0,5 mm/s) e massime (2,0 mm/s).

Makoto Intravascular Imaging System™
Manuale di istruzioni

17.8 Appendice H: Conformità elettromagnetica

Guida e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche			
Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ modello TVC-MC10 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l'utente del modello TVC-MC10 deve assicurarsi che venga utilizzato in tale tipo di ambiente.			
Test delle emissioni	Livello di prova	Conformità	Ambiente elettromagnetico - indicazioni
Emissioni condotte IEC/EN 61000-4-6	150 KHz – 30 MHz Classe A	150 KHz – 30 MHz Classe A	Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ modello TVC-MC10 usa energia a radiofrequenza (RF) solamente per le funzioni interne. Di conseguenza, le sue emissioni RF sono molto contenute ed è improbabile che possano causare interferenze in apparecchi elettronici sistemati in prossimità
Emissioni radiate IEC/EN 61000-4-3	30 MHz – 1,8 GHz Classe A	30 MHz – 1,8 GHz Classe A	
Emissioni armoniche IEC/EN 61000-3-2:2001/A2:2014	Apparecchio di classe A	In base alla Clausola 5 dello standard	Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ modello TVC-MC10 è adatto per l'uso in tutti gli ambienti, tranne quelli domestici e quelli collegati direttamente alla rete pubblica a bassa tensione che fornisce alimentazione agli edifici adibiti ad uso domestico.
Sfarfallamento IEC/EN 61000-3-3:2013	In base alla Clausola 5 dello standard	In base alla Clausola 5 dello standard	

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Indicazioni e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica			
Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ modello TVC-MC10 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l'utente del modello TVC-MC10 deve assicurarsi che venga utilizzato in tale tipo di ambiente.			
Test di immunità	Livello di test	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - indicazioni
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC/EN 61000-4-2	± 8 kV scariche da contatto ± 2, 4, 8 e 15 kV scarica in aria	± 8 kV scariche da contatto ± 2, 4, 8 e 15 kV scarica in aria	I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono coperti con materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Transiente rapido elettrico/scatto IEC/EN 61000-4-4	±2 kV per le linee di alimentazione ±1 kV per le linee di ingresso/uscita 5/50 5KHz - 100KHz	±2 kV per le linee di alimentazione ±1 kV per le linee di ingresso/uscita 5/50 5KHz - 100KHz	La qualità dell'alimentazione deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Sovratensione (alimentazione CA) IEC/EN 61000-4-5	±5 kV linea - linea ±2 kV linea - terra	±5 kV linea - linea ±2 kV linea - terra	La qualità dell'alimentazione deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Cali di tensione e interruzioni IEC/EN 61000-4-11	0% U_T (0,5 cicli) 0% U_T (1 ciclo) 70% U_T (25 cicli) 0% U_T 5 s	0% U_T (0,5 cicli) 0% U_T (1 ciclo) 70% U_T (25 cicli) 0% U_T 5 s	Se l'utente del modello TVC-MC10 richiede un funzionamento continuo durante le interruzioni di alimentazione, si raccomanda che il modello TVC-MC10 sia alimentato con un gruppo statico di continuità o a batteria.
Immunità magnetica IEC/EN 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	I campi magnetici della frequenza di alimentazione devono essere a livelli caratteristici di una tipica ubicazione in un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Nota: U_T è la tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di test.			

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Indicazioni e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica			
Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ modello TVC-MC10 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l'utente del modello TVC-MC10 deve assicurarsi che venga utilizzato in tale tipo di ambiente.			
Test di immunità	Livello di test	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - indicazioni
Immunità ai disturbi radiati IEC/EN 61000-4-3 Campo di prossimità dalle apparecchiature di comunicazione a radiofrequenza wireless IEC/EN 61000-4-3	Da 80 MHz a 2,7 GHz, 3 V/m Frequenza spot 385 MHz – 5,75 GHz, modulazione di impulso Vedere la Sezione 5.3.7 o la Tabella 9 dallo standard estratto di seguito.	Da 80 MHz a 2,7 GHz, 3 V/m Frequenza spot 385 MHz – 5,75 GHz, modulazione di impulso Vedere la Sezione 5.3.7 o la Tabella 9 dallo standard estratto di seguito.	La distanza tra apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili e la parte del sistema Makoto Intravascular Imaging System™ modello TVC-MC10 a essi più vicina, cavi compresi, non deve essere inferiore alla distanza di separazione consigliata, calcolata mediante l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione consigliata Le distanze di separazione minime per livelli di test di immunità più elevati devono essere calcolati in base all'equazione seguente: $E = \left(\frac{6}{d}\right) \sqrt{P}$ dove P è la potenza massima di uscita del trasmettitore in watt (W), d è la distanza di separazione in metri (m) ed E è il livello del test di immunità in V/m.
Immunità ai disturbi condotti (Tensione CA) (Linee di ingresso/uscita) IEC/EN 61000-4-6	0,015 - 80 MHz 3 V _{RMS} & 6 V _{RMS} nelle bande ISM, 1 KHz, Rete CA	0,015 - 80 MHz 3 V _{RMS} & 6 V _{RMS} nelle bande ISM, 1 KHz, Rete CA	Al di sopra di un intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Distanze di separazione raccomandate tra gli apparecchi di comunicazione portatili e mobili RF e il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ modello TVC-MC10

Il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ modello TVC-MC10 è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono controllati. Il cliente o l'utente del modello TVC-MC10 può aiutare a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra gli apparecchi di comunicazione portatili e mobili RF (trasmettitori) e il sistema Makoto Intravascular Imaging System™ modello TVC-MC10 come raccomandato di seguito, in base alla potenza di emissione massima degli apparecchi di comunicazione. Questa tabella è stata estratta da IEC/EN 61000-4-3.

Makoto Intravascular Imaging System™

Manuale di istruzioni

Specifiche di prova per l'immunità della porta dell'alloggiamento alle apparecchiature di comunicazione wireless a RF						
Frequenza di prova (MHz)	Banda ^{a)}	Servizio ^{a)}	Modulazione ^{b)}	Potenza massima (W)	Distanza (m)	Livello di prova di immunità (V/m)
385	380-390	TETRA 400	Modulazione a impulsi ^{b)} 18 MHz	1,8	0,3	27
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM ^{c)} ± 5 kHz deviazione 1 kHz onda sinusoidale	2	0,3	28
710	704-787	Banda LTE 13, 17	Modulazione a impulsi ^{b)} 217 MHz	0,2	0,3	9
745						
780						
810	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, banda LTE 5	Modulazione a impulsi ^{b)} 18 MHz	2	0,3	28
870						
930						
1720	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulazione a impulsi ^{b)} 217 MHz	2	0,3	28
1845						
1970						
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, banda LTE 7	Modulazione a impulsi ^{b)} 217 MHz	2	0,3	28
5240	5100-5800	WLAN, 802.11 a/n	Modulazione a impulsi ^{b)} 217 MHz	0,2	0,3	9
5500						
5785						
NOTA: Se è necessario per raggiungere il livello di prova di immunità, la distanza tra l'antenna trasmittente e l'apparecchiatura o il sistema elettromedicale può essere ridotta a 1 m. La distanza di prova di 1 m è consentita dalla norma IEC 61000-4-3.						
a) Per alcuni servizi, sono incluse solo le frequenze per la tratta in salita.						
b) Il vettore deve essere modulato utilizzando un segnale a onda quadra con ciclo di lavoro al 50%.						
c) In alternativa alla modulazione FM, è possibile utilizzare la modulazione a impulsi al 50% a 18 Hz, poiché, sebbene non rappresenti una modulazione reale, sarebbe il caso peggiore.						